

2.1.5 Utilizarea piesei de mână cu baterie și declanșator dual PRO9200B HALL® Titan™

În continuare, vă prezentăm o matrice care descrie funcționalitatea celor două declanșatoare, individual sau combinate.

Poziția GĂURIRE/ALEZARE

Plasați maneta pentru modul de operare al piesei de mână în poziția „găurire/alezare”. Piesa de mână funcționează după cum urmează:



1. Apăsați declanșatorul inferior numai pentru acționarea înainte sau în sens orar, când priviți din spatele piesei de mână. Viteza este controlată în mod variabil cu ajutorul declanșatorului.
2. Apăsați declanșatorul superior numai pentru acționarea înapoi sau în sens antiorar, când priviți din spatele piesei de mână. Viteza este controlată în mod variabil cu ajutorul declanșatorului.
3. Apăsați simultan ambele declanșatoare pentru operarea în modul oscilatoriu (trei sferturi de tură în sens orar, trei sferturi de tură în sens antiorar). Viteza este controlată în mod variabil cu ajutorul declanșatorului inferior.

Poziția ÎNȘURUBARE/BURGHIU

NOTĂ: Nu utilizați piese atașate de alezare în modul ÎNȘURUBARE.



Plasați maneta pentru modul de operare al piesei de mână în poziția „înșurubare/burghiu”. Piesa de mână funcționează după cum urmează:

1. Apăsați declanșatorul inferior numai pentru înșurubarea înainte atunci când introduceți șuruburi. Viteza este controlată în mod variabil cu ajutorul declanșatorului, iar cuplul este limitat la aproximativ 2,26 Nm.
2. Apăsați declanșatorul superior numai pentru înșurubarea înapoi atunci când scoateți șuruburi. Viteza este controlată în mod variabil cu ajutorul declanșatorului. Cuplul nu este limitat.
3. Apăsați ambele declanșatoare pentru operarea în modul burghiu. Piesa de mână se va roti 720° în sens orar, iar apoi 360° în sens antiorar (2 rotații în sens orar, 1 rotație în sens antiorar). Viteza este controlată în mod variabil cu ajutorul declanșatorului inferior.

Tabelul 1: Matricea de utilizare a piesei de mână cu baterie și declanșator dual PRO9200B HALL® Titan™

Poziție buton	Mod de operare	Poziție declanșator superior	Poziție declanșator inferior	Acțiune piesă de mână
	Găurire/alezare	Neapăsat	Apăsat	Înainte
		Apăsat	Neapăsat	Înapoi
		Apăsat	Apăsat	Mod oscilatoriu*
	Înșurubare/burghiu	Neapăsat	Apăsat	Înșurubare înainte*
		Apăsat	Neapăsat	Înșurubare înapoi*
		Apăsat	Apăsat	Mod burghiu*

* NOTĂ: nu operați piese atașate de tip fierăstrău (fierăstrău sagital – PRO2043, fierăstrău cu mișcare rectilinie – PRO6045) sau piese atașate de alezare în modul înșurubare, burghiu sau oscilatoriu. Acestea trebuie utilizate numai în modul înainte/înapoi.