

Instrucțiuni de utilizare

Este o pungă de colectare unitară pentru purtătorii de stomă, de două feluri:

- Închisă, cu un filtru integrat pentru dezodorizare și evacuarea gazelor.
- Drenabilă, cu un orificiu de golire larg (70 mm), ce permite chiar și evacuarea lichidelor groase, prevăzută cu o clemă flexibilă
- Pentru urostomă, aceasta este prevăzută cu un obturator (H-I).

1. Înainte de aplicare

- Măsurati diametrul stomei dvs.
- Decupați flanșa începând de la orificiul pretăiat pentru a obține o dimensiune adecvată stomei. Lăsați un spațiu mic în jurul stomei; acesta nu trebuie „obturat” de flanșă (A).
- Pregătirea pielii
 - Curățați pielea din jurul stomei cu apă caldă. Evitați eterul, alcoolul sau alte substanțe antiseptice care pot împiedica aderarea corespunzătoare a flanșei.
 - Tamponați ușor pielea cu șervețele moi.

2. Montarea pungii

- Desprindeți părțile interioare ale pereților pungii (B).
- Desfaceți hârtia de protecție de pe flanșă și poziționați partea de jos a deschiderii flanșei în jurul bazei stomei (C).
- Apăsăți partea inferioară a flanșei uniform pe piele, apoi așezați și apăsați pe partea superioară având grijă să nu formați pliuri. Neteziți întreaga suprafață a flanșei, de jos în sus, pentru a asigura o aderare perfectă (D).

3. Îndepărtarea pungii

- Trageți ușor clapeta de desfacere și îndepărtați pungă de sus în jos, menținând o apăsare ușoară asupra pielii din jurul stomei cu cealaltă mână.

4. Pungi drenabile

- Aveți grijă ca punga dvs. să fie închisă înainte de a o aplica. Pentru a închide punga, utilizați clemă aflată în cutie (E-F-G).
- Dacă preferați, folosiți o clemă rigidă (se comandă separat: nr. ref. F00727).
- Când doriți să goliți punga, îndepărtați clemă și îndreptați capătul deschis al pungii spre toaletă. După golire, ștergeți capătul pungii cu un șervețel și puneți din nou clemă.

5. Pungi de urostomie

- Manevrarea robinetului de drenare:
- Îndreptați sistemul de drenare spre vasul de toaletă și rotiți ușor capacul în sens contrar acelor de ceasornic până când obțineți debitul de curgere dorit (H).
 - Pentru a închide capacul după golirea pungii, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când revine în poziția inițială (I).

Reglementările naționale pentru distrugerea materialelor potențial infectioase trebuie respectate.

* Disponibilitatea poate varia în funcție de țară

