

# 210\*95

## HOLINX

### SET PENTRU PERFUZIE

**L: 150 cm | 21Gx1 ½"**

1. Tamponați dopul recipientului înainte de străpungere.
2. Închideți regulatorul de debit.
3. Detașați protectorul pentru vârf, introduceți-l în recipientul cu soluție și poziționați-l cu capul în jos.
4. Strângând și eliberând ușor godeul de picurare, umpleți cu soluție până la jumătatea camerei acestuia.
5. Deschideți orificiul de admisie a aerului dacă este utilizat cu un recipient de soluție rigid și închideți-l dacă este folosit cu unul maleabil.
6. Deschideți parțial regulatorul de debit pentru amorsare.
7. Lăsați soluția să deplaseze complet aerul, apoi închideți regulatorul de debit.
8. Efectuați străpungerea venei, apoi fixați acul.
9. Reglați debitul.



STERILE EO ISO 13485



20 Picături=1mL ± 0.1 mL

- Netoxic
- Apirogen
- De unică folosință
- Luer-Slip

REF: HIVS21/112  
LOT NO: 20220506  
PROD: 20220506  
EXP: 20270505

#### Precauție:

- Nu resterilizați
- Steril până când ambalajul nu a fost deschis sau deteriorat
- Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat sau a fost deschis anterior
- Neutralizați după utilizare
- Nu depozitați la lumina directă a soarelui, la temperaturi extreme sau la umiditate ridicată
- A nu se utiliza pentru transfuzie de sânge sau derivați sanguini

**EC REP** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Add: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

 Changzhou Holinx Industries Co., Ltd  
No.1 Dongtang Rd., Zhenglu Town, Changzhou, Jiangsu, China

Repr. Aut. în Republica Moldova: S.C."IMUNOTEHNOMED" S.R.L.  
Adr.: No 42, Gh.Asachi str., Chișinău, Republica Moldova, MD-2028

PRODUS ÎN CHINA

# 210\*95

## HOLINX

### SET PENTRU PERFUZIE

**L: 150 cm | 21Gx1 ½" | Fără manșon**

1. Tamponați dopul recipientului înainte de străpungere.
2. Închideți regulatorul de debit.
3. Detașați protectorul pentru vârf, introduceți-l în recipientul cu soluție și poziționați-l cu capul în jos.
4. Strângând și eliberând ușor godeul de picurare, umpleți cu soluție până la jumătatea camerei acestuia.
5. Deschideți orificiul de admisie a aerului dacă este utilizat cu un recipient de soluție rigid și închideți-l dacă este folosit cu unul maleabil.
6. Deschideți parțial regulatorul de debit pentru amorsare.
7. Lăsați soluția să deplaseze complet aerul, apoi închideți regulatorul de debit.
8. Efectuați străpungerea venei, apoi fixați acul.
9. Reglați debitul.



STERILE EO

ISO 13485



PVC



15 μm

20 Picături=1mL ± 0.1 mL

- Netoxic
- Apirogen
- De unică folosință
- Luer-Slip

REF: HIVSW/O21  
LOT NO: 20220506  
PROD: 20220506  
EXP: 20270505

#### Precauție:

- Nu resterilizați
- Steril pînă cînd ambalajul nu a fost deschis sau deteriorat
- Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat sau a fost deschis anterior
- Neutralizați după utilizare
- Nu depozitați la lumina directă a soarelui, la temperaturi extreme sau la umiditate ridicată
- A nu se utiliza pentru transfuzie de sânge sau derivați sanguini

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Add: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Changzhou Holinx Industries Co., Ltd  
No.1 Dongtang Rd., Zhenglu Town, Changzhou, Jiangsu, China

Repr. Aut. în Republica Moldova: S.C."IMUNOTEHNOMED" S.R.L.  
Adr.: No 42, Gh.Asachi str., Chișinău, Republica Moldova, MD-2028

PRODUS ÎN CHINA