


Clino'wipes

ȘERVEȚELE IMPREGNATE CU O
SOLUȚIE DE DETERGENT ȘI
DEZINFECTANT

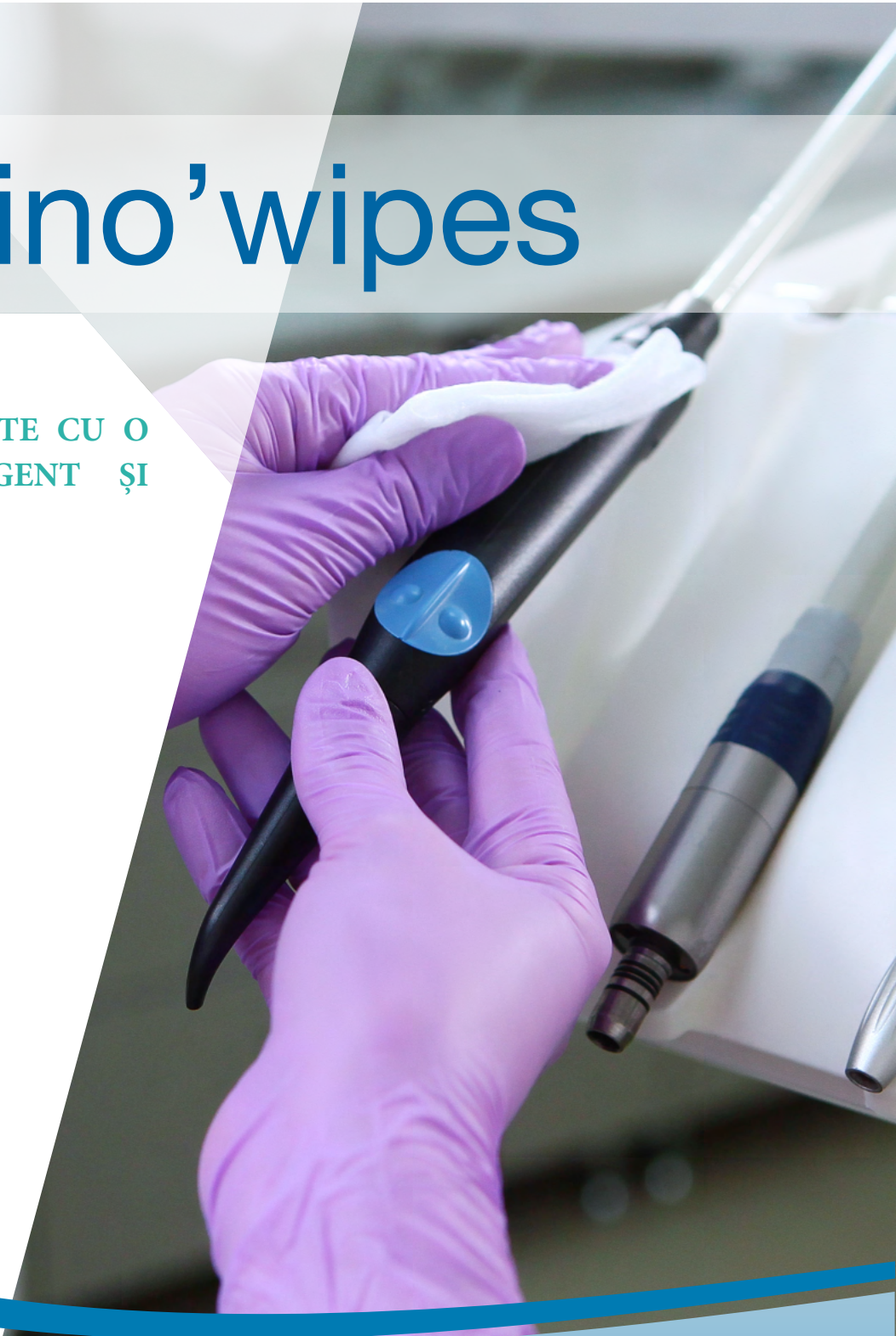

■ BENEFICIILE PRODUSULUI

- Activ de la 2 min. (EN 16615)
- Curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale într-o singură operațiune
- Activitate virucidă completă (virusuri simple și încapsulate)
- Formulă pentru contactul cu alimentele
- Activ împotriva Clostridium difficile (soluție de impregnare)

Clino'wipes

ȘERVEȚELE IMPREGNATE CU O SOLUȚIE DE DETERGENT ȘI DEZINFECTANT

Instrucțiuni de utilizare

- Când folosiți șervețelele umede pentru prima dată:
- Puneți mănuși și scoateți capacul cutiei
- Scoateți capacul și scoateți primul șervețel (din centrul rolei)
- Treceți șervețelul prin deschiderea capacului cutiei

1- ■ Utilizare:

1- Curățați temeinic prin ștergere mecanică a suprafeței materialului care urmează să fie tratat

2- Timp de contact: în funcție de activitatea antimicrobiană dorită

3- Nu clătiți*

* Nu necesită clătire, cu excepția cazului în care producătorul stratului de acoperire specifică altfel sau pentru suprafețele care intră în contact cu alimente, piele și mucoase.

4- Aruncați suportul

5- Închideți capacul după fiecare utilizare

6- Repetați operațiunea dacă este necesar

PROPRIETĂȚI DEZINFECTANTE

Activitate	Standard		Contact
Bactericidal	EN 16615		2 min.
	EN 13727		
	EN 1276		5 min.
	EN 13697		
Levuricid	EN 14561		
	EN 16615		2 min.
	EN 13624		
	EN 1650		5 min.
Fungicidal	EN 13697		10 min.
	EN 14562		
	EN 13624		10 min.
	EN 14562		
Virucidal	EN 14476	Norovirus	5 min.
		Adenovirus	
		Poliovirus	10 min.
		Rotavirus	
Tuberculocidal	EN 14348	M.terrae	10 mi
Sporicidal	EN 13704	Clostridium difficile	15 min.
	EN 17126	Bacillus cereus Bacillus subtilis	10 min.

PRECAUȚII DE UTILIZARE

Consultați Fișa cu Date de Securitate

CARACTERISTICI

- Aspect: șervețele albe nețesute
- pH-ul soluției de impregnare: 7

COMPOZIȚIE

- Dodecylamine
- Ethanol
- Isopropanol
- Surfactant
- Excipient

AMBALAJ

- 1 Box of 12 canisters of 150 wipes ref. **10795166**



CE
0459

Dangerous product - follow the precautions for use. Read the label and product information before use. Class IIb medical device.