



ACEASTĂ ETICHETĂ SE APLICĂ PENTRU SITUAȚII SAU ACȚIUNI CARE PREZINTĂ UN PERICOL POTENȚIAL. DACĂ IGNORAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI, VEȚI CAUZA VĂTĂMAREA MINORĂ A PERSOANELOR IMPLICATE, ORI PAGUBE MATERIALE MINORE.

Acest manual utilizează imagini sau pictograme pentru a evidenția mesajele tipărite. Manualul utilizează pictograma sau simbolul internațional corespunzător din dreptul mesajului de pericol, avertismentului sau precauției. De exemplu, mâna ridicată cu un fulger deasupra avertizează în legătură cu pericolele de natură electrică.

3.3 Simbolurile și etichetele de avertizare

3.3.1 Simboluri

Acest capitol utilizează simbolul sau pictograma internațională, împreună cu mesajul de pericol, avertisment sau atenționare.

Tabelul 3 Simboluri utilizate pe etichete


Simbol	Description (Descriere)
	Curent alternativ
	Curent alternativ trifazic
	Punct de împământare de protecție
	PORNIRE/Alimentare
	OPRIRE/Alimentare OPRITĂ
	Putere de intrare
	Putere de ieșire

Simboluri utilizate pe etichete Continuare	
Simbol	Description (Descriere)
	Componentă aplicată de tip B
	Împământare funcțională
	Pericol de electrocutare
	Atenționare sau avertisment
	Prinderea mâinilor
	Radiație
	Greutate maximă suportată

Simboluri utilizate pe etichete Continuare	
Simbol	Description (Descriere)
	Oprirea de urgență
	Marcaj ETL: Dovada conformității produsului cu standardele de siguranță din America de Nord (siguranță electrică, a gazelor și alte standarde de siguranță). Autoritățile competente (AC) din 50 de state și Canada, precum și comercianții cu amănuntul acceptă marcajul ETL ca fiind o dovadă a siguranței produselor.
	Sistemul trebuie să respecte cerințele aplicabile ale standardului 21CFR, subcapitolul J
	WEEE (Deșeuri provenind din echipamente electrice și electronice): Acest simbol indică faptul că atunci când utilizatorul final dorește să elimine acest produs, produsul trebuie trimis la unități speciale de colectare în vederea recuperării și reciclării.
	Marcajul CE: Declarația fabricantului cu privire la îndeplinirea de către produs a cerințelor esențiale impuse de legislația europeană relevantă pentru sănătate, siguranță și protecția mediului.
	Marcajul comun de punere în circulație a produselor certifică faptul că produsele care sunt prevăzute cu acest marcaj au trecut procedurile de evaluare (aprobare) a conformității stabilite de regulamentele tehnice ale Uniunii Vamale și corespund cu cerințele tuturor regulamentelor Uniunii Vamale aplicate acestor produse.

Tabelul 4 Simboluri utilizate pe etichete

Simbol	Description (Descriere)
Fabricat pentru	Indică producătorul (proprietarul de design responsabil)
Fabricat de sau de	Indică locația de fabricație
	Consultați manualul/broșura de instrucțiuni Atenție, consultați documentele însoțitoare

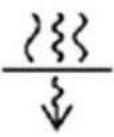Simboluri utilizate pe etichete Continuare	
Simbol	Description (Descriere)
	Împingerea este interzisă
	Nu staționați pe capacul de protecție pentru picioare al mesei
	Producător legal
	Data fabricației
Rx Only	Se eliberează numai pe bază de prescripție medicală
SN	Număr de serie
REF	Număr de catalog
	Filtrarea razelor X (filtrarea echivalentă Al)
	Filtrarea minimă


Simboluri utilizate pe etichete Continuare	
Simbol	Description (Descriere)
	Simbol laser
	Punct focal XL
	Punct focal L
	Punct focal S

3.3.2 Etichete de avertizare pentru echipament

Următoarele etichete de avertizare sunt utilizate pe echipament:

3.3.2.1 Etichetele de avertizare privind luminile laser

Figura 1 Etichetele de avertizare situate în partea de jos a capacului cadrului de scanare (Referință 21CFR 1040.10 (g)(4))

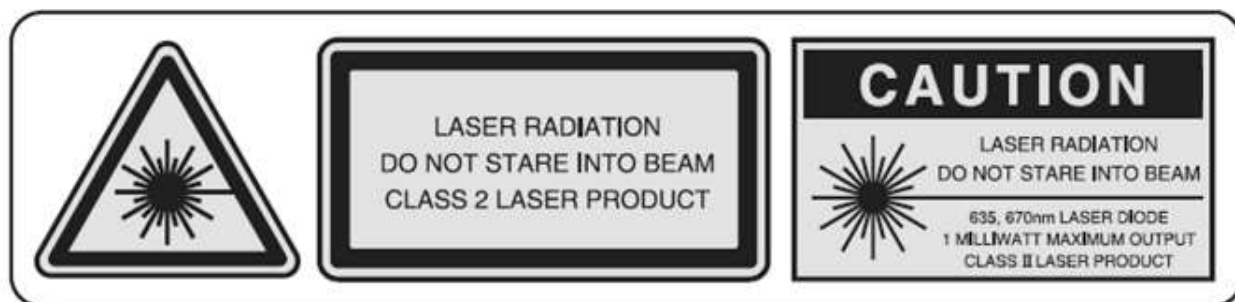

RADIAȚII LASER
 NU PRIVIȚI FASCICULUL
 PRODUS LASER CLASA 2



RADIAȚII LASER

Nu priviți pe direcția fasciculului

Diodă laser 635, 670 nm

Putere maximă: 1 mW

Produs laser clasa II

Figura 2 Etichetele de pe partea frontală a suportului de scanare (Referință 21CFR 1040.10(h))



ORIFICIU LASER

Nu priviți în fasciculul de raze


Figura 3 Etichetele din fața cadrului de scanare, spatele mesei, spatele PDU, spatele computerului de scanare și partea laterală a dulapului de sistem.



EVITAȚI VĂTĂMAREA. CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI INFORMAȚIILE DIN MANUALE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL.

3.3.2.2 Etichetele de avertizare privind razele X

Figura 4 Etichete localizate pe interfața de control al scanării (Referință 21CFR 1020.30 (j))

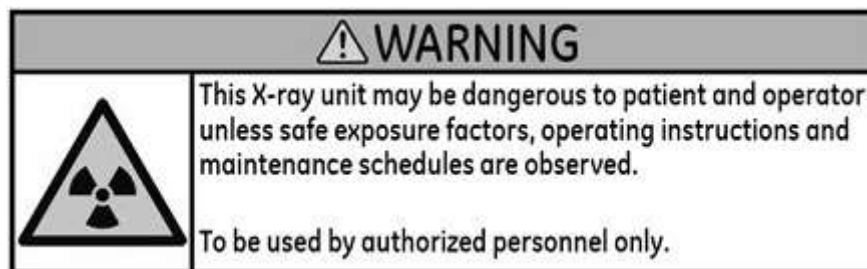

ACEASTĂ UNITATE ROENTGEN POATE FI PERICULOASĂ PENTRU PACIENT ȘI PENTRU OPERATOR DACĂ NU SE RESPECTĂ FACTORII DE EXPUNERE ÎN SIGURANȚĂ, INSTRUȚIUNILE DE UTILIZARE ȘI PROGRAMELE DE ÎNTREȚINERE.

A se utiliza numai de către personal autorizat.

3.3.2.3 Etichetele de avertizare de pe masă

Figura 5 Etichete de avertizare privind pericolul de strivire, aflate pe masă



EVITAȚI VĂTĂMAREA. PRINDEREA DEGETELOR POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI. ȚINEȚI DEGETELE DEPARTE DE ACEASTĂ ZONĂ ÎNAINTE DE A MUTA CADRUL.

Masă pentru greutate standard


Masa poate avea oricare dintre următoarele două etichete:

Figura 6 Etichetă de avertizare privind limita de greutate pentru masa pentru greutate standard



EVITAȚI RĂNIRILE. NU DEPĂȘIȚI CAPACITATEA MAXIMĂ A MESEI, CARE ESTE 227 KG (500 LIVRE).

Figura 7 Eticheta privind limita de greutate, aflată pe masă pentru greutate standard

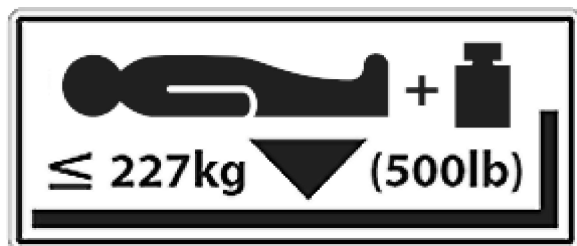

Masă pentru greutate mare

Figura 8 Etichetă de limitare a greutății amplasată pe masa cu capacitate mare



3.3.2.4 Etichete de avertizare de pe unitatea de distribuție a puterii (PDU)

Figura 9 Avertisment privind deplasarea PDU, aflat în spatele PDU



PDU SE POATE MIȘCA ȘI DETERIORA CABLURILE. NU VĂ SPRIJINIȚI DE ACEASTA ȘI NU O MUTAȚI CÂND ESTE CONECTATĂ LA REȚEAUA DE CURENT ELECTRIC.

Figura 10 Atenționare privind deplasarea PDU, aflată în spatele PDU



PDU SE POATE MIȘCA ȘI DETERIORA CABLURILE. NU VĂ SPRIJINIȚI DE ACEASTA ȘI NU O MUTAȚI CÂND ESTE CONECTATĂ LA REȚEAUA DE CURENT ELECTRIC.

Figura 11 Eticheta WEEE



3.3.2.5 Etichetele de pe computerul de scanare

Figura 12 Etichetă privind citirea manualelor înainte de operare



EVITAȚI VĂTĂMAREA. CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI INFORMAȚIILE DIN MANUALE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL.

Figura 13 Eticheta WEEE



3.3.2.6 Etichetele de pe accesoriile externe

Figura 14 Etichetă de avertizare privind stativul IV, aflată pe piciorul stativului IV



NU ÎNCĂRCAȚI MAI MULT DE 4,5 KG SAU 10 LIVRE. VERIFICAȚI DACĂ ESTE BINE STRÂNS COLIERUL DE EXTENSIE, ÎNAINTE DE UTILIZARE.


Această atenționare poate apărea și sub formă de avertisment.

Figura 15 Etichetă de avertizare privind stativul IV, aflată pe piciorul stativului IV



NU ÎNCĂRCAȚI MAI MULT DE 4,5 KG SAU 10 LIVRE. VERIFICAȚI DACĂ ESTE BINE STRÂNS COLIERUL DE EXTENSIE, ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Figura 16 Etichetă de avertizare privind tava mesei, aflată pe piciorul tăvii mesei

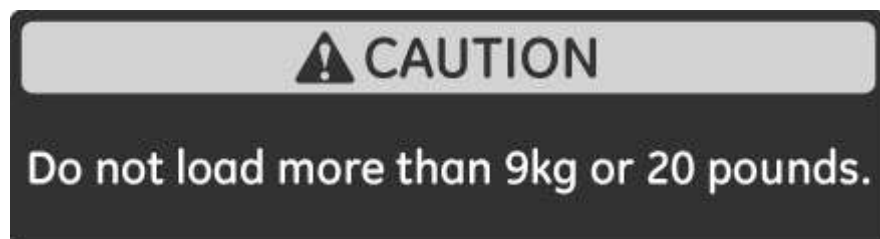

NU ÎNCĂRCAȚI MAI MULT DE 9 KG SAU 20 LIVRE.

Această atenționare poate apărea și sub formă de avertisment.

Figura 17 Etichetă de avertizare privind tava mesei, aflată pe piciorul tăvii mesei



NU ÎNCĂRCAȚI MAI MULT DE 9 KG SAU 20 LIVRE.

Figura 18 Atenționare privind suportul axial pentru cap



ACCESORIUL SE POATE DESPRINDE ȘI POATE CAUZA VĂTĂMĂRI DACĂ NU ESTE FIXAT DE CADRU. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACCESORIUL ESTE FIXAT DE PARTEA INFERIOARĂ A CADRULUI. GREUTATEA EXCESIVĂ POATE CAUZA RUPEREA ACCESORIULUI ȘI POATE CAUZA VĂTĂMĂRI. NU ÎNCĂRCAȚI MAI MULT DE 34 KG SAU 75 LIVRE.

Această atenționare poate apărea și sub formă de avertisment.

Figura 19 Avertisment privind suportul axial pentru cap



PERICOLE DE CĂDERE. ACCESORIUL SE POATE DESPRINDE ȘI POATE CAUZA VĂTĂMĂRI DACĂ NU ESTE FIXAT DE CADRU. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACCESORIUL ESTE FIXAT DE PARTEA INFERIOARĂ A CADRULUI. GREUTATEA EXCESIVĂ POATE CAUZA RUPEREA ACCESORIULUI ȘI POATE CAUZA VĂTĂMĂRI. NU ÎNCĂRCAȚI MAI MULT DE 34 KG (75 LBS).


Figura 20 Atenționare privind suportul coronal pentru cap


ATENȚIONARE

NU LOVIȚI ACCESORIUL DE SUPORTUL DE SCANARE. POATE AVEA LOC O VĂTĂMARE A PACIENTULUI SAU DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI.

Această atenționare poate apărea și sub formă de avertisment.

Figura 21 Avertisment privind suportul coronal pentru cap

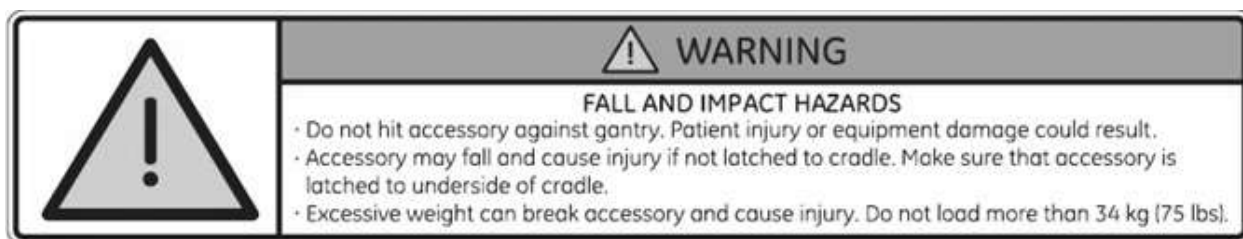
AVERTISMENT

PERICOLE DE CĂDERE ȘI IMPACT. NU LOVIȚI ACCESORIILE DE STATIV. POATE AVEA LOC O VĂTĂMARE A PACIENTULUI SAU DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI. ACCESORIUL SE POATE DESPRINDE ȘI POATE CAUZA VĂTĂMĂRI DACĂ NU ESTE FIXAT DE CADRU. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACCESORIUL ESTE FIXAT DE PARTEA INFERIOARĂ A CADRULUI. GREUTATEA EXCESIVĂ POATE CAUZA RUPEREA ACCESORIULUI ȘI POATE CAUZA VĂTĂMĂRI. NU ÎNCĂRCAȚI MAI MULT DE 34 KG (75 LBS).

Figura 22 Avertisment privind extensia fără amortizor



PERICOLE DE CĂDERE. ACCESORIUL SE POATE DESPRINDE ȘI POATE CAUZA VĂTĂMĂRI DACĂ NU ESTE FIXAT DE CADRU. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACCESORIUL ESTE FIXAT DE PARTEA INFERIOARĂ A CADRULUI. GREUTATEA EXCESIVĂ POATE CAUZA RUPEREA ACCESORIULUI ȘI POATE CAUZA VĂTĂMĂRI. NU ÎNCĂRCAȚI MAI MULT DE 34 KG (75 LBS).

3.4 Siguranța radiologică

(Referință 21CFR 1020.30 (h)(1)(i))



3.4.1 Protecția împotriva razelor X



ECHIPAMENTELE CU RAZE X UTILIZATE INADECVAT POT CONDUCE LA RĂNIRI. CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI INSTRUCȚIUNILE DIN ACEASTĂ CARTE, ÎNAINTE DE A ÎNCERCA SĂ OPERAȚI ACEST ECHIPAMENT. DACĂ NU RESPECTAȚI PRACTICILE DE SIGURANȚĂ REFERITOARE LA RAZELE X SAU DACĂ IGNORAȚI RECOMANDĂRILE DIN ACEST MANUAL, DVS. ȘI PACIENTUL DVS. RISCAȚI SĂ VĂ EXPUNEȚI LA RADIAȚII PERICULOASE.

Utilizatorii autorizați

Acest echipament prezintă un grad ridicat de protecție împotriva radiației X în afara fasciculului util. Acest echipament nu poate substitui, însă, cerința esențială ca fiecare utilizator să ia măsurile de protecție adecvate pentru a preveni posibilitatea ca orice persoană să se expună la radiații pe sine sau pe alții, din neglijență, imprudență sau necunoaștere.