

PROSPECTUL PRODUSULUI

LEBCONTROL

*Set de diagnostic serologic al leucozei enzootice bovine
prin testul de imunodifuzie în gel de agar*

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

ROMVAC COMPANY S.A.

Șos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov

E-mail: romvac@romvac.ro;

Telefon: 021.350 31 06; 021.350 31 07;

21.350 09; 021.352 00 70;

Fax: 021.350 31 10; 021.352 75 84;

Fax Livrări: 021.350 31 11

Website: www.romvac.ro

2. DENUMIREA COMERCIALĂ A SETULUI DE DIAGNOSTIC

*LEBCONTROL - Set de diagnostic serologic al leucozei enzootice bovine prin testul de
imunodifuzie în gel de agar.*

3. INDICAȚII

Setul LEBCONTROL se folosește doar *in vitro*, fiind destinat Laboratoarelor Sanitare-
Veterinare pentru diagnosticului de laborator al infecției cu virusul leucozei enzootice bovine
(VLEB) prin testul de imunodifuzie în gel de agar.

LEBCONTROL este un produs constituit din reagenți specifici -antigen (AG-LEB), ser pozitiv
(SP-LEB) și diluant, în volum corespunzător dozajului.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu este cazul.

5. FIECARE SET DE DIAGNOSTIC CONȚINE:

- **Antigen LEB** (glicoproteină virală internă - 51, obținută prin prelucrarea culturii celulare
NBL-12 ce conține VLEB) - liofilizat

- **Ser pozitiv LEB** (ser ce conține anticorpi precipitanți față de virusul LEB)- liofilizat
În flacoanele de liofilizare se repartizează 0,8-2,4 ml antigen (AG- LEB), 3,65-11,00 ml ser
pozitiv (SP- LEB).

- **Diluantul** - reprezentat de apă deionizată sau bidistilată sterilă, cu pH 6,0-8,0.
Flacoanele cu diluant conțin 5-14 ml, corespunzător dozajului componentelor liofilizate.

6. FORMA DE PREZENTARE

- Ag-LEB - peletă liofilizată compactă sau ușor poroasă, de culoare alb-gălbuie.


- SP-LEB - peletă liofilizată compactă de culoare brun-roșietică.

- Diluantul - lichid incolor, transparent.

Setul LEBCONTROL conține: 100, 150, 200, 250 și 300 de doze.

7. MATERIALE SUPLIMENTARE NECESARE UTILIZĂRII SETULUI

- Plăci Petri din plastic cu diametrul 85 mm

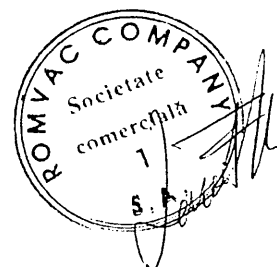

- Matriță ce decupează godeul central cu diametrul de 4 mm și cele șase godeuri periferice, cu diametru de 6 mm
- Baie Marie (56°C)
- Micropipete cu vârful (20-100 µl)
- Cilindru gradat

8. PRINCIPIUL METODEI:

Setul LEBCONTROL este utilizat în laboratoarele specializate pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine prin reacția de imunodifuzie în gel de agar. Principiul metodei se bazează pe reacția de precipitare (linie de precipitare în gel de agar) între virusul leucozei bovine conținut în antigenul LEB și anticorpii precipitanți prezenți în serul pozitiv sau în serul de testat provenit de la bovine suspionate de leucoză enzootică bovină.

9. MODUL DE A UTILIZARE AL SETULUI „LEBCONTROL” ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR

MODUL DE UTILIZARE A SETULUI „LEBCONTROL”

Prepararea gelului de agar

Prepararea gelului de agar în care se execută reacția de imunodifuzie se efectuează în tampon TRIS, după următoarea rețetă:

Prepararea tamponului TRIS: la 6,057 g TRIS se adaugă apă distilată până la 250 ml. La soluția obținută se adaugă 44,2 ml HCl 1N și apoi 85 g NaCl, după care se aduce la 1 litru cu apă distilată. Tamponul TRIS preparat va avea pH = 7,2. La 1 litru tampon preparat se adaugă 9 g agar Noble, după care se fierbe amestecul la baie Marie până la completa dizolvare a agarului. Agarul astfel preparat se repartizează în flacoane prevăzute cu dopuri și capse etanșe, se sterilizează și poate fi conservat la 4°C maximum 30 de zile.

Pregătirea plăcilor cu agar

Testul de imunodifuzie se execută în plăci Petri cu diametrul de 85 mm, în care se repartizează, după fluidifiere la cald, 15 ml agar preparat în tampon TRIS. Plăcile se lasă cu capacul întredeschis, pe o suprafață orizontală, aproximativ o oră pentru solidificare. Stratul de agar are o grosime de 2,6 mm. În agarul solidificat se decupează godeuri cu ajutorul matriței care execută godeuri de 6 mm, cu distanța între godeuri de 3 mm. Godeul central va avea 4 mm.

Se îndepărtează rondelele de agar din fiecare godeu cu ajutorul unei pipete Pasteur racordată la o pompă de vid. După scoaterea rondelilor, plăcile se lasă la temperatura camerei cel puțin 30 minute și apoi se aspiră lichidul de condens format în godeuri. Plăcile pregătite cu godeuri vor fi folosite în aceeași zi în care au fost prelucrate.

Modul de executare al testului de imunodifuzie în gel de agar (conf. O.I.E. Manual de Diagnostic Tests Vaccines for Terrestrial Animals (mammals, birds and bees), Fifth Edition, 2008.

Antigenul este plasat în godeul central și serul pozitiv, alternativ, în godeurile 1 și 4 periferice. Probele de ser de testat sunt plasate în celelalte 4 godeuri (fig. 1). Volumul reagenților este de 32 µl/godeul central (antigen) și de 73 µl godeurile periferice.

Plăcile sunt menținute la temperatura camerei (20–25°C) în atmosferă umedă.

După 24–48 ore reacțiile de precipitare sunt examinate sub un fascicul îngust, intens oblic de lumină, contra unui fond negru. Liniile de referință trebuie să fie clar vizibile la 24 ore și orice ser de testat care este puternic pozitiv trebuie să formeze linii de identitate ca cele între reagenții standard. O reacție slab pozitivă apare după 48 ore și este indicată printr-o ușoară curbare a liniei de precipitare, între godeul cu antigen și cel cu ser de testat. Serurile cu un titru înalt de anticorpi precipitanți pot forma linii de precipitare mai largi care tind să fie difuze. Aceste reacții pot fi confirmate ca specifice pentru LEB prin diluarea serurilor, 1/2 sau 1/4 înaintea retestării; acestea vor da o linie de precipitare mai distinctă. Serurile lipsite de anticorpi pentru virusul LEB nu vor forma linii de precipitare și nu vor avea nici un efect asupra liniilor de reacție a reagenților standard.


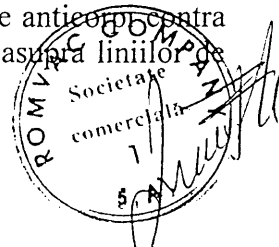


FIG. 1

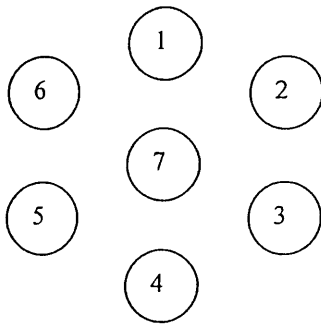

- 1, 4 – Sp-LEB
- 2, 3, 5, 6 – Seruri de testat
- 7 – Ag-LEB

INTERPRETAREA TESTULUI DE IMUNODIFUZIUNE ÎN GEL DE AGAR (fig. 2)

Citirea reacției se face la 24 de ore și la 48 de ore, iar interpretarea la 72 ore de la executare.


Se recomandă citirea reacției la o sursă de lumină laterală și pe un fond întunecat.

Se consideră reacție pozitivă (fig.2) când între godeul cu antigen LEB și godeul cu ser de testat apare o linie de precipitare clară la jumătatea distanței dintre godeuri, linie ce se unește cu linia de precipitare a serului pozitiv LEB (godeul nr. 2 și nr. 3).

Se consideră reacție slab pozitivă (fig.2) când între godeul cu antigen LEB și godeul cu ser de testat apare o linie de precipitare tangentă la godeul cu ser de testat, unindu-se cu linia de precipitare a serului pozitiv LEB (godeul nr. 5).

Se consideră reacție negativă (fig. 2) atunci când între godeul cu antigen LEB și godeul cu ser de testat nu apar linii de precipitare (godeul nr. 6).


FIG. 2

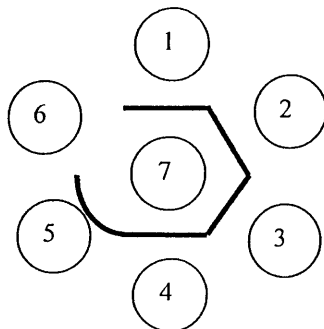

- 1 – Sp-LEB
- 2 – Ser de testat (pozitiv)
- 3 – Ser de testat (pozitiv)
- 4 – Sp-LEB
- 5 – Ser de testat (slab pozitiv)
- 6 – Ser de testat (negativ)
- 7 – Ag-LEB

Se consideră reacție nespecifică (fig. 3), când între godeul cu antigen și godeul cu ser de testat apare o linie de precipitare care se întretaie cu linia de precipitare a serului pozitiv LEB (godeul nr. 5) sau când apar linii de precipitare difuze, scurte (godeul nr. 2) sau cu halouri (godeul nr. 6), care nu se unesc cu liniile de precipitare date de serul pozitiv LEB.

FIG. 3

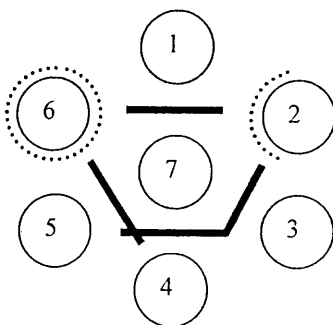

- 1 - Sp-LEB
- 2 - Ser de testat (reacție nespecifică)
- 3 - Ser de testat (pozitiv)
- 4 - Sp-LEB
- 5 - Ser de testat (reacție nespecifică)
- 6 - Ser de testat (reacție nespecifică)
- 7 - Ag-LEB



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Componentele liofilizate (Ag-LEB, Sp-LEB) și diluantul se conservă la 2–8°C, ferit de lumină, atât la beneficiar, cât și pe timpul transportului (lăzi izoterme sau mașini frigorifice).

După rehidratare, componentele setului LEBCONTROL se păstrează la 2–8°C, timp de 7 zile.

A nu se congela.

A nu se utiliza după data de expirare inscripționată pe etichetă.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

LEBCONTROL se utilizează cu respectarea măsurilor de protecție a persoanei și a mediului.

Nu se folosesc reagenți expirați sau componente ale altor seturi.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU DEȘEURILOR

Pentru protecția mediului, flacoanele cu produs rămas neutilizat, flacoanele goale sau alte deșeuri sunt tratate cu un dezinfectant adecvat, neutralizate prin fierbere sau ardere și nu trebuie aruncate în ape reziduale sau la resturi menajere, ci în locuri special amenajate.

13. MOD DE PREZENTARE

Setul LEBCONTROL utilizat în testul ID, conține:

PRODUS	ID	
	ml	d o z e
ANTIGEN LEB	0,8; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4	100, 150, 200, 250, 300
SER POZITIV LEB	3,65; 5,47; 7,3; 9,12; 11,00.	
DILUANT	5; 7; 9; 12; 14	

14. VALABILITATE

Setul LEBCONTROL are o valabilitate de 24 luni de la data condiționării.


15. ULTIMA REVIZIE A PROSPECTULUI

Ianuarie 2012.

16. ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest produs veterinar, imunologic, de diagnostic, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Rugăm a însoți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe flacon sau pe etichetă.

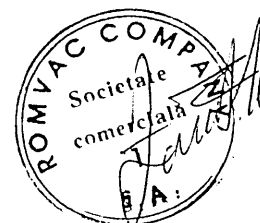

Mostre etichete

LEBCONTROL

100 doze/set

150 doze/set

Romvac
Company

LEBCONTROL

Tel.: 021 3503109

Set de diagnostic serologic al leucozei enzootice bovine
prin testul de imunodifuzie in gel de agar

FORMA DE PREZENTARE: Antigen LEB- liofilizat; Ser pozitiv LEB- liofilizat;
Diluant- lichid incolor.

DIMENSIUNEA AMBALAJULUI: 1 set x 100 doze. Sena..... Cod B- 3216

INDICATII: Este utilizat in laboratoarele de diagnostic pentru confirmarea sau
infirmarya leucozei enzootice bovine.

MOD DE UTILIZARE: Conform prospectului.

DATA EXPIRARI:.....

CONDITII SPECIALE DE DEPOZITARE SI TRANSPORT: Se depoziteaza la +2° / + 8°C,
protejat de lumina , inget si umiditate crescuta

PRECAUTII SPECIALE: Deseurile se vor depozita in locuri special amenajate.

A nu se lasa la indemana copiilor!

AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE:

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

LEBCONTROL

Tel.: 021 3503109

Set de diagnostic serologic al leucozei enzootice bovine
prin testul de imunodifuzie in gel de agar

FORMA DE PREZENTARE. Antigen LEB- liofilizat; Ser pozitiv LEB- liofilizat;
Diluant- lichid incolor.

DIMENSIUNEA AMBALAJULUI: 1 set x 150 doze. Sena..... Cod B- 3216

INDICATII: Este utilizat in laboratoarele de diagnostic pentru confirmarea sau
infirmarya leucozei enzootice bovine.

MOD DE UTILIZARE: Conform prospectului.

DATA EXPIRARI:.....

CONDITII SPECIALE DE DEPOZITARE SI TRANSPORT: Se depoziteaza la +2° / + 8°C,
protejat de lumina , inget si umiditate crescuta

PRECAUTII SPECIALE: Deseurile se vor depozita in locuri special amenajate.

A nu se lasa la indemana copiilor!

AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE:

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL ANTIGEN

Antigen pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 0.8 ml. Nr. de doze/ml/set 100

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria Data exp. Cod B-3216 Dep. +2° / +8° C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL ANTIGEN

Antigen pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 1.2 ml. Nr. de doze/ml/set 150

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria Data exp. Cod B-3216 Dep. +2° / +8° C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL SER POZITIV

Ser pozitiv pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 3.55 ml. Nr. de doze/ml/set 100

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria Data exp. Cod B-3216 Dep. +2° / +8° C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL SER POZITIV

Ser pozitiv pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 5.47 ml. Nr. de doze/ml/set 150

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria Data exp. Cod B-3216 Dep. +2° / +8° C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

DILUANT LEBCONTROL

Diluant pentru reconstituirea componentelor setului
pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine prin testul de
imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - lichid incolor

Capacitate: 5 ml. Nr. de doze/ml/set 100

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria Data exp. Cod B-3216 Dep. +2° / +8° C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

DILUANT LEBCONTROL

Diluant pentru reconstituirea componentelor setului
pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine prin testul de
imunodifuzie in gel de agar


Forma de prezentare - lichid incolor

Capacitate: 7 ml. Nr. de doze/ml/set 150

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria Data exp. Cod B-3216 Dep. +2° / +8° C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

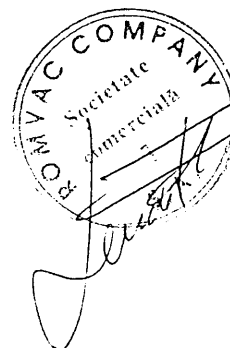

Mostre etichete LEBCONTROL.

200 doze/set

250 doze/set

Romvac
Company

LEBCONTROL

Tel.: 021 3503109

Set de diagnostic serologic al leucozei enzootice bovine
prin testul de imunodifuzie in gel de agar

FORMA DE PREZENTARE: Antigen LEB- liofilizat; Ser pozitiv LEB- liofilizat;
Diluant- lichid incolor.

DIMENSIUNEA AMBALAJULUI: 1 set x 200 doze. Sena..... Cod B- 3216

INDICATII: Este utilizat in laboratoarele de diagnostic pentru confirmarea sau
infirmarya leucozei enzootice bovine.

MOD DE UTILIZARE: Conform prospectului.

DATA EXPIRARI:.....

CONDITII SPECIALE DE DEPOZITARE SI TRANSPORT: Se depoziteaza la +2° I + 8°C,
protejat de lumina , inget si umiditate crescuta

PRECAUTII SPECIALE: Deseuri se vor depozita in locuri special amenajate.

A nu se lasa la indemana copiilor!

AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE:

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

LEBCONTROL

Tel.: 021 3503109

Set de diagnostic serologic al leucozei enzootice bovine
prin testul de imunodifuzie in gel de agar

FORMA DE PREZENTARE: Antigen LEB- liofilizat; Ser pozitiv LEB- liofilizat;
Diluant- lichid incolor.

DIMENSIUNEA AMBALAJULUI: 1 set x 250 doze. Sena..... Cod B- 3216

INDICATII: Este utilizat in laboratoarele de diagnostic pentru confirmarea sau
infirmarya leucozei enzootice bovine.

MOD DE UTILIZARE: Conform prospectului.

DATA EXPIRARI:.....

CONDITII SPECIALE DE DEPOZITARE SI TRANSPORT: Se depoziteaza la +2° I + 8°C,
protejat de lumina , inget si umiditate crescuta

PRECAUTII SPECIALE: Deseurile se vor depozita in locuri special amenajate.

A nu se lasa la indemana copiilor!

AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE:

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL ANTIGEN

Antigen pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 1,6 ml. Nr. de doze/set 200

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL ANTIGEN

Antigen pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 2,0 ml. Nr. de doze/set 250

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL SER POZITIV

Ser pozitiv pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 7,3 ml. Nr. de doze/set 200

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL SER POZITIV

Ser pozitiv pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 9,12 ml. Nr. de doze/set 250

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

DILUANT LEBCONTROL

Diluant pentru reconstituirea componentelor setului
pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine prin testul de
imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - lichid incolor

Cantitate: 9 ml. Nr. de doze/set 200

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

DILUANT LEBCONTROL

Diluant pentru reconstituirea componentelor setului
pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine prin testul de
imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - lichid incolor

Cantitate: 12 ml. Nr. de doze/set 250

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

300 doze/set

Romvac
Company

LEBCONTROL

Tel.: 021 3503109

Set de diagnostic serologic al leucozei enzootice bovine
prin testul de imunodifuzie in gel de agar

FORMA DE PREZENTARE: Antigen LEB- liofilizat; Ser pozitiv LEB- liofilizat;
Diluant- lichid incolor.

DIMENSIUNEA AMBALAJULUI: 1 set x 300 doze. Sena..... Cod B- 3216

INDICATII: Este utilizat in laboratoarele de diagnostic pentru confirmarea sau
infirmarya leucozei enzootice bovine.

MOD DE UTILIZARE: Conform prospectului.

DATA EXPIRARI:.....

CONDITII SPECIALE DE DEPOZITARE SI TRANSPORT: Se depoziteaza la +2° I + 8°C,
protejat de lumina , inget si umiditate crescuta

PRECAUTII SPECIALE: Deseuri se vor depozita in locuri special amenajate.

A nu se lasa la indemana copiilor!

AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE:

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL ANTIGEN

Antigen pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 2,4 ml. Nr. de doze/set 300

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

LEBCONTROL SER POZITIV

Ser pozitiv pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine prin testul de imunodifuzie in gel de agar

Forma de prezentare - peleta liofilizata

Rehidratare 11,0 ml. Nr. de doze/set 300

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac
Company

Tel.: 021 3503109

DILUANT LEBCONTROL

Diluant pentru reconstituirea componentelor setului
pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine prin testul de
imunodifuzie in gel de agar


Forma de prezentare - lichid incolor

Cantitate: 14 ml. Nr. de doze/set 300

Mod de utilizare: Conform prospectului

Seria .. Data exp. Cod B-3216 Dep +2° I +8 °C


- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

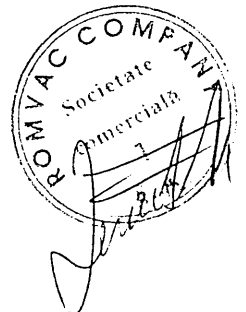

SERIA
VALABILITATE
Se depoziteaza la +2/+8°C DOZE

Romvac
TRADITIE SI INOVATIE IN SANATATEA ANIMALELOR


LEBCONTROL

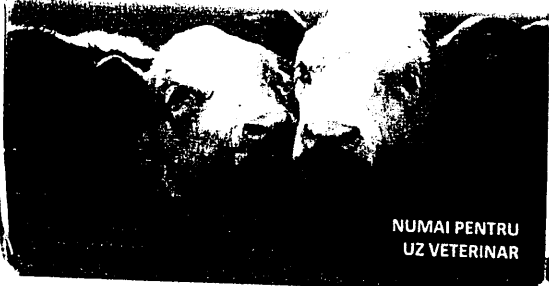

NUMAI PENTRU
UZ VETERINAR

Romvac
TRADITIE SI INOVATIE IN SANATATEA ANIMALELOR

LEBCONTROL

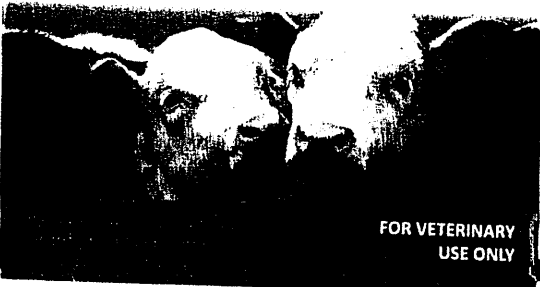

FOR VETERINARY
USE ONLY

Contine:
1 flacon cu antigen LEB
1 flacon cu ser pozitiv
1 flacon diluant
1 prospect

6 420213 032164

Romvac Company S.A.
Sos. Centurii nr. 7
IF - 077190, Voluntari
Tel. 021 350 31 06; 021 350 31 09
Fax: 021 350 31 10; 021 352 75 84
E-mail: romvac@romvac.ro
www.romvac.ro

Each kit contains:
Antigen LEB - 1 vial
Positive serum - 1 vial
Diluent - 1 vial
Leaflet

Romvac
Company S.A.
7, Soseaua Centurii
IF - 077190, Voluntari, Romania
Phone: + 40 21 350 31 06
+ 40 20 350 31 09
Fax: + 40 21 350 31 10
+ 40 21 352 75 84
E-mail: romvac@romvac.ro
www.romvac.ro

