



50 BANDELETTES DE CONTROLE CONTROL STRIPS

Pour/For DILUTION ANIOSEPT ACTIV

Mode d'emploi :

Après dissolution complète de la poudre dans l'eau, tremper la bandelette pendant 5 secondes. Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.

Lecture après 15 secondes :

Coloration vert clair :

Solution à 0.5%

Coloration vert foncé :

Solution à 1%

Coloration bleue :

Solution à 2%

Instructions for use:

After complete powder dissolving in water, totally soak the strip for 5 seconds. Remove the solution in excess by quick shaking of the strip.

Read after 15 seconds:

Light green-coloured :

0.5% diluted solution

Dark green-coloured :

1% diluted solution

Blue-coloured :

2% diluted solution



Ne jamais interpréter

le résultat obtenu pour une lecture réalisée plus de 20 secondes après trempage

Do never read

the result more than 20 seconds following the soaking strip

Refermer le tube après prélèvement d'une bandelette. Conserver dans un endroit frais, à une température inférieure à +30°C

**Close the flask after each strip collect
Keep in a dry place,
at a temperature under +30°C**



Laboratoires

ANIOS

Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France

Tel. +33 3 20 67 67 67

Fax. +33 3 20 67 67 68

www.anios.com

N°Lot/Batch

Use before



FG0100409B.JAS- 100820