
2.2 Încărcarea acumulatorilor

Pentru a încărca un acumulator cu litiu Hall, procedați după cum urmează:

1. Glisați acumulatorul cu litiu Hall pe una dintre stațiile de încărcare a bateriilor. În fiecare încărcător puteți introduceți până la patru acumulatori cu litiu Hall. Asigurați-vă că acumulatorul cu litiu Hall este amplasat corect în stație. Dacă acumulatorii cu litiu Hall sunt amplasați corect în stație, se afișează un simbol de încărcare. Consultați secțiunea „3.2 Depanarea” pentru informații suplimentare dacă nu se afișează niciun simbol de încărcare.



2. Încărcarea acumulatorului cu litiu Hall este inițiată automat. În timpul ciclului de încărcare, se afișează simbolul de încărcare. A se vedea tabelul de mai jos.
3. Când acumulatorul cu litiu Hall este încărcat, se afișează un simbol de încărcare completă. În mod normal, un ciclu complet durează aproximativ 30 de minute.
4. Pentru a scoate acumulatorul cu litiu Hall din încărcător, glisați-l pur și simplu în direcția opusă.
5. După încărcare, sterilizați acumulatorii. Consultați broșura cu informații furnizată împreună cu acumulatorul cu litiu Hall pentru instrucțiunile și parametrii de sterilizare.



2.3 Informații suplimentare referitoare la baterie în timpul încărcării

1. Apăsăți orice buton numeric de pe stație (1–4) pentru afișarea unor informații suplimentare atunci când bateria este instalată pe orice stație de încărcare.

