


E-Eye

Protocol

Стимуляция мейбомиевых желез

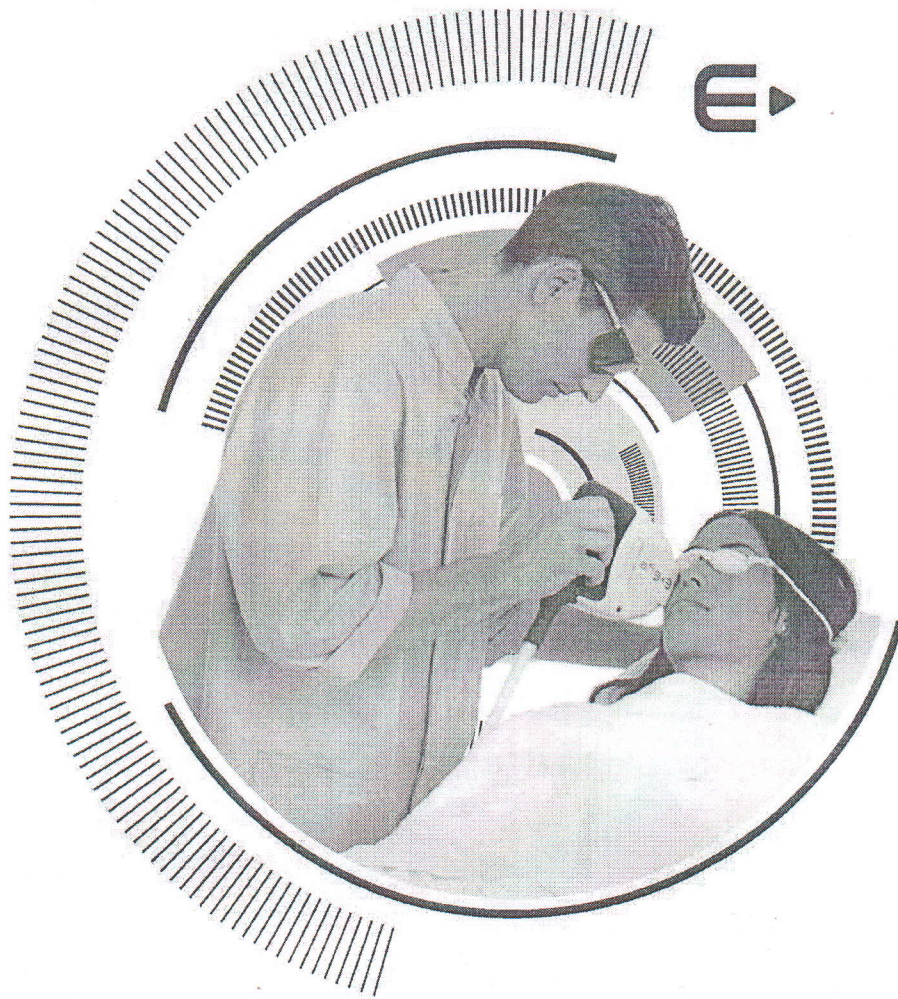

ESW
Vision

ПЕРВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕТА



СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА МЕЙБОМИЕВЫХ ЖЕЛЕЗ

ПЕРЕД СЕССИЕЙ:

- Объясните технологию и принцип стимуляции мейбомиевой железы пациенту.
- Выясните, нет ли противопоказаний к импульсному свету.
- Озвучьте плату за сеанс и другие фиксированные цены.
- Попросите пациента внимательно прочитать форму информированного согласия **1**.
- Попросите пациента заполнить и подписать форму информированного согласия **2**.
- Попросите пациента прийти на сеанс без косметических средств на коже.

ВО ВРЕМЯ СЕССИИ:

- Удостоверьтесь, что у пациента нет противопоказаний (в частности, не проходит ли он текущий курс лечения).
- Убедитесь, что на коже нет косметических изделий, и при необходимости удалите их с помощью мицеллярного лосьона без ароматизаторов **3**.
- Закройте все родинки, бородавки и прочие темные пятна на коже **патчами** (накладками или пластырями).
- Наложите на глаза пациента защитную **маску для глаз** и проверьте правильность их позиционирования **4**.
- Нанесите большое количество **геля** (минимум 1 см толщиной) на нижнее веко (кожную часть) и очень аккуратно удостоверьтесь, что гель не попал в/под **маску для глаз** **5**.
- Постепенно корректируйте мощность по мере прохождения сеанса в зависимости от ощущений пациента и полученных результатов **6**.
- Разблокируйте предохранительные устройства **7**.
- Наденьте **защитные очки** **8**.
- Нанесите 5 вспышек на левую сторону лица **9**, начиная с внутреннего кантуса глаза и заканчивая височной областью **10**.
- Повторите на правой стороне лица **11**.
- Выключите машину в конце сеанса.
- Удалите QQL и промойте кожу **12**.

ПОСЛЕ СЕССИИ:

- Предупредите пациента, что может появиться покраснение кожи.
- Скажите пациенту, чтобы он не проводил другие виды лечения частей кожи, находившихся под воздействием вспышек в течение всего цикла сеансов.
- Запланируйте второй сеанс через две недели (день 0 + 15), а затем остальные сеансы в ~~Дневной графике~~.
- Рекомендуйте пациенту использовать солнцезащитный крем на участках, находившихся под воздействием вспышек при воздействии УФ лучей.




УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ

Во всех случаях мощность вспышки должна быть максимальной.

За исключением следующих типов кожи:

Тип кожи 4 - уменьшаться от 1 значения

Тип кожи 5 - уменьшаться от 2 значений

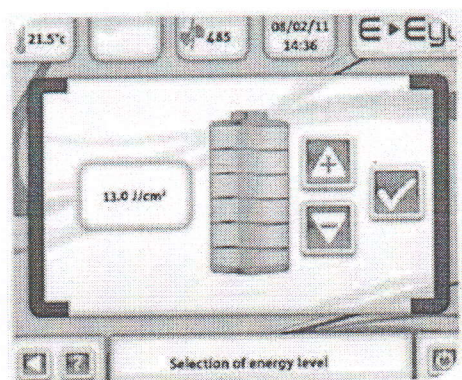

Тип кожи	1 Белый	2 Бежевый	3 Светло-коричневый	4 Коричневый	5 темно-коричневый	6 Чёрный
	Нет загара	Минимум загара	Средний загар	Сильный загар	Интенсивный загар	Очень тёмный загар
Уровень энергии						X

E-Eye

