

MASĂ MEDICALĂ PENTRU INSTRUMENTE- MPI-003

Masă mobilă destinată utilizării în sălile de intervenții chirurgicale din cadrul Blocului Operator. Construită din materiale de înaltă calitate, cu structură solidă din oțel inoxidabil, masa oferă rezistență ridicată la dezinfectanți chimici și permite igienizare rapidă. Reglajul pe înălțime și mobilitatea crescută facilitează adaptarea la nevoile intervențiilor chirurgicale. **Contraindicații:** niciuna, în condiții normale de utilizare conform instrucțiunilor.

Atenționare: Înainte de utilizare, activați frânele. Nu deplasați masa în timpul procedurilor chirurgicale.

Nu mișcați în timpul procedurilor, puneți frâne pe roți!

Specificație	
Înălțime reglabilă	reglabilă între 90–130 cm de fixare la fiecare 50mm
Sarcină admisă	Maxim 30 kg
Suprafață de lucru	Inox
Rotile pentru manevrare	4 roți din cauciuc, 2 cu frână, Ø minim 50 mm
Dimensiuni blat de lucru	700 x 500 ± 50 mm
Termen de garanție	4 ani (echivalent 48 luni)

Condiții de funcționare și depozitare:

- Utilizarea și depozitarea se fac în spații închise, uscate, cu temperaturi între +2°C și +40°C și umiditate relativă de 45–70%.
- Se recomandă păstrarea la o distanță de cel puțin 0,5 m față de sursele de căldură.
- Evitați expunerea la șocuri mecanice sau la substanțe chimice agresive.
- Curățați doar cu soluții pe bază de alcool și lavete moi sau perii fine, fără agenți abrazivi.

Condiții de menținere a garanției:

- Garanția este valabilă timp de 48 de luni de la data achiziției, cu respectarea instrucțiunilor de utilizare, manipulare și întreținere.
- Garanția se pierde în caz de:
 - utilizare în afara destinației prevăzute;
 - modificări sau reparații neautorizate;
 - deteriorări mecanice cauzate de utilizator;
 - curățare cu substanțe necorespunzătoare sau instrumente abrazive.
- Este necesară păstrarea dovezii de achiziție și a documentației tehnice pentru reparații în perioada de garanție.



Înregistrarea AMDM: DM000620026

Producător: Caravan Express SRL
Republica Moldova
or. Cimișlia, MD-4101

