

Importator în REPUBLICA MOLDOVA:

S.A. "M-INTER-FARMA", Mun. Chișinău, str. Grenoble 23,21

Tel. (022) 904-006, 904-005, Fax: (022) 904-007. www.minterfarma.md

Număr de înregistrare de stat a dispozitivelor medicale Nr. DM000145052

Quatrosdes® Forte

Produs concentrat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor echipamentului medical

- **Spectru larg microbiod de la 0,5%**
- **Spectru larg microbiod de la 0,5%**
- **Proprietăți excelente de curățare**
- **Delicat, parfum de propețime**
- **Concentrație economă%**

Concentrat cu eficiență mare pentru curățarea și dezinfectarea simultană a echipamentului medical și suprafețe lavabile mari, cum ar fi secțiile medicale, paturile de spital, podele, suprafețele meselor și a pereților. Deasemenea potrivit pentru curățarea și dezinfectarea dispozitivelor medicale prin metoda imersiei, dezinfectarea suprafețelor în grădinițe, școli, sanatorii, saloane de frumusețe și tatuaj, săli de forță și fitness, frizerii, cabinete de masaj și solariu.



Caracteristicile produsului:

- Testat în conformitate cu standardele noi pentru produsele dezinfectante (EN 14885)
- Spectru larg de acțiune antimicrobiană incl. bacterii, mycobacterii, fungi, virusuri.
- Proprietăți excepționale de curățare
- Toleranță înaltă față de materiale (fără aldehide și fenoli).
- Delicat, miros proaspăt.

Beneficii:

- Eficiență garantată și siguranță în utilizare.
- Reducerea înaltă a riscului de infectare.
- Efect rapid pe suprafețele supuse dezinfectării.
- Abilitatea de a fi aplicat pe un numeros tip de materiale sensibile.
- Efect de împrăspătare.
- Econom.

Aplicarea:

Quatrodos Forte este un produs de eficiență înaltă pentru curățarea și dezinfectarea echipamentului medical și a suprafețelor lavabile mari cum ar fi uniturile, paturile medicale, podele și pereți. Este deasemeni indicat pentru dezinfectarea materialelor tapițate și a bunurilor fabricate din termoplastice (ABS), sticlă, porțelan, cauciuc, oțel inoxidabil, aluminiu, nichel sau crom. Este recomandat pentru dezinfectarea prin imersie și pentru produsele fabricate din sticlă acrilică. Poate fi aplicat pe suprafețele care vin în contact cu produsele alimentare. Nu conține alchizi sau fenoli, prin urmare nu cauzează reacții alergice și nu decolorează suprafețele. Nu necesită clătire cu apă și posedă aromă plăcută de flori. Testat, aprobat și recomandat de Famed – producător lider European de echipament de calitate de top pentru spitale. Quatrodos® Forte are un spectru letal larg și proprietăți excepționale de curățare datorită formulei inovative bazată pe sinergia surfactanților și tehnologiei nano-micelle.

Eficacitatea:	EN 14885	15 min.	30 min.
Bacteria (including MRSA)	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Fungi (C.albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Mycobacteria (M. terrae, M. avium)	EN 14348	4%	1%
	EN 14563	4%	1%
Enveloped viruses (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Adeno virus	EN 14476	1%	
Polio virus	EN 14476	4%	

* Condiții de curățenie Evidența documentară a eficacității biocide a produsului este disponibilă la producător

Instrucțiuni de utilizare: Se prepară soluția prin dizolvarea produsului în apă. Nivelul concentrației depinde de spectrul și timpul de acțiune. Pentru a obține o concentrație de 1% se diluează 10 ml de concentrat în 990 ml apă. Suprafețele dezinfectate nu necesită clătire cu apă. Nu se combină cu alte produse dezinfectante sau detergenți. Produsul este destinat pentru uz profesional.

Compoziție: 100 gr. conțin:

3,76 gr – N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamină (CAS: 2372-82-9),

3,39 gr – Poly(oxy-1,2-ethanodilo),.alfa.-[2-(didecylmethyloamino)ethyl]-.omega.-hydroxy-.propanoate (sare) (CAS:94667-33-1)

0,75 gr –2-aminoetanol (CAS: 141-43-5)

Ambalaj: Flacon 1 L cu dozator, canistră 5 L.

Precauții:



Pericol

Fraze de pericol:

H314 – cauzează arsuri severe pielii și dăunează ochilor

Fraze pentru condiții de utilizare sigură:

P260 – nu inhalați praf/fum/gaz/aerosol/vapori/spray

P280 – purtați mănuși/haine de protecție/protecția ochilor și feței

P301+P330+P331 – LA ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU SE Induce voma

P302+P352 – PE PIELE: spălați cu jet de apă cu săpun

P305+P351+P338 – ÎN OCHI: clătiți atent cu apă timp de câteva minute.

Îndepărtați lentilele de contact dacă sunt și este posibil. Continuați clătirea

P310 – Sunați imediat un CENTRU de INTOXICARE/medic

P405 – păstrați închis P501 – conținutul/ambalajul se elimină în

conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale

Revăzut: 02.2017

Informație despre proprietățile fizice și chimice de bază

Forma fizică	Lichid
Culoarea	Conform specificației
Miros	Foarte caracteristic
Valoarea limitei de miros	Nu se specifică
pH	10,8-11,2
Punct/interval de fierbere	100°C
Punct de aprindere	>100°C
Presiunea vaporilor la 20°C	23hPa
Densitatea la 20°C	0,99-1,01 g/cm ³
Solubilitatea în solvenți	Complet solubil în apă
Temperatura de autoaprindere	Nu este autoinflamabil
Limitele de explozie	Produsul nu este exploziv

Producător:

Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska, tel.: +48 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl, www.medisept.pl



Profesionalne systemy
utrzymania higieny