

VIZIERĂ DE PROTECȚIE

Instrucție de utilizare:

- 1 Dezinfecțați minuțios ecranul vizierii cu soluție pe bază de alcool.**
- 2 Procedați la fel și cu suportul pentru fixare.**
- 3 Fixați ecranul la cele două elemente de asamblare frontale ale suportului.**
- 4 Apoi fixați-l și la elementele laterale.**
- 5 Atașați elasticul pe fixatoarele prevăzute lateral.**
- 6 Viziera de protecție este gata pentru exploatare.**