





НАКОНЕЧНИК КРУЖКИ ЭСМАРХА

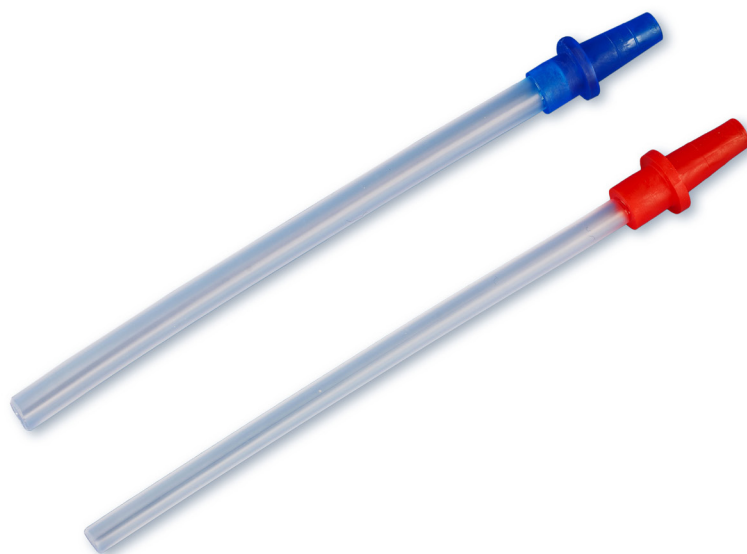

Орошение и промывание кишечника с помощью наконечника, присоединенного к кружке Эсмарха часто используется не только в медицинских учреждениях, но и в домашних условиях. Материал и конструкция наконечника облегчают процесс его введения и уменьшают дискомфорт пациента.

НАДЕЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КРУЖКЕ ЭСМАРХА

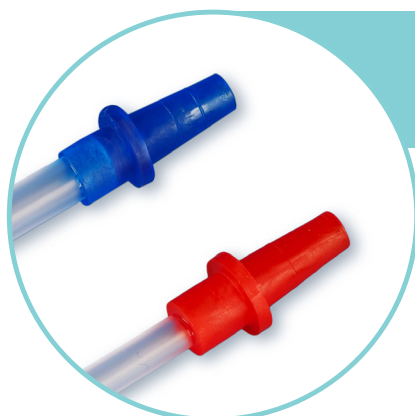

- Прозрачная термопластическая трубка
- Длина наконечника 170 мм
- Тщательно обработанный рабочий конец
- Штуцер типа «елочка» на проксимальном конце



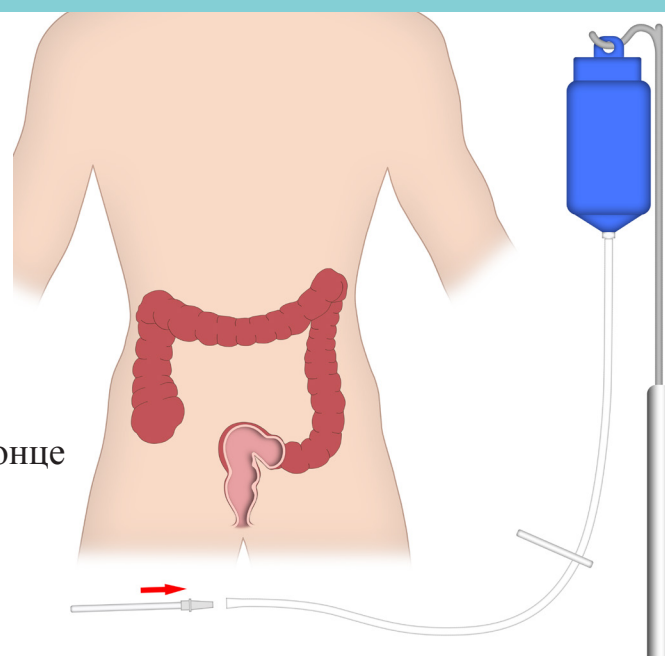


Рис. 1. Подключение наконечника к кружке Эсмарха


УДОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

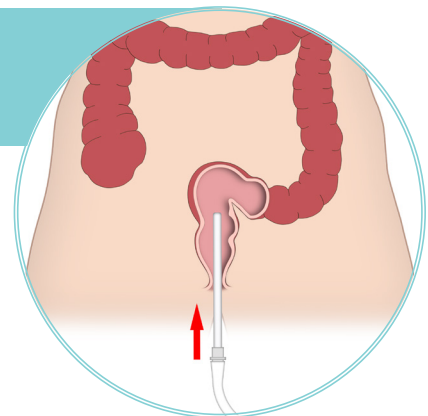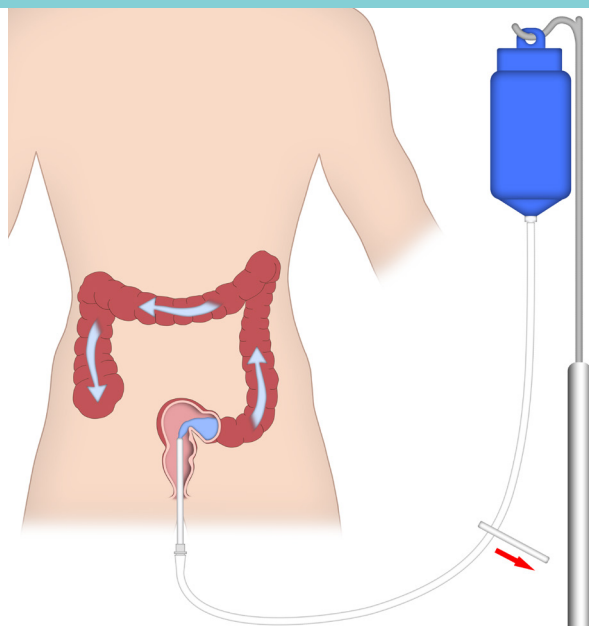

С помощью штуцера типа «елочка» наконечник надежно подсоединяется к трубке-удлинителю кружки Эсмарха.

Обработанный вазелиновым маслом наконечник вводят в анальное отверстие пациента.

Рис. 2. Промывание кишечника

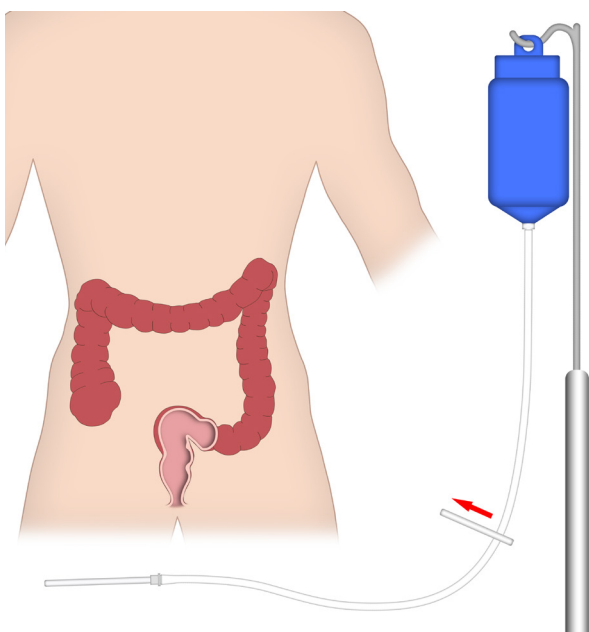

Фаска на рабочем конце наконечника предотвращает травмирование прямой кишки.

Кружку Эсмарха подвешивают на штативе, снимают зажим с трубки удлинителя и осуществляют промывание кишечника.

После завершения промывания трубку-удлинитель кружки Эсмарха пережимают и извлекают наконечник.

Рис. 3. Извлечение наконечника

Код товара	Диаметр, мм	Fr	Длина, мм	Цветовой код
0621.01011618	6.0	18	170	
0621.01011624	8.0	24	170	