

Buton indicator	Simbol	Culori	Explicație
Indicator Reagents			Starea reactivului ISE.
			Starea reactivului c 503 include: Reactiv de test, diluant, soluție de spălare, spălare specială, reactiv de sistem.
			Starea reactivului e 801 include: Reactiv de test, diluant, pretratare, celulă blank, reactiv sistem.
			Reactivul este epuizat.
			Reactiv sub nivelul galben de avertizare pentru reactiv.
			Reactiv sub nivelul violet de avertizare pentru reactiv.
			Reactivul este suficient.
			Nu există reactivi la bord sau: Electrozi ISE sunt mascați. Efectuați mentenanța necesară a rackului de spălare.
Indicator Calibration	Changeover		Schimbarea pachetului de reactiv fără calibrare validă.
	Failed		Calibrarea nu a reușit.
	Timeout		Intervalul de calibrare s-a scurs.
	QC Violation		Rezultatele QC nu se încadrează în limite.
	Calib.Now		Timpul rămas din timpul de expirare a calibrării s-a scurs.
	Update		Aplicația sau calibratorul au fost actualizate.
			Se recomandă calibrarea.
Indicator QC	Failed		QC nu a reușit (de ex. alarmă de date). Mascarea unui reactiv epuizat a împiedicat o măsurare QC.
	Changeover		Schimbarea pachetului de reactiv. Material QC cu un nou ID de lot. ISE: Schimbarea flaconului de reactiv sau a electrodului
	Timeout		Intervalul QC s-a scurs.
	Update		O nouă măsurare QC necesară după calibrare.
	QC Now		Timpul rămas din timpul de expirare QC s-a scurs.
			Se recomandă măsurarea QC.
Indicator Data Monitor	Stat		Previzualizare raport rezultate STAT.
	Calibration		Previzualizare raport rezultate calibrare.
	Control		Previzualizare raport rezultate control.
	Routine		Previzualizare raport rezultate rutină.
			Un nou raport este gata pentru vizualizare.

Explicația butoanelor indicatoare

Despre zona Diverse

Zona Diverse oferă acces la funcția de ejectare a mediilor USB.