


LaparoVue® Sistem de vizibilitate


Soluții Laparoscopice

Indicații de utilizare: LaparoVue este un dispozitiv steril de unică folosință care trebuie utilizat înainte și în timpul procedurilor endoscopice și laparoscopice pentru a preveni aburirea lentilei. Acest document este conceput pentru a ajuta la utilizarea acestui produs. Nu este o referire la tehnica chirurgicală.

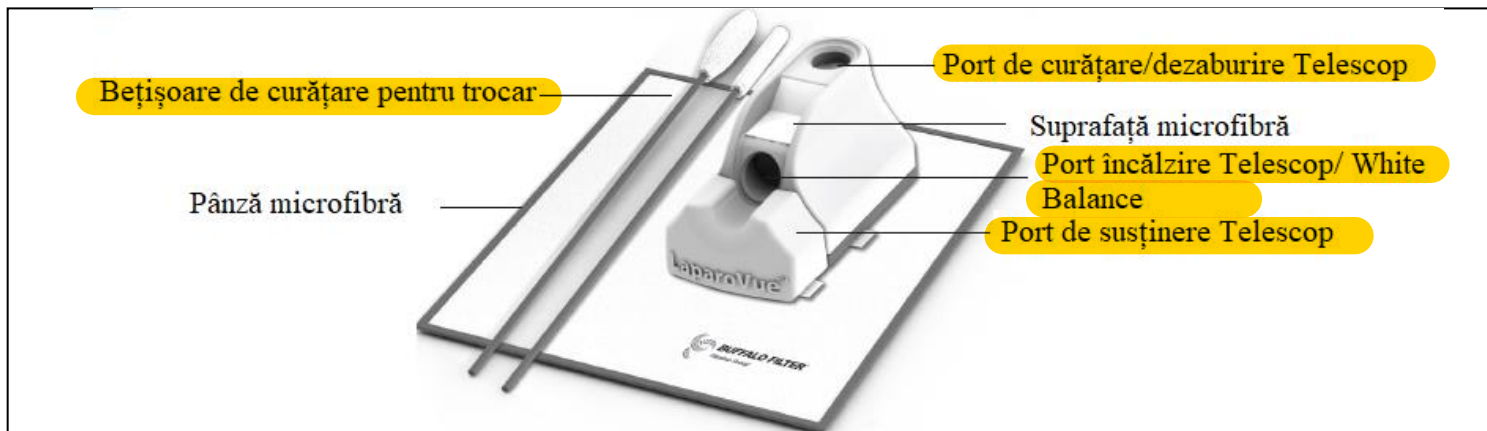

LaparoVue® Setări

1. Detașați suportul telescop de unitatea principală

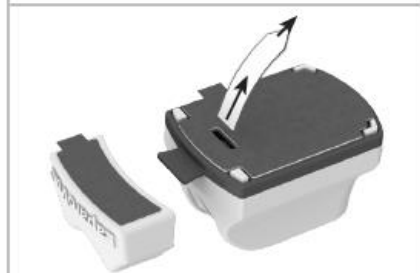

Activarea Unității LaparoVue®

2. Trageți foaia de alunecare pentru a activa. LED-urile din interiorul porturilor se vor aprinde, indicând că unitatea a fost activată și încălzirea soluției de curățare/dezaburire a început.



Port de curățare/dezaburire

3. Înainte de începerea intervenției chirurgicale, portul de curățare/dezaburire a puncției de deasupra unității cu mânerul VueTip® Trocar Swab. ATENȚIE: Nu utilizați lunetă pentru a perfora portul.



Insertie telescop

4. Odată activat,telescopul poate fi introdus imediat pentru a începe încălzirea.
5. Împingeți ferm telescopul în portul de încălzire/balans alb situat în partea din față a unității.

Încălzirea

6. Încalzire initiala. Dacă telescopul este lăsat în portul de încălzire pentru o perioadă lungă de timp. vă rugăm să reduceți intensitatea luminii pentru a reduce căldura. Pentru telescoape cu cerințe limitate de încălzire, reduceți timpul de încălzire corespunzător.
7. Pentru o protecție suplimentară a telescopului, așezați telescopul pe suportul de telescop. Notă: Asigurați-vă că aranjați suportul astfel încât telescopul să fie amplasat pe o suprafață stabilă dacă este lăsată nesupravegheat.

Balans Alb

8. Balansul de alb al telescopului se poate face în timp ce se încălzește. Procedura de balans de alb depinde de tipul de sistem de cameră utilizat. Dacă intensitatea luminii camerei este prea mare, balansul de alb poate eșua. Trageți ușor telescopul sau reduceți intensitatea luminii camerei. Dacă este necesar, faceti balansul de alb cu o cârpă din microfibră. Vă recomandăm să NU folosiți tifon.