

Durata estimată	Materiale necesare	Statusul modului solicitat
1 minut	Niciunul	Stopped (Oprit), Warming (Încălzire) sau Ready (Pregătit)

5400 Test **senzor de avarie**



ATENȚIE: RISC biologic. Aceasta este o activitate sau o zonă în care ați putea fi expus la materiale potențial infecțioase. Consultați *Pericole biologice*, pagina 8-5.



ATENȚIE: Pericol rănire cu pipetorul instrumentului. Pericol legat de componentele ascuțite ale acului pipetor. Aceasta este o activitate sau o zonă în care ați putea fi expus la sonde. Consultați *Acele pipetoare și alte elemente ascuțite*, pagina 8-19.

Efectuați această procedură de diagnosticare a **pipetoarelor** pentru a testa **senzorul de avarie al acului pipetor** pipetorului pentru pipetoarele de probă, R1, R2 sau STAT (**c4000**).

Durata estimată	Materiale necesare	Statusul modului solicitat
2 de minute	Niciunul	Stopped (Oprit), Warming (Încălzire) sau Ready (Pregătit)

Descrierea diagnosticelor sistemului de spălare/de fluide (module de procesare *i2000/i2000sR*)

Poate fi necesar să efectuați următoarele proceduri de diagnosticare atunci când înlocuiți componentele de detectare a nivelului de lichid sau componentele zonei de spălare sau de a diagnostica mesaje de eroare sau problemele observate asociate cu detectarea nivelului de lichid sau zonele de spălare:

- *1170 Testul stației de spălare*, pagina 10-667
- *2050 Test de aspirare WZ*, pagina 10-667
- *3600 Test LLS*, pagina 10-668
- *3610 Test robot de manipulare a probei LLS*, pagina 10-668
- *3800 Test de monitorizare a presiunii*, pagina 10-668
- *6037 Rectitudinea acului pipetor WZ*, pagina 10-669

Pentru a efectua o procedură, consultați *Efectuarea procedurii de diagnostic*, pagina 10-651.

1170 Testul stației de spălare

Efectuați această procedură de diagnosticare a **sistemelor de spălare/de fluide** pentru a testa funcția stației de spălare R1 și R2.

Durata estimată	Materiale necesare	Statusul modului solicitat
1 minut	Niciunul	Stopped (Oprit), Warming (Încălzire) sau Ready (Pregătit)

2050 Test de aspirare WZ



ATENȚIE: RISC biologic. Aceasta este o activitate sau o zonă în care ați putea fi expus la materiale potențial infecțioase. Consultați *Pericole biologice*, pagina 8-5.