

Instrucțiune de utilizare

Rolele SURGIPACK și pungile sunt proiectate pentru sterilizarea dispozitivelor medicale, recomandat de a fi sterilizate cu abur sau oxid de etilenă înainte de utilizare.

Măsuri de precauție recomandate:

Păstrați într-un loc răcoros și uscat

Nu se utilizează în cazul în care bobina sau punga este deteriorată

Rola (60g /m² hârtie / grosime 52um)

1. Tăiați lungimea corespunzătoare din rolă, menționăm că mărimea dispozitivului împachetat ar trebui să fie mai mică de $\frac{3}{4}$ din lungimea pungi.
2. Dispozitivul trebuie să fie curat și uscat înainte de a fi împachetat.
3. Trebuie să obțineți o parte fierbinte din secțiunea hirtiei.
4. Așezați dispozitivul medical în hirtie.
5. Instrumentul Șarpe trebuie pus pe partea opusă deschisă, astfel încât să asigure siguranța la deschiderea pungilor
6. Astfel devine fierbinte cealaltă parte a rolei.
7. Puneți plicurile sigilate cu direcția de la hârtie la hârtie. Apoi, puneți-le în sterilizator
8. Aplicați agentul de sterilizare: STEAM (aburi) sau EO (oxid de etilenă)
9. Temperatura de sigilare recomandată: 180 °C -190 °C
10. Verificați schimbarea culorii de cerneală a indicatorului:

STEAM albastru - verzuie negru

EO roz – galben

11. Păstrați pungile sterilizate în locuri uscate, curate, și să atrageți atenție la lumina directă.

12. Verificați pungile înainte de utilizare, în cazul în care este deteriorată, vă rugăm să nu utilizați

Tipul ambalajului	Durata de pastrare de tip deschis	Durata de pastrare de tip inchis
Ambalaj steril	24 ore	6 saptamini
Ambalaj steril dublu	6 saptamini	6 luni