

Informații similare...

- [SSH - robot de manipulare a probei standard \(i2000\)](#), pagina 1-160
- [Transportoare probă](#), pagina 1-185
- [Analizarea probelor SSH \(i2000\)](#), pagina 5-267

Setări implicite la încărcarea în șir pe culoar dublu (i2000)

Pentru multi-modulul i Systems, culoarul din interior este culoarul activ implicit. Unele evenimente pot face ca culoarul exterior să devină culoarul activ. Tabelul de mai jos arată culoarele active implicite pentru șirurile cu încărcare dublă.

Tabel 5.12: Setări implicite la încărcarea în șir pe culoar dublu

Event Log (Jurnal operațiuni)	Culoar activ
Tasta de funcționare este selectată, iar statusul este Ready (Pregătit).	Interior
Culoarul interior este gol.	Exterior
Douăzeci și cinci de transportoare au fost transferate de pe culoarul interior pe șirul de procesare.	Exterior
Douăzeci și cinci de transportoare au fost transferate de pe culoarul exterior pe șirul de procesare.	Interior
Ușa de acces la șirul de procesare este deschisă în timpul funcționării robotului de manevrare a probelor. Statusul robotului de manipulare a probelor a fost modificat la Stopped (Oprit). NOTĂ: Identificarea probei pozitive nu poate fi garantată atunci când ușa de acces la șirul de procesare este deschisă. Toate rezultatele aferente probelor din șirul de procesare devin excepții.	Interior
Este apăsată tasta de oprire de pe tastatura robotului de manipulare, iar apoi sunt apăstate tastele de pornire și funcționare.	Interior
Este selectată tasta de funcționare atunci când statusul modulului este Load queue paused (Șirul de încărcare pe pauză) (operațiune nesolicitată de către operator).	Interior
Este selectată tasta de funcționare atunci când statusul modulului este Load queue paused (Șirul de încărcare pe pauză) (operațiune solicitată de către operator).	Culoarul care era activ atunci când a fost pus pe pauză robotul de manipulare a probelor.

Încărcați probele pentru procesarea prioritară (SSH)

Efectuați această procedură pentru a încărca cu prioritate transportoare de probe în șir de încărcare SSH (braț standard de manipulare a probelor) fie cu un singur culoar, fie cu două culoare. Probele care sunt încărcate cu prioritate sunt picurate cu pipeta mai întâi.

Pentru a încărca transportoarele de probe care nu impun încărcarea cu prioritate, consultați [Încărcați probele pentru procesarea de rutină](#), pagina 5-251.