

2. Dacă sunt afișate erori sau probleme, consultați secțiunea „3.3 Depanarea” pentru mai multe informații.
3. Există două moduri de operare pentru acest generator: bipolar și monopolar. Generatorul va detecta automat tipul sondei și va selecta modul corect atunci când este conectată o sondă.
4. Pentru a finaliza funcționarea, apăsați pe butonul de alimentare de pe partea frontală a generatorului sau deconectați cablul de alimentare.

NOTĂ: AES-1 este echipat cu o caracteristică de protecție pentru endoscop. Generatorul va întârzia sau va elimina automat energia RF la vârful distal la contact sau la apropierea de obiecte metalice din spațiul articular. NU atingeți niciodată un dispozitiv RF activ de un obiect metalic. Abțineți-vă de la testarea caracteristicii de protecție pentru endoscop, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea sondei, a generatorului sau a obiectului metalic în apropierea căruia se află dispozitivul.

2.3.2 OPERAREA AES-1 ÎN MODUL BIPOLAR

1. Banner (Banner) – Afișează sonda bipolară conectată la generator
2. ABLATE Setpoint [Valoare de referință pentru ABLATE (Ablație)] – Valoarea de referință actuală pentru ABLATE (Ablație)
3. ABLATE Setpoint Adjustment [Ajustare valoare de referință pentru ABLATE (Ablație)] – Ajustare a valorii de referință ABLATE (Ablație)
4. ABLATE Power Setting [Setare de putere pentru ABLATE (Ablație)] – Setarea putere pentru sondă: High (Înaltă), Med (Medie) sau Low (Scăzută)
5. COAG Setpoint [Valoare de referință pentru COAG (Coagulare)] – Valoarea de referință actuală pentru COAG (Coagulare)
6. COAG Setpoint Adjustment [Ajustare valoare de referință pentru COAG (Coagulare)] – Ajustare a valorii de referință COAG (Coagulare)
7. Setarea de putere pentru COAG (Coagulare) – Setarea putere pentru sondă: High (Înaltă) sau Low (Scăzută)
8. Volume Control (Control pentru volum) – Pictograme de ajustare a controlului pentru volumul tonului alertei
9. Foot Control (Pedală de picior) – Se afișează atunci când pedala de control este conectată la generator
10. Temperature (Temperatură) – Temperatura măsurată pentru vârful distal al sondei bipolare, atunci când este activată
11. Settings (Setări) – Meniu pentru selectarea limbii, controlul temperaturii și informații despre reviziile software



2.3.3 CONFIGURARE ȘI UTILIZARE

1. Selectați sonda bipolară AES dorită.
2. Conectați conectorul sondei la priza de pe panoul frontal al generatorului. Săgeata conectorului sondei trebuie să se alinieze cu săgeata din partea din față a generatorului.
3. La conectarea sondei, afișajul va indica o conexiune reușită afișând ecranul principal de rulare cu descrierea probei în banner.