

### **Buton roșu de urgență:**

Butonul roșu de urgență este prevăzut pentru urgențe sau pentru atunci când operatorul trebuie să oprească imediat dispozitivul. Pentru a opri imediat dispozitivul, apăsați butonul. Pentru a reseta butonul roșu de urgență, rotiți butonul în sens orar.

## **3.3 Accesorii**

Diferite accesorii opționale, cum ar fi fibra optică, sunt asociate cu dispozitivul (pentru o listă de accesorii opționale furnizate împreună cu dispozitivul, consultați Capitolul 11, „Accesorii”).

### **3.3.1 Fibra optică**

Fibra optică este folosită pentru utilizarea radiațiilor laser pe pacient. Este conectată la dispozitiv printr-un conector special de pe mecanismul optic accesibil de la panoul frontal. Conectorul are un micro-întrerupător care oprește laserul dacă fibra optică lipsește sau nu este instalată corespunzător. În funcție de utilizările chirurgicale, fibra optică utilizată poate fi sterilă și de unică folosință sau sterilizabilă. Pentru mai multe informații despre curățarea și sterilizarea fibrelor, consultați capitolul 7, „Întreținerea, curățarea și sterilizarea”.



#### **PERICOL**

Orice încercare de modificare între contactul fibrei optice și dispozitiv poate genera emisii nedorite de radiații laser. Pericol potențial în caz de introducere, îndoire puternică sau fixare necorespunzătoare a fibrelor optice; nerespectarea recomandărilor producătorului poate cauza deteriorarea fibrelor sau a sistemului de transmitere fasciculului optic și/sau determina vătămarea pacientului sau a utilizatorului.



#### **PERICOL**

Fibra optică este compusă dintr-un tub din cuarț care permite transmiterea radiațiilor laser de la sursa laser la pacient.



#### **PERICOL**

Orice încercare de modificare a protecției fibrei optice poate genera emisii nedorite de radiații laser.

Fibrele sunt întărite extern în apropierea conectorului SMA. Răsucirea, întinderea, sau îndoirea exagerată pot deteriora și/sau rupe fibra optică și pot duce la iradierea internă a învelișului metalic.



#### **PERICOL**

Acest înveliș protejează utilizatorul și pacientul de pericolul potențial de iradiere în urma ruperii fibrei.



#### **AVERTISMENT**

Înainte de pornirea oricărei emisii laser, asigurați-vă că sonda este introdusă, respectați direcția de orientare.

Utilizarea unor fibre sau conexiuni care nu au fost furnizate de producător, nefiind originale, nu garantează satisfacerea cerințelor de siguranță.