



Федеральное государственное унитарное предприятие

«МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД»

Новохохловская ул., д. 25, Москва, 109052, тел.: +7 (495) 234-6192, +7 (495) 678-0050, факс: +7 (495) 911-4210,
e-mail: mez@endopharm.ru, <http://www.endopharm.ru>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Маска медицинская лицевая

для защиты дыхательных путей одноразового использования

РУ № РЗН 2020/10280 от 08.05.2020 г.

Назначение:

Создание фильтрующего барьера для предотвращения попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Могут быть использованы медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, а также лицами, по роду деятельности имеющими высокий риск заболевания в эпидемический период или заражения им других лиц, в общественных и торговых организациях, в транспорте, во время эпидемий, при чрезвычайных ситуациях, в быту.

Основные технические характеристики:

Маска медицинская является нестерильным одноразовым медицинским изделием, произведена в соответствии с ТУ 32.50.50-001-40393587-2020 и представляет собой прямоугольную салфетку, изготовленную из нетканых материалов, с вшитым носовым фиксатором, снабженную ушными петлями. Маска медицинская состоит из 3 слоев: 1-й слой (к лицу, неокрашенный) – спанбонд (гидрофобный); 2-й слой – фильтрующий (СМС, СММС, мультблаун) - антибактериальный фильтр; 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд (гидрофильный).

Маска медицинская имеет три складки, глубиной от 1 до 1,2 см. В верхней части маски располагается вшитый носовой зажим (фиксатор) длиной 90 - 110 мм из пластиковой, металлопластиковой или металло-бумажной ленты для улучшения прилегания маски в области переносицы за счет повторения формы носа. Маска имеет средства фиксации – эластичные ушные петли, которые обеспечивают плотное прилегание маски к лицу по бокам, облекая нос, рот и подбородок пользователя. Элементы маски скреплены машинным соединением посредством ультразвуковой сварки. Эффективность бактериальной фильтрации не менее 98 %. Воздухопроницаемость не более 29,4 Па/см².

Комплект поставки и упаковка:

Маски одного размера в полимерной упаковке по 5 или 10 шт. или в коробке из картона по 50 шт. Инструкция по применению (вкладыш). Маски упакованы по 5 или 10 штук в полимерных пакетах одинакового размера с нанесенной маркировкой или 50 штук в коробки из картона. Пакеты или коробки из картона укладываются в групповую упаковку - ящик из гофрированного картона. Количество масок в групповой упаковке – 1000 или 2000 штук масок.

Гарантии производителя и условия хранения: Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок годности 4 года с даты изготовления.