

ДИПЛОМАТ ДЕНТАЛ с.р.о.
Врбовска Цеста 17
921 01 Пиештяны
СЛОВАКИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Стоматологический Стул D10L



Содержание

1. Назначение и использование	2
2. Технические параметры	2
3. Описание изделия и коды заказа	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Упаковка изделия	4
6. Требования к подготовительной установке	5
7. Очистка и дезинфицирование	5
8. Гарантия	5
9. Утилизация изделия	5

1. Назначение и использование

Стул для зубного врача можно использовать самостоятельно или вместе со стоматологической установкой серии DIPLOMAT. Он предназначен для оснащения стоматологических кабинетов и специализированных рабочих мест в рамках различных отраслей в стоматологии. Стул позволяет зубному врачу и его ассистентке работать в позиции сидя и он удовлетворяет все требования к эргономической работе

Стул для зубного врача тип D10L изготавливается во двух вариантах:

- для зубного врача и
- для ассистента

Оба варианта оснащены жёстким трегером опоры спины с выдвижной опорой спины.


К обоим вариантам можно поставить круглую опору для ног.

2. Технические параметры


Минимальная высота сидения	500 ± 20 мм
Максимальная высота сиденья	690 ± 20 мм
Диапазон настройки высоты сиденья	500 - 690 мм
Глубина сиденья	420 мм
Широта сиденья	420 мм

Диапазон настройки опоры спины:

Вариант для зубного врача	$70 \pm 20 \div 340 \pm 20$ мм
Вариант для ассистента	$130 \pm 20 \div 380 \pm 20$ мм

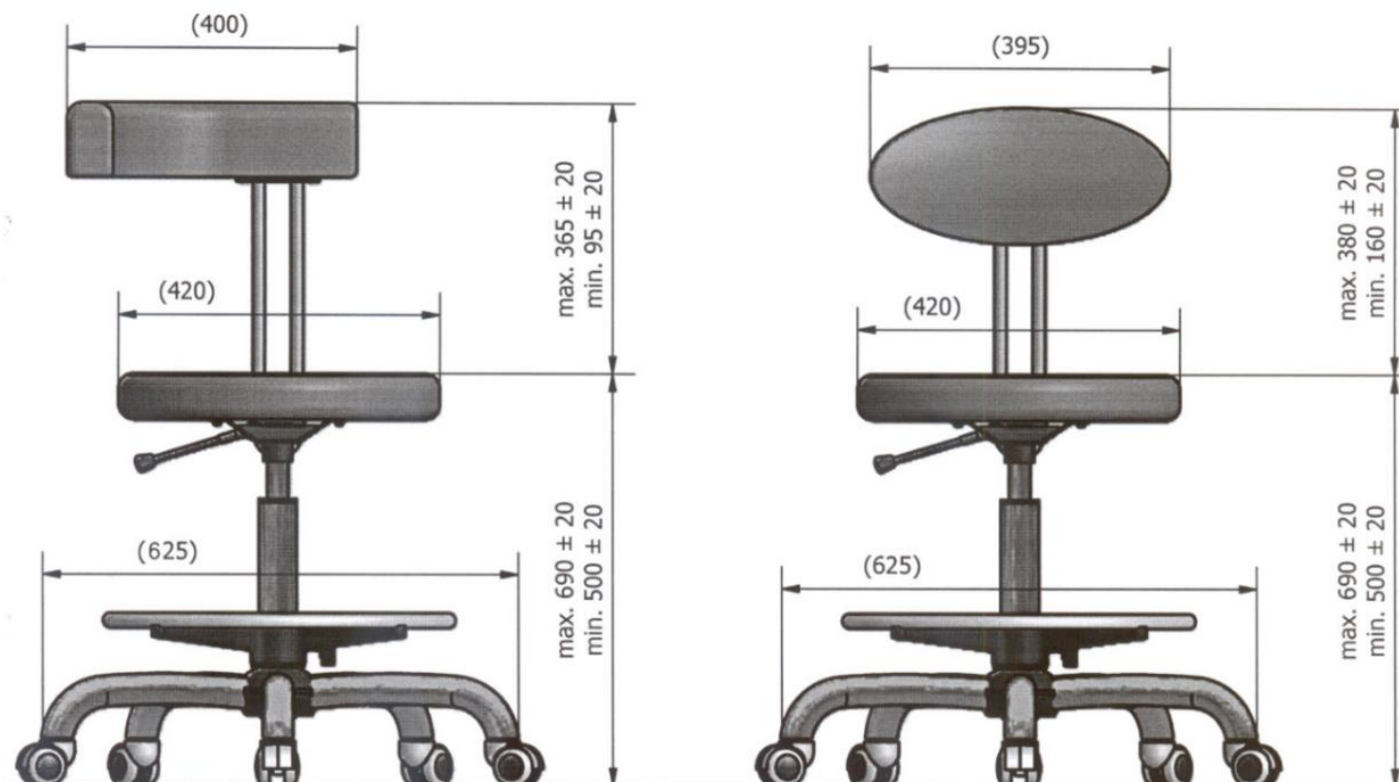


3. Описание изделия и коды заказа

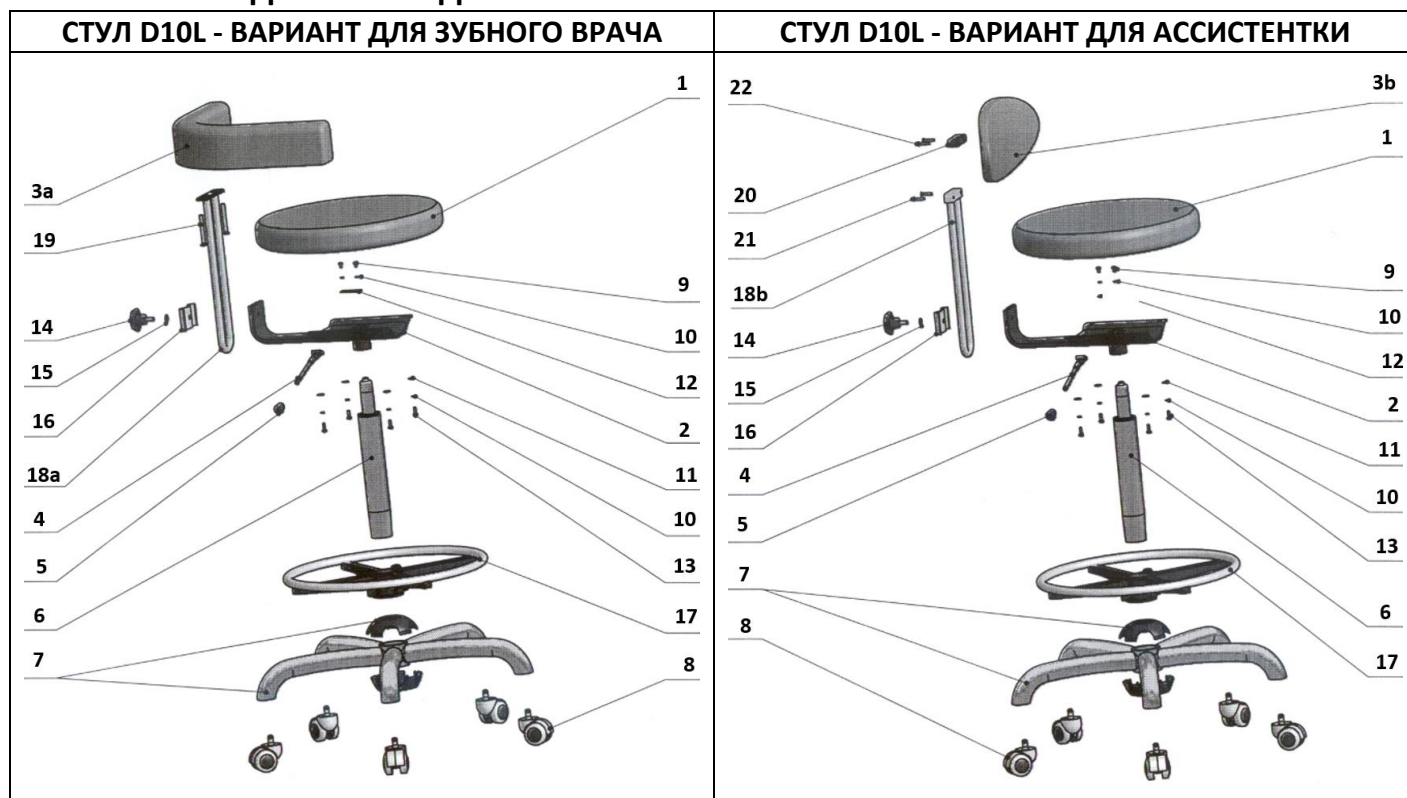

№	КОД ЗАКАЗА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ.
001	ME285300.003	СИДЕНЬЕ (СООТВЕТСТВЕННО ЦВЕТНОМУ ВАРИАНТУ)	шт	1
002	V513.01-00-00	ТРЕГЕР	шт	1
003a	ME285300.130	ОПОРА СПИНЫ ВРАЧА	шт	1
003b	ME285300.002	ОПОРА СПИНЫ АССИСТЕНТКИ	шт	1
004	V512.02-00-00	УПРАВЛЯЮЩИЙ РЫЧАГ - комплект	шт	1
005	ME321861.006	РУКОЯТКА УПРАВЛЯЮЩЕГО РЫЧАГА	шт	1
006	ME337500.015	ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА СТАНДАРТ (565 mm)	шт	ОПЦИЯ
006	ME337500.017	ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА КОРОТКАЯ (418 mm)	шт	ОПЦИЯ
006	ME337500.016	ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА УДЛИНЕННАЯ (693 mm)	шт	ОПЦИЯ
007	ME469000.004	КРЕСТ С КРЫШКОЙ	шт	1
008	ME549428.013	КОЛЕСИК	шт	5
009	ME309543.069	ВИНТ М 5x8	шт	2
010	ME311214.031	ПРОКЛАДКА П 5,1	шт	6
011	ME311212.018	ПРОКЛАДКА П 5,3	шт	4
012	V512.00-00-05	ПРИЖИМ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ	шт	1
013	ME309543.089	ВИНТ М 5x16	шт	4
014	ME321861.010	ВИНТ ДЕРЖАТЕЛЯ	шт	1
015	ME311210.018	ПРОКЛАДКА П 8,4	шт	1
016	V512.04-00-02.1	ПРИЖИМ ДЕРЖАТЕЛЯ	шт	1
017	ME469000.003	ОПОРА НОГ КРУГООБРАЗНАЯ	шт	1
018a	V513.03-01-00	ДЕРЖАТЕЛЬ ВРАЧ	шт	1
018b	V513.04-01-00	ДЕРЖАТЕЛЬ АССИСТЕНТКА	шт	1
019	ME307991.011	ВИНТ М 8x70	шт	2
020	ME443620.005	РЕЗИНОВЫЙ ШАРНИР АССИСТЕНТКА	шт	1
021	ME307991.014	ВИНТ М 5x25	шт	2
022	ME309255.088	ВИНТ М 5x25	шт	2

4. Обслуживание изделия

Путём нажатия на управляющий рычаг ниже сиденья (1) осуществляется настройка высоты сиденья. После расслабления винта на опоре (2) можно установить расстояние опоры от сиденья.

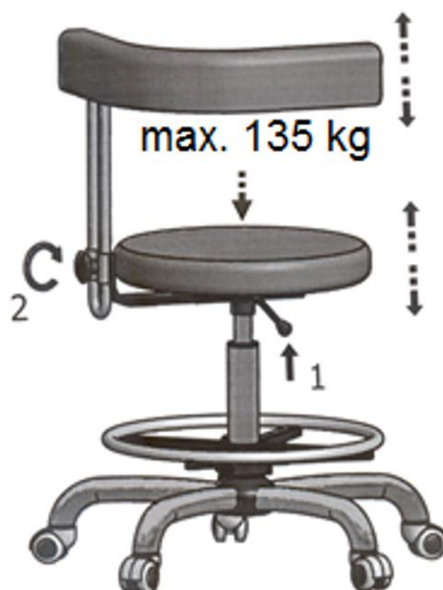

5. Упаковка изделия



1.





2.



3.



4.

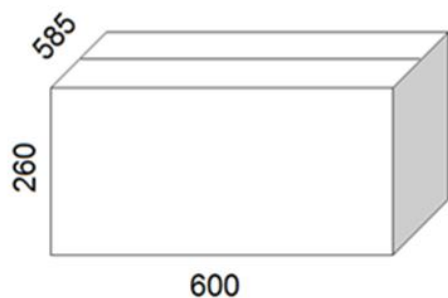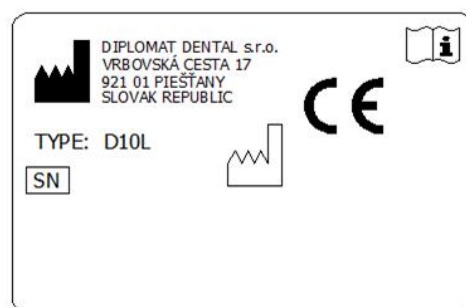

Габариты упаковки: 600x585x260 мм
 Объем упаковки: 0,09 м³
 Вес:

Рисунки 1,3 : 11 ± 1 кг

Рисунки 2,4 : 12 ± 1 кг

6. Требования к подготовительной установке

Предупреждение



Подготовительную установку и собственную установку необходимо проводить соответственно действующим в соответствующей стране стандартам и в соответствии с действующей документацией производителя, которая имеется в распоряжении у каждого авторизованного представителя DIPLOMAT DENTAL s.r.o.

Пол должен иметь твёрдое основание. Уклон пола может достигать максимально 1%. Анти-статический пол является предпочтительным вариантом.

Окружающая среда

Диапазон температуры окружающей среды	от +10°C	до +40°C
Диапазон относительной влажности	от 30%	до 75%

7. Очистка и дезинфицирование

- Для очистки поверхности стула и его остальных частей достаточно использовать влажное полотенце
- Производитель рекомендует чистящее средство **Incidin™ Foam** - спрей, (HENKEL – ECOLAB)
- Поверхность необходимо очищать не реже одного раза в день, а также в случае загрязнения поверхности прибора биологическим материалом

Предупреждение - запрещённые средства очистки



Запрещается очищать обивку кресла нарушающими структуру искусственной кожи очистителями (ацетон, трихлор, перхлор, алкоголь содержанием более 10%, абразивные очистители, полировальные вещества)



Важно

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования других дезинфицирующих и чистящих средств, кроме рекомендованных.

8. Гарантия

- Изготовитель предоставляет на стоматологическое кресло пациента гарантию соответственно гарантийному свидетельству.
- Риск повреждения товара переходит из продающего на покупающего с момента сдачи его первому транспортнеру с целью транспорта к покупающему, или же с момента сдачи – приёма товара прямо покупающим.
- Изготовитель закрепляет за собой право на изменения в рамках возобновления изделия.

Предупреждение



Расстройства, возникшие в следствии неправильного обслуживания или несоблюдения приведенных в руководстве по эксплуатации инструкций, не будут признаны причиной рекламации в рамках предоставленной гарантии

9. Утилизация изделия

Проводя утилизацию оборудования необходимо соблюдать действующие в соответствующей стране инструкции. Если к утилизации не имеются соответствующие специальные фирмы, надо пластмассовые части демонтировать, отделить обивку от металлических частей и передать их в соответствующий сборный центр.



DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
VRBOVSKÁ CESTA 17
921 01 PIEŠŤANY
SLOVAK REPUBLIC

