
2.4.3 Utilizarea piesei de mână cu baterie pentru fierăstrău de stern PRO9450B HALL® Titan™

1. Mutați maneta pentru modul de operare în poziția „funcționare”.
2. Pentru a activa piesa de mână, apăsați pe declanșator.



2.5 Montarea bateriilor

Pentru a atașa bateria dorită la piesa de mână:

1. Aliniați contactele din partea de sus a bateriei cu conectorul de pe piesa de mână.
2. Glisați bateria până când se înclișetează în poziție.



Pentru a detașa o baterie de la piesa de mână:

1. Apăsați butonul de eliberare a bateriei și scoateți bateria din piesa de mână.



2.6 Testarea funcțională preoperatorie

Înainte de fiecare utilizare, efectuați următorul test funcțional preoperatoriu:

1. Montați bateria pe piesa de mână.
2. Introduceți o piesă atașată sau o lamă în piesa de mână. Trageți ușor de piesa atașată sau accesoriul de tăiere pentru a vă asigura că este bine așezat.
3. Acționați piesa de mână mai puțin de 5 secunde pentru a observa posibilele zgomote, vibrații sau creșteri de temperatură neobișnuite.
4. Dacă apar dificultăți de operare, returnați piesa de mână pentru service.