

4.2.8 Conexiunile întrerupătorului de picior

Întrerupătorul de picior este folosit la pornirea emisiei laser.




Pedală dublă

Pentru cuplare, introduceți conectorul întrerupătorului de picior în priza dedicată a dispozitivului (panoul frontal).

	Descrierea componentelor
1	Amplasarea întrerupătorului de picior dublu (panou frontal)

4.2.9 Conectarea fibrei optice

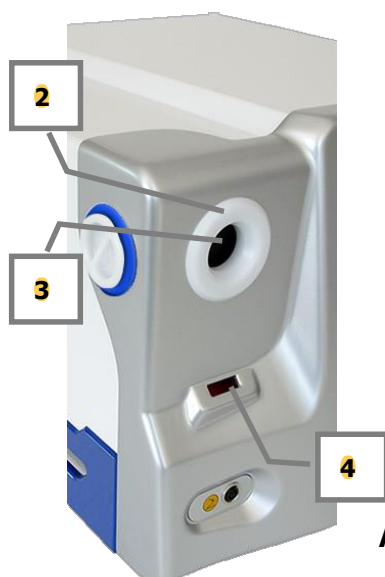

Fibra este conectată la dispozitiv prin conectorul pentru cablu din partea frontală.

Un senzor dedicat recunoaște prezența mâinii care deschide ecranul extern al conectorului pentru fibră.

Dispozitivul acceptă fibra cu conectorul SMA905 și cu sistemul de recunoaștere RFID (doar cu codul intern EDAP TMS). Conectorul pentru fibră are un inel suplimentar ce facilitează prinderea fibrei pe conectorul de pe dispozitiv și permite detectarea automată a prezenței sau absenței fibrei, precum și a diametrului și a tipului (de unică folosință/reutilizabilă) fibrei optice conectate. Dacă fibra nu este conectată la dispozitiv, o eroare va fi raportată la pornirea dispozitivului.

Avertisment:



°	Descrierea componentelor
2	Antenă RFID
3	Poziția conexiunii fibrei optice
4	Senzor de detectare a prezenței mâinilor

Este foarte important să strângeți manual până la capăt piulița fibrei optice pe dispozitiv. Cuplarea necorespunzătoare poate determina o putere de ieșire scăzută.

4.2.10 Verificarea fibrei optice

Consultați capitolul 7.6.