

1.0 INTRODUCERE

Se recomandă ca personalul să studieze acest manual înainte de a încerca să opereze și/sau să curețe sursa de lumină LS8000 Direct LED de la CONMED și accesoriile sale. Utilizarea sigură și eficientă a acestui echipament necesită înțelegerea și respectarea tuturor avertismentelor, instrucțiunile de atenționare și instrucțiunilor marcate pe produs și incluse în acest manual.



1.1 Utilizarea prevăzută

Sursa de lumină LS8000 Direct LED de la CONMED este destinată utilizării cu un endoscop pentru a asigura iluminarea în timpul procedurilor endoscopice.

1.2 Contraindicații

Niciuna.

1.3 Inspecția la recepție

La recepționare, despachetați cu atenție sursa de lumină și accesoriile. Asigurați-vă că toate elementele enumerate mai jos sunt incluse în cutie și nu prezintă deteriorări. Dacă observați orice deteriorare, contactați Serviciul Clienți CONMED. Păstrați TOATE materialele de ambalaj; acestea ar putea fi necesare pentru a verifica orice pretenții de daune de către expeditor.

- Sursă de lumină LS8000 Direct LED
- Manual LS8000 (CD)
- Fișă cu 9 piciorușe D-Sub /cablu ștecher

Cablul de alimentare detașabil este vândut separat și este ambalat într-o cutie separată.

- Cablu de alimentare C7104 - 115VAC
- Cablu de alimentare C7105 - 230VAC

1.4 Informații privind siguranța

Acest echipament este conceput pentru a fi utilizat de profesioniștii din domeniul medical, complet familiarizați cu tehnicile necesare și cu instrucțiunile de utilizare a echipamentului. Citiți și respectați toate avertismentele și instrucțiunile de atenționare și instrucțiunile marcate pe produs și incluse în acest manual.

Este important să citiți, să înțelegeți și să respectați toate măsurile de siguranță de mai jos.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la vătămarea pacientului sau a utilizatorului sau la deteriorarea sursei de lumină LS8000 sau a echipamentului conex.

După fiecare utilizare, curățați cu atenție unitatea și accesoriile (consultați „3.1 Curățarea”).