

2.0 INSTALAREA ȘI OPERAREA SISTEMULUI

2.1 Instrucțiuni privind instalarea

Atașați cablul de alimentare detașabil pentru spitale la priza cablului de alimentare de pe panoul din spate al sursei de lumină și la o priză de alimentare cu împământare pentru spitale. Dacă doriți, conectați sursa de lumină la panoul din spate al conectorului „SURSA DE LUMINĂ” de pe panoul din spate al consolei camerei IM8000.

2.2 Operarea sursei de lumină

Utilizați următoarea succesiune pentru a acționa sursa de lumină:

1. Apăsați butonul POWER pentru a porni sursa de lumină

Indicatorul butonului de alimentare se va aprinde în culoarea verde și pe ecranul LCD apare 

2. Introduceți ghidul de lumină din fibră optică în LGR.

NOTĂ: Introduceți în LGR numai ghiduri de lumină din fibră optică curate, uscate și neconductoare.

- a. Rotiți complet maneta ghidului de lumină în sensul invers acelor de ceasornic în poziția OPEN (DECHIS).
- b. Introduceți complet ghidul de lumină.
- c. Eliberați maneta ghidului de lumină până când este fixat.



NOTĂ: Dacă ghidul de lumină nu este complet așezat în LGR, inelul indicator va clipi în albastru și în verde, iar iluminatorul cu LED nu se va aprinde. Rotiți maneta în sensul invers acelor de ceasornic, introduceți complet ghidul de lumină, apoi apăsați butonul STAND-BY.

3. Apăsați butonul STAND-BY pentru a duce sursa de lumină în modul activ. Acest lucru va permite iluminarea prin ghidul de lumină.