

Secțiunea 2

COMENZI, AFIȘAJE ȘI CONECTORI

2.2 Panoul de ieșire

Panoul de ieșire conține comutatorul de alimentare și prizele accesoriilor. Prizele sunt iluminate pentru a ajuta la introducerea conectorilor în condiții de lumină scăzută. Consultați Figura 2.2.

24. **Priza accesoriului întrerupătorului-pedală:** Această priză acceptă cabluri pentru accesorii echipate cu fișe active standard (Bovie # 12). Când un cablu este introdus în această priză, priza Monopolar 1 nu poate fi utilizată.
25. **Priza Monopolar 1/comandă cu piciorul:** Această priză acceptă fișe tip banană de 4 mm, conectori de tip vârf de pin sau conectori standard cu trei dinți cu comutator manual.
26. **Priza Monopolar 2/piesa de mână ABC:** Această priză acceptă un conector standard cu trei dinți cu comutator manual, sau un conector accesoriu pentru comutarea manuală ABC cu trei dinți.
27. **Priza accesoriului bipolar:** Ieșirea bipolară este activată de întrerupătorul-pedală bipolar sau de accesorii bipolare controlate manual. Pentru această priză sunt recomandate accesorii CONMED cu fișe tip conexiune fixă. Pentru legăturile vechi cu conductoarele cu două fișe tip banană, conectați aceste conductoare de forceps bipolare active la conexiunile exterioare.
28. **Priza pentru electrodul dispersiv aplicat pacientului:** Acceptă o fișă standard cu doi pini pentru electrod dispersiv cu un singur strat sau cu strat dublu.
29. **Priza pentru piesa de mână ABC:** Conexiune pentru accesorii ABC.
30. **Întrerupător pentru starea de așteptare a puterii:** Pornește și oprește ESU.

Figura 2.2 Panoul de ieșire

