

Ghid rapid de utilizare a glucometrului

VivaChek™ InoX

Conectorii testului: aceștia sunt introduși cu fața în sus în portul de test

Spațiu pentru probă sângelui se absoarbe automat

Port pentru test

Buton ▲

Buton ▼

Eliminarea testului după utilizare

Ecran

Capac transparent

Ac steril

Buton de efecte a înțepături

Încărcarea lansatorului

Capac de protecție Eliminarea acului după utilizare

Capacul lansatorului

Setarea adâncimea înțepături

Reprezentant local în Republica Moldova
„PHARMONY” SRL


Asistență tehnică, vânzare consumabile (teste, ace)

Tel: +373 076 771 249 E-mail: info@pharmony.md


PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI DE ÎNȚEPARE

Important: Înainte de a efectua testul dezinfectați lansatorul cu un tampon umezit cu alcool sau soluție apă și săpun.


1. Deșurubați capacul lansatorului de ace și introduceți un ac steril în lansator.

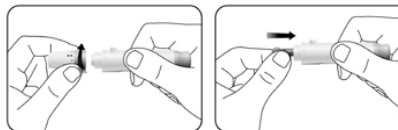


2. După ce ați fixat corect acul în lansator, răsuciți capacul de siguranță a acului până când se slăbește.

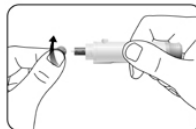


3. Însurubați capacul de siguranță înapoi pe lansatorul de ace.

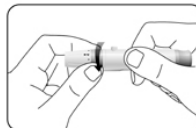

4. Reglați adâncimea punctiei prin rotirea capacului la una din cele 5 poziții setate.

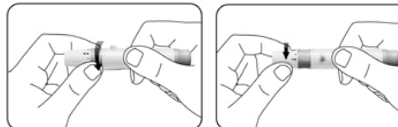


5. Trageți cilindrul înapoi pentru a încărca lansatorul de ace.

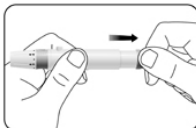

EFFECTUAREA UNUI TEST DE MĂSURARE A GLICEMIEI

1. Extrageți un test din flaconul cu teste apoi închideți ermetic capacul flaconului, după ce ați extras testul.

2. Se introduce banda de test în glucometru după cum indică săgeata. Glucometru pornește automat.

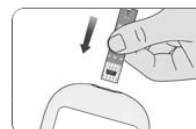

3. Pe ecran va apărea imaginea benzii de test și o picătură de lichid, aceasta indică că dispozitivul este gata pentru efectuarea măsurării. În caz că nu apare verificați corectitudinea plasării testului.



4. Fixați lansatorul de ace cu capacul de protecție pe partea laterală a degetului. Apăsăți butonul de lansare a acului. În urma acestor acțiuni obțineți o înțepătură.



5. Atingeți cu partea frontală a testului picătura de sânge, absorbția lui se va produce automat.
Atenție nu aplicați picătura de sânge pe partea de sus a benzii de testare.




6. Dispozitivul va efectua măsurarea în următoarele 5 secunde și va afișa rezultatul pe ecran. Rezultatul testului va fi memorat în memoria internă a dispozitivului.
(capacitatea memoriei este de 900 teste)



SETAREA DISPOZITIVULUI VICACHEK INOX

SETAȚI ORA ȘI DATA

Întrați în modul de setare și setați ceasul. Când contorul este oprit, apăsați butonul ▼ timp de 2 secunde pentru a intra în modul de configurare când porniți contorul pentru prima dată, acesta va intra și în modul de configurare. Setati ceasul pentru modul 12 sau 24 de ore. Apăsăți butonul ▲ pentru a comuta între moduri, apoi apăsați butonul ▼ pentru a salva selecția și a începe setarea.

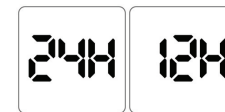

SETAȚI LUNA ȘI FORMATUL DATEI

D/m va clipi acum pe afișaj. Apăsăți ▲ pentru a selecta formatul dorit d/m pentru formatul de dată/lună sau m/d pentru luna/data. Apăsăți butonul ▼ pentru a salva.



SETAȚI DATA

Anul va apărea în partea de sus a afișajului. Apăsăți butonul ▲ până când apare anul corect. După ce ați selectat anul corect, apăsați butonul ▼ pentru a salva selecția și a începe să setați luna. Apăsăți butonul ▲ a până când apare luna corectă. Apoi apăsați butonul ▼ pentru a salva selecția și a începe să setați data. Apăsăți butonul ▲ până când este afișată data corectă. Apoi apăsați ▼ pentru a salva selecția și a începe să setați ora.



SETAȚI ORA CEASUL

Va apărea în partea de sus a afișajului. Reglați ora cu butonul ▲. Apăsăți butonul ▼ pentru a salva selecția și a seta minutele. Apăsăți butonul ▲ pentru a seta minutele. Apăsăți butonul ▼ pentru a salva selecția.





SETAȚI O ALARMĂ DE TEST

Funcția de alarmă de test a contorului dumneavoastră este presetată la OFF. Puteți seta până la 5 alarme pe zi și puteți regla ora în funcție de nevoile dvs. de fiecare dată.

A1 7:00 A2 9:00 A3 14:00 A4 18:00 A5 22:00

Notă

Dacă contorul este pornit în timpul momentului de testare, alarma de test nu va suna.
După ce ați setat funcția audio/ceas alarmă la ON sau OFF, apăsați butonul ▼ pentru a confirma.
Puteți seta o a doua alarmă apăsând butonul ▲ pentru a seta o a doua alarmă.
Urmați aceleași proceduri pentru a seta restul alarmelor.

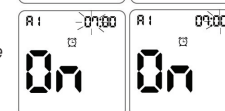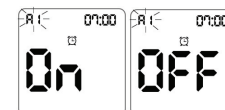

SETAȚI MARKERUL PENTRU ALIMENTE

Puneți un marker pentru alimente. După configurarea funcțiilor de alarmă de testare, simbolurile vor clipi împreună cu cuvântul „Pornit”. pe display. Apăsăți butonul ▲ pentru a porni sau dezactiva funcția de marcarea alimentelor, apăsați butonul ▼ pentru a seta.




SETAȚI O AVERTIZARE PENTRU HIPOGLICEMIE (HIPO)

După setarea markerului alimentar Hypo clipește pe afișaj, afișajul împreună cu inscripția „On” pe display. Apăsăți butonul ▲ pentru a activa sau dezactiva funcția de alarmă hipo, apăsați butonul ▼ pentru a seta. Dacă selectați alarma ON, afișajul arată 3.9 mmol/l cu simbolul „Hypo”, apăsați butonul pentru a selecta nivelul de care aveți nevoie, apăsați butonul ▼ pentru a seta.




SETAȚI O AVERTIZARE CETONĂ

După ce setarea alertei de hipoglicemie este finalizată, simbolul Cetonă va clipi, împreună cu cuvântul „Pornit”. ON pe afișaj. Apăsăți butonul ▼ pentru a activa avertismentul de corp cetonă.

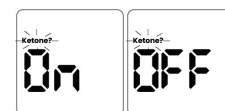

Краткое руководство по использованию глюкометра


VivaChek™ InoX

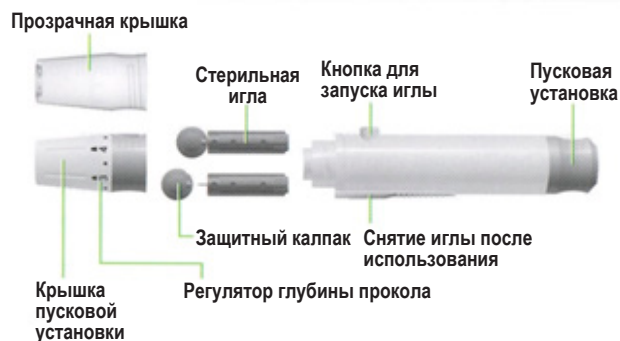

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА



Важно: Перед выполнением теста, продезинфицируйте пусковую установку тампоном пропитанным спиртом, или мылом и водой.

- 1 Откручиваем крышку пусковой установки иглы и вставляем стерильную иглу в пусковую установку
- 2 После правильной установки иглы в устройстве, открутите крышку безопасности иглы пока она не будет выпущена.
- 3 Привинтить крышку безопасности назад на пусковой установке иглы.
- 4 Отрегулируйте глубину прокалывания вращением крышки.
- 5 Вытяните цилиндр назад, заряжая пусковую установку игл.

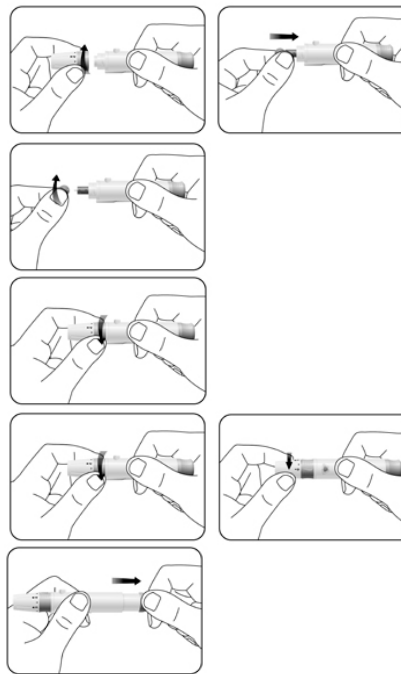

ПРОВЕДИТЕ АНАЛИЗ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

- 1 Извлеките тест из коробки, а затем плотно закройте крышку коробки.
- 2 Вставьте тест-полоску в глюкометр, как показано стрелкой. Глюкометр запускается автоматически.
- 3 На экране появится изображение тест-полоски и мигающая капля, указывающая на то, что прибор готов к измерению. Если оно не появится, проверьте правильность размещения теста.
- 4 Присоедините устройство для запуска иглы с защитным колпачком сбоку от пальца. Нажмите кнопку освобождения иглы. После этих действий вы получите каплю крови.
- 5 Прикоснитесь к капле крови передней частью теста, она впитывается автоматически.
Осторожно не допускайте попадания капли крови на верхнюю часть тест-полоски.

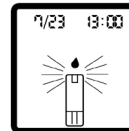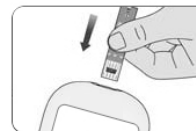


- 6 Устройство выполнит измерение в течение следующих 5 секунд и отобразит результат на экране. Результат теста будет сохранен во внутренней памяти устройства. (объем памяти 900 тестов)



НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА VIVACHEK INOX


УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ И ДАТУ

Войдите в режим настройки и установите часы. Когда глюкометр выключен, нажмите кнопку ▼ в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки при первом включении глюкометра также войдет в режим настройки. Установите часы для 12 или 24-х часового режима. Нажмите кнопку ▲ для переключения между режимами, затем нажмите кнопку ▼, чтобы сохранить свой выбор и начать настройку.

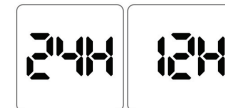


УСТАНОВИТЕ ФОРМАТ МЕСЯЦА И ДАТЫ

D/m теперь будет мигать на дисплее. Нажмите ▲, чтобы выбрать желаемый формат d/m для формата даты/месяца или m/d для месяца/даты. Нажмите кнопку ▼, чтобы сохранить.

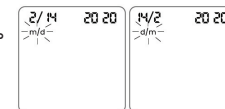

УСТАНОВИТЕ ДАТУ

Год появится в верхней части дисплея. Нажимайте кнопку ▲ до тех пор, пока не появится правильный год. Выбрав правильный год, нажмите кнопку ▼, чтобы сохранить свой выбор и начните устанавливать месяц. Нажимайте ▲ кнопку а до тех пор, пока не появится правильный месяц. Затем нажмите кнопку ▼, чтобы сохранить свой выбор и начать настройку даты. Нажимайте кнопку ▲, пока не отобразится правильная дата. Затем нажмите ▼ чтобы сохранить ваш выбор и начать установку времени.

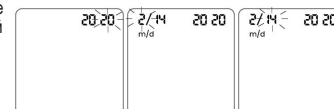


УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ

Часы появятся в верхней части дисплея. Настройте время с помощью кнопки ▲. Нажмите кнопку ▼ чтобы сохранить свой выбор и установить минуты. Нажмите кнопку ▲, чтобы настроить минуты. Нажмите кнопку ▼, чтобы сохранить выбор.




УСТАНОВИТЕ ФУНКЦИЮ НАПОМИНАНИЯ.

После установки времени мигает звуковой сигнал. Нажмите кнопку ▲, чтобы включить или выключить, нажмите кнопку ▼, чтобы сохранить настройку звука. Установите тестовый будильник. В вашем глюкометре функция тестовой сигнализации предварительно настроена на OFF -Выкл. Вы можете установить до 5 будильников в сутки и каждый раз настраивать время под ваши потребности. A1 7:00 A2 9:00 A3 14:00 A4 18:00 A5 22:00

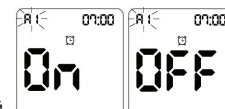

Примечание

Если глюкометр включен во время напоминания о проверке, сигнал тревоги о проверке не звучит. После того, как вы установите функцию аудио/будильник функцию на ON или OFF, нажмите кнопку ▼ для подтверждения. Вы можете установить второй будильник, нажав кнопку ▲, чтобы настроить второй будильник. Выполните те же процедуры, чтобы установить остальные будильники.

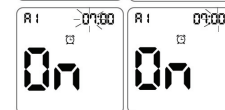


УСТАНОВИТЕ МАРКЕР ЕДЫ

После настройки функций тестовой сигнализации символы будут мигать вместе со словом «Вкл.» на дисплее. Нажмите ▲ кнопку, чтобы включить или выключить функцию маркера еды, нажмите кнопку ▼ для установки



УСТАНОВИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ГИПОГЛИКЕМИИ (ГИПО).

После установки маркера еды Нуро мигает на дисплее, дисплей вместе с надписью «Вкл.» на дисплее. Нажмите кнопку ▲, чтобы включить или выключить функцию тревоги Нуро, нажмите кнопку ▼, чтобы установить. Если вы выберете сигнал тревоги «включен» ON, на дисплее отображается значение 3.9mmol/L с символом «Нуро», нажмите кнопку, чтобы выбрать нужный вам уровень, нажмите кнопку ▼, чтобы установить.

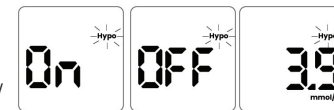

УСТАНОВИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КЕТОНАХ

После того, как настройка предупреждения о гипогликемии завершена, будет мигать символ Ketone вместе со словом «Вкл.» ON на дисплее. Нажмите Кнопку ▼ для включения предупреждения об кетонных телах.



Официальный представитель в Республике Молдова
„PHARMONY” SRL

Техническая поддержка, продажа расходных материалов
(тесты, ланцеты)

Тел: 076 771 249 Эл. почта: info@pharmacy.md