



S.A. M-INTER-FARMA

MD 2025 Mun. Chisinau, str. Grenoble 21

tel: (022) 904 - 006, 904 - 005; Fax: 904 - 007, 079768549, 068773434

www.minterfarma.md, e-mail: sales@minterfarma.md

LYSOFORMIN 3000

- concentrat pentru dezinfectare si spalare (instrumentar medical, instrumentar stomatologic, suprafete, inventar). In special este disponibil pentru endoscoape flexibile.

COMPOZITIA: 100 gr. solutie contine: 7,5 g. glioxal, 9,5 g. glutaraldehida, 9,6 g. didecildimetilamoniu clorurat.

PROPRIETATI:

- Actiune bactericida, virulicida (incl. Hepatita B si SIDA), fungicida
- Preparatul este inagresiv pentru instrumente, endoscoape si utilaj de laborator
- Este un remediu eficient de curatare
- Nu contine formaldehida, fenoli, fosfati si agenti oxidanti
- Preparatul este stabil in apa de var, se descompune biologic
- Miros placut si proaspat

PREPARAREA:

- Din concentratul **Lysoformin 3000** se prepara solutii de lucru prin diluare cu apa (temperatura nu mai mare ca cea a incaperii)
- Se toarna intai apa, apoi concentratul
- Se recomanda folosirea solutiilor proaspete
- Solutiile necontaminate cu produse organice (dezinfectarea si curatarea presterilizatorie a instrumentarului) se pot pastra active timp de 14 zile

DEZINFECTAREA INSTRUMENTELOR (INCL. ENDOSCOAPE)

Dezinfectarea bacteriilor (incl. tuberculoza), ciupercilor si a virusurilor

1% - 1 ora	1,5% - 30 min.	2,0% - 15 min.
10 ml. concentrat - 1 L. apa	15 ml. - 1 L. apa	20ml. - 1 L. apa

Dezinfectarea virusurilor Hepatitei B si HIV

1,5% - 30 min.	2,0% - 15 min.
15ml - 1 L. apa	20 ml. - 1 L. apa

Dezinfectarea suprafetelor

0,25% - 4 ore	0,5% - 1 ora	1,0% - 15 min.
2,5 ml. - 1 L.	5,0 ml - 1 L.	10 ml. - 1 ora

Dezinfectarea tesaturilor: 0,25% - 4 ore

PRECAUTII:

- Amestecurile cu alte solutii detergente sau resturile acestora pe instrumentele expuse pot reduce sau anula efectul dezinfectant al preparatului
- În caz de contact accidental (ochi, cavitate bucală, ingestie) cu **Lysoformin 3000** este necesara asistenta medicala. Primul pas este diluarea concentratiei agresive prin spalaturi abundente cu apa (extern si intern)
- Se folosesc doar solutii si nu concentratul
- A se folosi manusi de protectie

PASTRAREA:

- A se feri de copii
- Temperatura de pastrare + 5°C - + 30°C

