

MANUAL DE FUNCTIONARE SI INTRETINERE

SALTEA ANTIESCARE + COMPRESOR

DESCRIERE SI UTILIZARE:

Produsul este strict medical.

Echipamentul consta dintr-o saltea cu compresor cu presiune alternanta indicata pentru prevenirea escarelor intr-o terapie pe termen lung si pentru uzul domestic. Destinatia saltelei antiescare este de a reduce presiunea printr-un masaj usor spre imbunatatirea circulatiei sangvine si oxigenarea propice a tesutului.



INAINTE DE ACTIVAREA ECHIPAMENTULUI

1. La deschiderea pachetului, verificati integritatea produsului, acordand atentie sporita la deteriorarea posibila a componentelor din plastic. In aceste cazuri nu utilizati echipamentul.
2. Inainte de conectarea echipamentului verificati intotdeauna daca datele electrice indicate pe eticheta corespund acelor la care se conecteaza.
3. A nu se lasa la indemana copiilor.
4. In caz de functionare gresita, contactati distribuitorul.
5. Producatorul nu se face responsabil pentru uzul impropriu.
6. Acest echipament medical trebuie destinat exclusiv uzului pentru care a fost destinat. Producatorul nu poate fi considerat responsabil pentru deteriorarea cauzata de uzul impropriu, incorect si /sau necorespunzator.

ATENTIE: nu utilizati echipamentul in caz de priza necorespunzatoare, parti deteriorate vizibil sau in caz de cadere, chiar si accidental, in apa. Lipsa de respectare a regulilor mai sus mentionate poate compromite siguranta echipamentului.



REGULI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Pentru prevenirea incendiului sau electrocutare, nu folositi echipamentul in mediu umed sau in prezenta gazelor anestezice, materialelor inflamabile sau in prezenta lichidului care ar putea patrunde in echipament.



SIMBOLURI

	Simbolul inseamna ca TREBUIE sa urmati instructiunile.
	Simbolul inseamna ca exista instructiuni folositoare de urmat
	Simbolul inseamna note generice
	ON
	OFF
	Tipul de echipament BF
	Rata de umflare
	Gestionarea deseurilor conform directivei 2002/96/CE si a reglementarilor ulterioare
	Izolare dubla



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

1. Plasati compresorul orizontal sau agatati-l la picioarele patului cu agatatoarele specifice.
2. Plasati salteaua antiescare deasupra saltelei de pat observand daca tuburile nu sunt rasucite sau intepate. Partile negonflabile se plaseaza sub salteaua traditionala.
3. Conectati compresorul si apasati ON. Daca echipamentul are buton, plasati-l la nivelul maximal. Dupa 40 de minute salteaua va fi complet umflata.
4. Utilizati intotdeauna un cearsaf intre pacient si saltea.
5. Daca echipamentul are buton de reglare a presiunii, ajustati-l conform greutatii pacientului pentru a-l conferi acestuia maxim de confort.



RATA DE UMFLARE

GREUTATE	POZITIA MANERULUI
50KG	POZITIA 40
50KG-80KG	POZITIA 60
80KG-100KG	POZITIA 80
100KG-110KG	POZITIA 100
110KG-120KG	POZITIA 120



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip (Dir. 93/42/CEE)	Echipament medical Clasa I
Compresor	Saltea
Utilizare: compresor pentru saltea	Utilizare: saltea antiescare tip fagure
Putere: 230V~ -50Hz	Marime: cm 200x90x7H
Aer expulzat: 6 liter/min	Material: PVC
Ciclu : 10 min	Culoarer: Maro
Consum de energie: 7W	Greutate: aprox 2 kg
Clasa de siguranta electrica: clasa II	
Marime: 245 (L)mm x 110 (W)mm x 80(H)mm	Conectarea compresorului cu tuburi specifice
Ambalaj: ABS	Utilizare: pt pacienti de la 50kg la 120kg
Greutate: aprox 1,4kg	

Conditii de utilizare

Conditii de pastrare si transport

Temperatura ambientala: 10°C ÷ 35°C

Temperatura ambientala: -15°C÷50°C

Umiditate: 20 ÷ 80% RH

Umiditate: 10 ÷ 90% RH



CURATARE SI INTRETINERE

Echipamentul nu necesita intretinere.

Pentru curatarea saltelei folositi detergenti neutri, o carpa moale sau dezinfectanti obisnuiti. A nu se utiliza detergent abraziv care ar putea avaria salteaua.

Pentru curatarea compresorului nu utilizati niciun fel de detergenti.

Atentionare: Orice operatie de curatare sau intretinere trebuie facuta dupa deconectarea compresorului de la sursa electrica.

SOLUTIONAREA PROBLEMELOR.

PROBLEMA	SOLUTIE
Echipamentul nu functioneaza	Verificati conectarea
Salteaua nu se umfla	Verificati daca tuburile sunt conectate in conectorii specifici si daca nu exista obstructii.