

Reusable electrosurgical pencils

REUSABLE HAND SWITCH PENCILS

REF	CABLE LENGTH	CONNECTOR	ELECTRODE	Ø	GUARANTEED STERILIZATIONS
F4141	300 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	30
F4141/ERB	300 cm	Erbe 5 mm	blade F4060	2,38 mm	30
F4151	500 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	30
F4243	320 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	100
F4244	300 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	100
F4254	500 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	100
F4246	300 cm	Valleylab	blade F4060/4	4,00 mm	100
F4256	500 cm	Valleylab	blade F4060/4	4,00 mm	100

REUSABLE FOOT CONTROL PENCILS

REF	CABLE LENGTH	CONNECTOR	ELECTRODE	Ø	GUARANTEED STERILIZATIONS
F4814	300 cm	4 mm plug	blade F4060	2,38 mm	100



F4141



F4141/ERB



F4244



F4246



F4814



F4243

F4141 - F4151

MANIPOLI RIUTILIZZABILI PER ELETTROCHIRURGIA COMANDO MANUALE REUSABLE HAND SWITCH ELECTROSURGICAL PENCILS



I manipoli riutilizzabili FIAB con comando manuale a doppio bottone hanno caratteristiche che li rendono del tutto affidabili nelle pratiche elettrochirurgiche. L'impermeabilità del sistema è garantita da uno speciale O-ring in silicone che impedisce l'infiltrazione di liquidi proteggendo l'operatore da shock elettrici. Il connettore tipo Valleylab ne permette l'utilizzo con tutti i generatori per elettrochirurgia con questo standard. Il cavo in silicone ad alta resistenza consente ripetute sterilizzazioni in autoclave senza perdita di flessibilità.

FIAB reusable hand switch electrosurgical pencils have features that make them absolutely reliable during electrosurgical operations. The impermeability is guaranteed by a special silicone O-ring that avoids liquid infiltration protecting the surgeon from electrical shocks. The universal connector permits to use the pencil with all types of electrosurgical devices. The high resistance silicone connection cable permits repeated sterilisations in autoclave without losing flexibility.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL	F4141	F4151
DESCRIZIONE DESCRIPTION	Manipolo riusabile con attacco 2,38 mm (3/32"), comando manuale, con elettrodo a lama e cavo - NON STERILE <i>Reusable hand control pencil, housing 2,38 mm (3/32") with blade electrode and cable - NOT STERILE</i>	
MATERIALE MATERIAL	Plastico ad alta resistenza sterilizzabile. Prodotto senza lattice <i>Sterilisable high resistance plastic. Latex-free</i>	
LUNGHEZZA LENGTH	160 mm	
ELETTRODO ELECTRODE	Elettrodo a lama riutilizzabile, rimovibile <i>Removable blade electrode</i>	
PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	100 g ± 3%	130 g ± 3%
CAVO CABLE	Tripolare ad alta flessibilità in silicone sterilizzabile <i>Sterilisable tripolar high flexible silicone</i>	
LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGTH	300 cm ± 3%	500 cm ± 3%
ATTACCO CONNECTOR	Universale tripolare stampato tipo Valleylab <i>Tripolar universal Valleylab type</i>	
STERILIZZAZIONE STERILISATION	Ossido di Etilene e autoclave: manipolo ed elettrodo risterilizzabili fino a 30 volte <i>EO gas and steam: the pencil and the electrode can be sterilized up to 30 times</i>	
STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE STERILISATION WITH STEAM	Pre-vuoto - Pre-vacuum: 8 min Esposizione - Exposure: 134°C (273°F) 2,05 bar per/for 12 min Asciugatura - Drying: 9 min <u>Oppure / or</u> Pre-vuoto - Pre-vacuum: 8 min Esposizione - Exposure: 121°C (250°F) 1,05 bar per/for 20 min Asciugatura - Drying: 9 min	
CONFORMITA' STANDARD SICUREZZA ELETTRICA COMPLIANCE TO ELECTRICAL SAFETY STANDARDS	EN 60601-1 ; EN 60601-2-2 ; EN 60601-1-2	
CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA COMPLIANCE TO DIRECTIVE	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIB <i>Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIB medical device</i>	

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di polietilene – NON STERILE <i>Singly packaged in sealed polyethylene pouch – NOT STERILE</i>
CONFEZIONE VENDITA SALE PACKAGING	5 pezzi in scatola di cartone <i>5 units in carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0 ÷ +50 °C - Umidità relativa: 20 ÷ 80 % <i>Temperature: 0 ÷ +50 °C - Relative humidity: 20 ÷ 80 %</i>
SCADENZA EXPIRY	5 anni dalla data di produzione se conservati correttamente <i>5 years from production date if correctly stored</i>