


4.2 Setup (Configurare)

Operatorul trebuie să atingă pictograma Setup (Configurare)  din colțul din dreapta-sus a ecranului tactil pentru a se afișa lista de meniuri de configurare posibile.



4.2.1 System Settings (Setări sistem)

System Settings (Setări sistem) permite utilizatorului să modifice setările de sistem pentru funcțiile dispozitivului și informații.

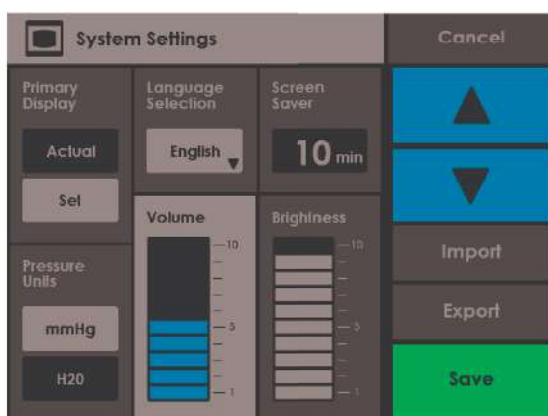

Apăsați orice pictogramă de setare pentru a efectua o ajustare. Setarea selectată va deveni luminoasă (albastru). Atingeți pictogramele de creștere și micșorare din partea dreaptă a ecranului tactil pentru a ajusta setarea. După ce ați modificat toate setările, atingeți Save (Salvare) pentru a reveni la ecranul Funcționare principal. Atingeți Cancel (Anulare) pentru a reveni la ecranul principal fără a efectua modificări la nicio setare.

1. Primary Display (Afișare principală) – selectează care dintre valorile presiunii este afișată mai întâi (cu font mare).
2. Pressure Units (Unități presiune) – presiune măsurată afișată în mmHg sau în LH2O
3. Language Selection (Selectare limbă) – limbile disponibile sunt English (Engleză), Spanish (Spaniolă), German (Germană), Italian (Italiană) și French (Franceză)
4. Screen Saver (Economizor de ecran) – se activează, în mod implicit, după treizeci de minute. Setarea poate fi crescută, micșorată sau dezactivată