

Înlocuirea

Instalarea cuvei

Etape	Grafic/referință
1. Poziționați segmentul de cuvă [1] pe pinii de aliniere ai caruselului de reacție [2]. Pentru a asigura o performanță optimă pe durata de viață a unui ARCHITECT c4000, cuvele ar trebui înlocuite după 12 ani de utilizare. 2. Strângeți cu degetul șuruburile cu cap plat [3] în segment. 3. Strângeți șuruburile cu grijă, folosind o șurubelniță plată.	

Verificarea

Efectuați procedura de diagnosticare a caruselelor 3010 Revenirea/Deplasarea în poziție inițială a caruselului de reacție

Etape	Grafic/referință
Efectuați procedura de diagnosticare a caruselelor 3010 <i>Revenirea/Deplasarea în poziție inițială a caruselului de reacție</i> , pagina 10-661, pentru a verifica dacă segmentul cuvei este instalat adecvat.	

Înlocuirea vârfului uscat al cuvei (c4000)

Înlocuirea vârfului uscat al cuvei constă din următoarele proceduri.

- Demontarea
 - *Demontarea ansamblului spălător al cuvei*, pagina 9-131
 - *Demontarea vârfului uscat (dry tip) al cuvei*, pagina 9-132
- Înlocuirea
 - *Instalarea vârfului uscat al cuvei și a ansamblului spălătorului cuvei*, pagina 9-132
 - *Pregătire pentru operare*, pagina 9-133
- Verificarea
 - *Spălare cuve*, pagina 9-133
 - *Efectuarea controlului de calitate*, pagina 9-133

Condiție necesară	Modulul de procesare trebuie să aibă starea Ready (Pregătit).
--------------------------	---