

Coduri de bare pe probe

În această secțiune

Despre modul cu coduri de bare și fără coduri de bare (97)

Specificațiile codurilor de bare pentru probe (99)

Specificațiile zonelor de scanare pentru codurile de bare pentru probe (101)

Specificațiile codurilor de bare pentru rackuri (101)

Despre modul cu coduri de bare și fără coduri de bare

În modul cu coduri de bare, sistemul utilizează coduri de bare pentru a identifica probele. În modul fără coduri de bare, sistemul alocă un număr de secvență probelor încărcate. Trebuie să organizați manual această secvență de probe sau cu ajutorul unității gazdă pentru a urmări identitățile probelor.

Mod cu cod de bare

Codurile de bare sunt utilizate pentru identificarea probelor, calibratorilor și materialului QC. În modul cu coduri de bare, codul de bare de pe recipientul de probe reprezintă ID-ul probei.

Codurile de bare pentru probe pot fi generate de sistemul etichetare cu coduri de bare și de imprimare al laboratorului dvs. Codurile de bare pentru calibratori și materialul QC sunt furnizate în pachet.

Pentru a evita riscul de nepotrivire a probelor, Roche recomandă operarea sistemului în modul cu coduri de bare.