

Instrucțiuni de utilizare pentru Paravanul Medical

Paravanul medical 2 secții, model: PM -002

Scop de utilizare

Un paravan medical pe roți este un echipament mobil specializat conceput pentru a asigura confortul pacienților, protejându-i de privirile indiscrete. De asemenea, paravanul ajută la delimitarea eficientă a spațiului de lucru.

Domeniul de aplicare: paravanul medical este utilizat pentru echiparea organizațiilor medicale și terapeutice. Paravanul medical este un echipament necesar pentru efectuarea procedurilor terapeutice în instituțiile medicale. Secțiile au aceiași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acestora.

Indicații de utilizare: pentru amplasarea în saloane, în săli de tratament și de examinare.

Contraindicații: niciuna atunci când este utilizat în conformitate cu documentația de operare.

Nu deplasați paravanul în timpul procedurilor!

Denumirea principalilor parametri și dimensiuni	PM- 002
Structura carcasei	Cadru din metal vopsit(culoarea albă), grosimea 10mm
Înălțimea	1750 mm
Lățimea totală	1450 mm
Dimensiunea perdelei din PVC(culoarea albă)	Conform carcasei Perdele lavabile și ignifuge
Roți cu diametru 50mm	Min 4 cu frână
Masa unei secțiuni	Nu mai mult de 9 - 11 kg

Reguli pentru utilizarea echipamentului

1. Transportul, depozitarea și operarea produsului trebuie efectuate în conformitate cu parametrii paravanului medical.
2. Paravanul medical trebuie utilizat în încăperi închise și uscate, cu o temperatură care să nu fie mai mică de +2°C și mai mare de +40°C și o umiditate relativă de 45 - 70%.
3. Nu permiteți expunerea directă la lumina soarelui, deoarece dăunează aspectului produselor, poate schimba culoarea suprafeței.
4. Paravanul medical trebuie instalat la o distanță de cel puțin 0,5 m de dispozitivele de încălzire.
5. Protejați echipamentul de deteriorări mecanice și de expunerea la substanțe chimice agresive. Fiți atenți la manipularea substanțelor care lasă pete indelebile.
6. Nu utilizați obiecte ascuțite, acizi, soluții alcaline sau agenți abrazivi pentru curățarea vaselor și a obiectelor sanitare.

Îngrijirea suprafețelor

1. Produsele necesită puțină întreținere și sunt practice de utilizat.
2. Produsul poate fi curățat cu orice agent de curățare pe bază de alcool, cu excepția celor cu un principiu de acțiune abraziv.
3. O perie moale poate fi utilizată pentru curățarea murdăriei dificile.
4. Utilizați o cârpă ușor umedă și detergenți normali pentru a curăța țesătura.
Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice agresive.

Condiții de garanție

- Perioada de garanție este de 24 de luni de la data vânzării produsului.
- **Produsul este scos din serviciul de garanție dacă:** cumpărătorul a încercat să repare singur produsul;
 - au fost detectate modificări neautorizate în proiectarea produsului;
 - daune mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Garanția nu se aplică elementelor de fixare și altor produse achiziționate care nu sunt fabricate de această societate.



Producător: Caravan Express SRL
Republica Moldova or. Cimișlia, MD-4101

