

Prezentare generală a configurării IT a laboratorului

Software-ul sistemului **cobas** este integrat în configurarea IT a laboratorului. Sunt posibile diferite configurări.

Prezentare generală a fluxului de informații


În această secțiune

Despre **cobas** link (76)

Despre fluxul de informații e-library (78)

Despre e-library (79)

Despre cobas link

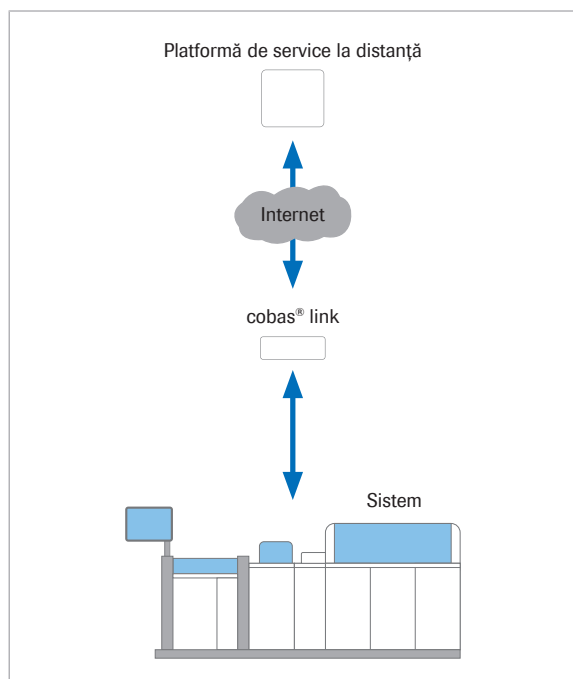

cobas link oferă o conexiune sigură la distanță pentru transferul de date dintre sistemele **cobas** din laboratorul dvs. și platforma de service la distanță.

cobas link este utilizat pentru a accesa e-library pentru a vizualiza Fișele de Metode, Fișele cu valori de referință pentru calibratori și controale și alte documente.

Alte funcționalități oferite de **cobas** link sunt:

- Descărcarea automată a informațiilor recente cu privire la aplicații, calibratori și seruri de control din infrastructura de service la distanță Roche în sistemul dvs.
- Arhivarea Instrucțiunilor de Folosire și parametrilor sistemului.
- Încărcarea datelor statistice din sistemul dvs., pentru a monitoriza performanțele, pentru managementul QC și în scopuri de service pe platforma de service la distanță.

Pentru a activa accesul la platforma de service la distanță, sistemul dvs. **cobas** trebuie să fie conectat la o stație de date **cobas** link. Pentru a verifica dacă **cobas** link este conectat, verificați butonul **cobas link** din fereastra de dialog **Overview**.