

**MN 902 | Microscope Drape Large**  
Mikroskop Kılıfı Büyük Boy

**MN 903 | Microscope Drape Small**  
Mikroskop Kılıfı Küçük Boy



| CODE   | SIZE                   |
|--------|------------------------|
| MN 902 | MICROSCOPE DRAPE LARGE |
| MN 903 | MICROSCOPE DRAPE SMALL |



#### TECHNICAL PROPERTIES

- Single use.Sterile.
- Transparent polycarbonate observation glass.
- Antistatic.Polyethylene.
- Protective cover for microscopes during operations.


#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tek kullanımlık. Sterildir.
- Şeffaf gözlem camı vardır.
- Antistatik ve Polietilen malzemeden üretilmiştir.
- Mikroskopların operasyon süresince steril kalmasını sağlayan bir kılıftır.




## Инструкция

### Чехол одноразовый, стерильный MN 902, NORTON MEDICAL

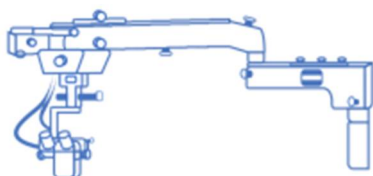

#### Инструкция

**1.** Подготовьте микроскоп, надежно закрепив кабели. Подгоните исходное положение тубуса (окуляров и рукояток) микроскопа в удобное для вас положение во время операции.

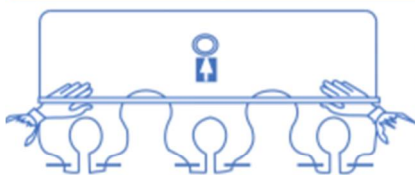

**2.** Выньте чехол из стерильной упаковки. Разверните чехол. Защитная линза для объектива микроскопа должна смотреть лицом вниз, этикетка с указательной стрелкой должна быть направлена вверх, от Вас.




**3.** Найдите посередине слой, на котором по краям расположены наклейки с изображением рук. Поместите руки над этим слоем внутрь чехла по центру и раздвиньте их до места положения наклеек, натянув при этом пакет и образовав некую полость.




**4.** Наденьте чехол предварительно на такие выступающие части тубуса микроскопа, как окуляры и рукоятки и продолжайте его разворачивать до верхней части тубуса.



**5.** Зафиксируйте защитную линзу на объективе со световой лампой простым надавливанием с помощью руки.

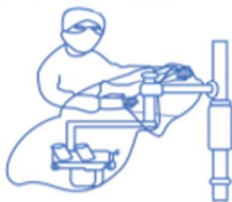

**6.** Разверните оставшуюся часть чехла над штативом микроскопа. Свисающие широкие части соберите вверх и зафиксируйте их в сложенном положении, обмотав специальными стропами (лентами).

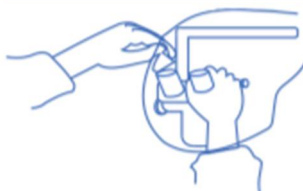

**7.** Затяните излишки концов рукава для окуляров, обмотав их специальной лентой. Непосредственно перед работой, оторвите кончики с перфорацией.