

Sterilizarea cu aburi

Avertizare: Utilizarea soluțiilor de dezinfectare pentru a șterge exteriorul instrumentului nu va steriliza echipamentul și nu este recomandată.




Pregătiți instrumentele astfel încât toate suprafețele să intre în contact cu aburul. Instrumentele cu balamale și conectori Luer-Lock trebuie să fie în poziție deschisă.

Metodă	Ciclu	Temperatură minimă	Timp de expunere	Timp de uscare
Abur (ambalat/neambalat)	Previdare	132°C (270°F)	4 minute	29 de minute
Abur (ambalat/neambalat)	Gravitație	121°C (250°F)	30 minute	20 de minute

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Sistemul de ghidaj de găurire Infinity™ trebuie utilizat pentru ghidarea pinilor de găurire în procedurile de reconstrucție ale ligamentului încrucișat anterior și ale ligamentului încrucișat posterior.

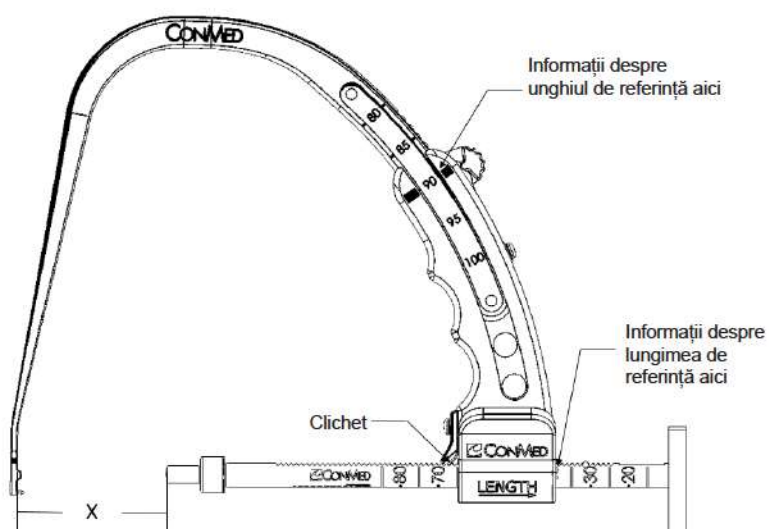

1. Glisați brațul de ghidare în corpul de ghidare.
2. Blocați pe corpul de ghidare la unghiul dorit, folosind comutatorul de blocare.

