

1. INFORMAȚII REFERITOARE LA ACEST DOCUMENT

1.1. SCOP

Acest document descrie manevrarea și funcționarea corectă ale acestor instrumente, dar și metodele recomandate de procesare. Acest document nu va fi utilizat pentru efectuarea unor investigații sau intervenții chirurgicale endoscopice și nici în scopuri de instruire. Versiunea actualizată respectivă a acestui document poate fi solicitată de la CONMED Corporation. În cazul în care, în calitate de utilizator al acestui instrument, considerați că vă sunt necesare informații mai detaliate referitoare la utilizarea și întreținerea produsului, luați legătura cu reprezentantul dumneavoastră.

1.2. SIMBOLURI UTILIZATE

Următoarele simboluri sunt utilizate pentru a vă facilita accesul la informații:



Instrucțiuni cu rol de prevenire a vătămării individuale.

2. UTILIZARE DESTINATĂ

Domeniile de aplicare a instrumentelor QuickLatch sunt sistemele manșon artroscopic pentru efectuarea diagnosticului endoscopic și tratamentul în cadrul procedurilor artroscopice.

În beneficiul și pentru siguranța pacienților, medicii trebuie să aleagă o metodă pe care o consideră adecvată conform experienței personale. În cazul în care, în calitate de utilizator al acestui instrument, considerați că vă sunt necesare informații mai detaliate referitoare la utilizarea și întreținerea produsului, luați legătura cu reprezentantul dumneavoastră.

3. INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA

Instrumentul poate fi utilizat de către profesioniști instruiți din domeniul sănătății, în cadrul unor unități medicale.

- La recepția instrumentului, se inspectează coletul pentru a constata integritatea și potențiale deteriorări.
- Citiți, respectați și păstrați instrucțiunile privind utilizarea.
- Utilizați instrumentul numai conform scopurilor prevăzute, vezi „Utilizare intenționată”.

Standardele și legile naționale impun respectarea proceselor validate.

În general, responsabilitatea pentru validarea proceselor le revine utilizatorilor.

- Asigurați-vă că procesarea, materialele și personalul sunt adecvate pentru obținerea rezultatelor necesare.



AVERTIZARE

Risc de infecții pentru pacient sau pentru personalul medical.

- Acestea sunt instrumente reutilizabile vândute ca nesterile. Curățați/dezinfectați și sterilizați instrumentul înainte de utilizarea inițială, precum și a fiecărei utilizări ulterioare.
- Aduceți instrumentul în zona de decontaminare după fiecare utilizare. Respectați măsurile de protecție în vigoare pentru a preveni contaminarea mediului.



AVERTIZARE

Instrumentul defect se asociază cu risc de vătămare corporală!

- Efectuați o inspecție vizuală și o verificare funcțională înainte de fiecare utilizare.
- Utilizați numai instrumente care sunt în perfectă stare de funcționare.
- Respectați reglementările locale în vigoare pentru operatorii care efectuează procese manuale de curățare și uscare.
- Asigurați-vă că, în timpul depozitării, transportului și procesării, instrumentul nu este supus unor stresuri mecanice.
- Respectați următoarele măsuri pentru a preveni deteriorările fizice:
 - Nu supuneți instrumentul unui șoc.
 - Nu îndoiți teaca.
 - Așezați cu grijă instrumentul pe suprafețe.
 - Transportați instrumentele în mod individual și păstrați-le în siguranță, utilizând un coș cu sită sau un recipient.

4. DESCRIERE

- Designul instrumentelor QuickLatch asigură un mecanism de conectare facilă pentru atașarea la artroscop, la piesa de etanșare sau trocar.