


**CATETERELE  
PHENOM™\***  
**GHID DE  
LUCRU**

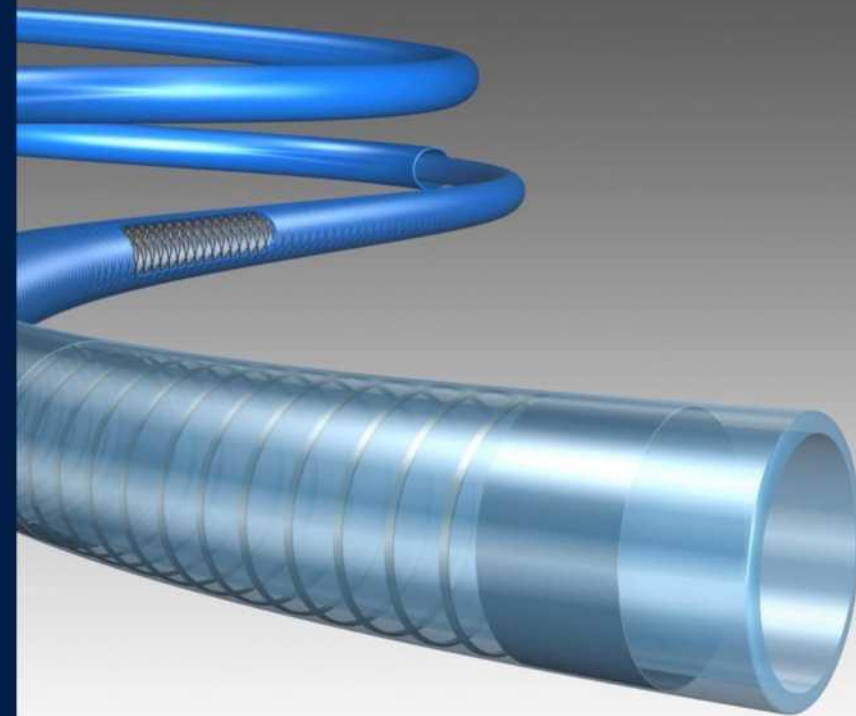

**Medtronic**  
Further, Together

**CATETERELE**

**PHENOM<sup>TM\*</sup>**

**PREZENTARE**


**GENERALĂ A**

**MATERIALELOR**


**Medtronic**

Further, Together

# CUM SUNT PROIECTATE<sup>1</sup>

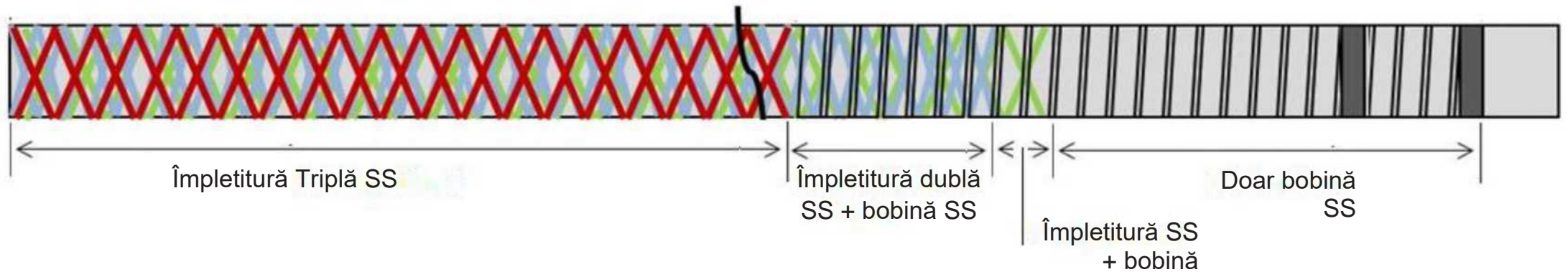


- 4 zone de tranziție
  - Proximal - împletitură triplă SS
  - Ax medial - împletitură dublă SS și bobină
  - Ax medial - împletitură SS și bobină unică
  - Segment distal – bobină SS
- Materiale corp cateter
  - Straturi exterioare din Pebax™\* (strat interior din oțel inoxidabil împletit/bobinat, PTFE și elastomer poliolefinic)
- Vârf distal rotunjit
- Căptușeală interioară lubrifiantă
- Marker radioopac
  - Platină/Iridiu
- Tub suport
  - Nailon

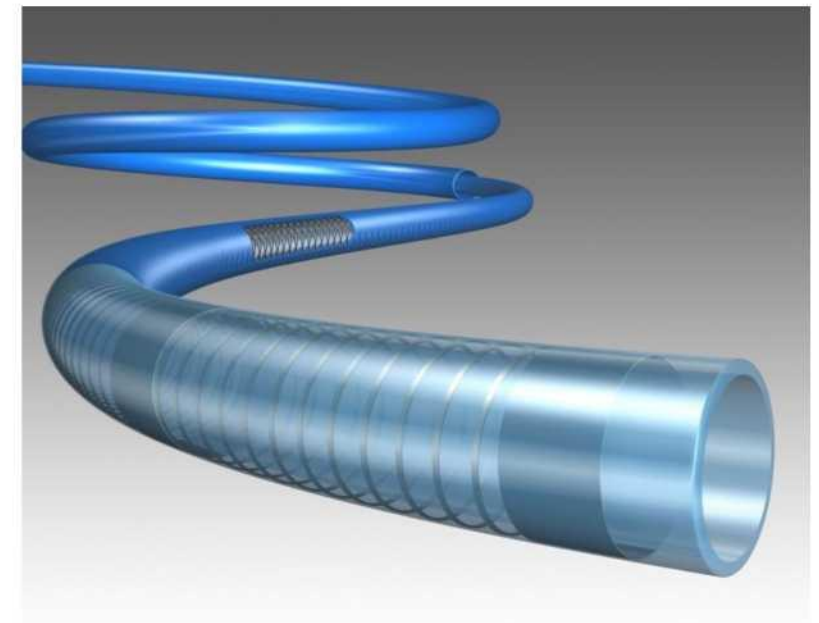

# CONFIGURAREA VÂRFULUI DISTAL<sup>2</sup> CE REPREZINTĂ?

## EXPLICAȚII NUMĂR PIESĂ

	Cateter Phenom™*	FG	Mărime	A	-	B	C	-	Marker vârf	Formă vârf
<b>Exemplu</b>	<b>Cateter Phenom™* 017</b>	FG	11	150	-	16	15	-	2	S

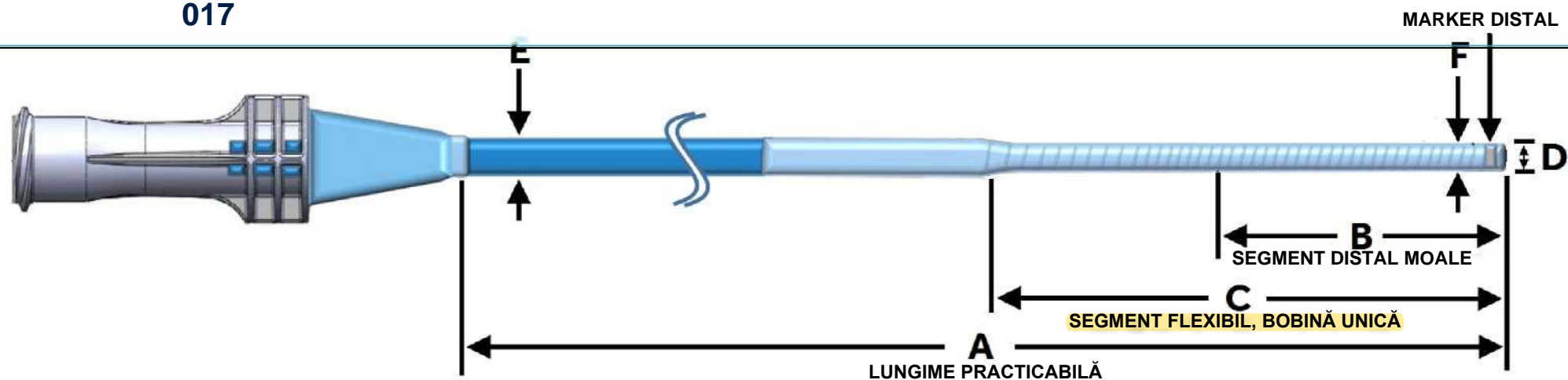

**B:** Lungimea segmentului moale distal, în centimetri, măsurată de la vârful distal.

**C:** Lungimea segmentului ranforsat cu bobină unică, în centimetri, măsurată de la vârful distal.

# SPECIFICAȚII PENTRU COMENZI<sup>3</sup>

## CATETERUL PHENOM™\* 027: SELECTAȚI LUNGIMEA PORȚIUNII FLEXIBILE CU BOBINĂ UNICĂ

	D: DI Cateter	E: DE Proximal	F: DE Distal	C: Lungimea flexibilă cu bobină unică	Număr piesă
<b>Cateterul Phenom™* 027</b>	0.027" (0.69 mm)	0.040" (3.1F)	0.036" (2.8F)	15 cm 30 cm	FG15150-0615-1S FG15150-0630-1S

**CATETERELE**

**PHENOM<sup>TM\*</sup>**

**BENEFICIILE**

**PRODUSULUI**


**Medtronic**

Further, Together

# CATETER PHENOM™\* 027

## AVANTAJE

Phenom™\* 027 – comparație pentru forța de flambaj măsurată a vârfului distal (g)<sup>1</sup>

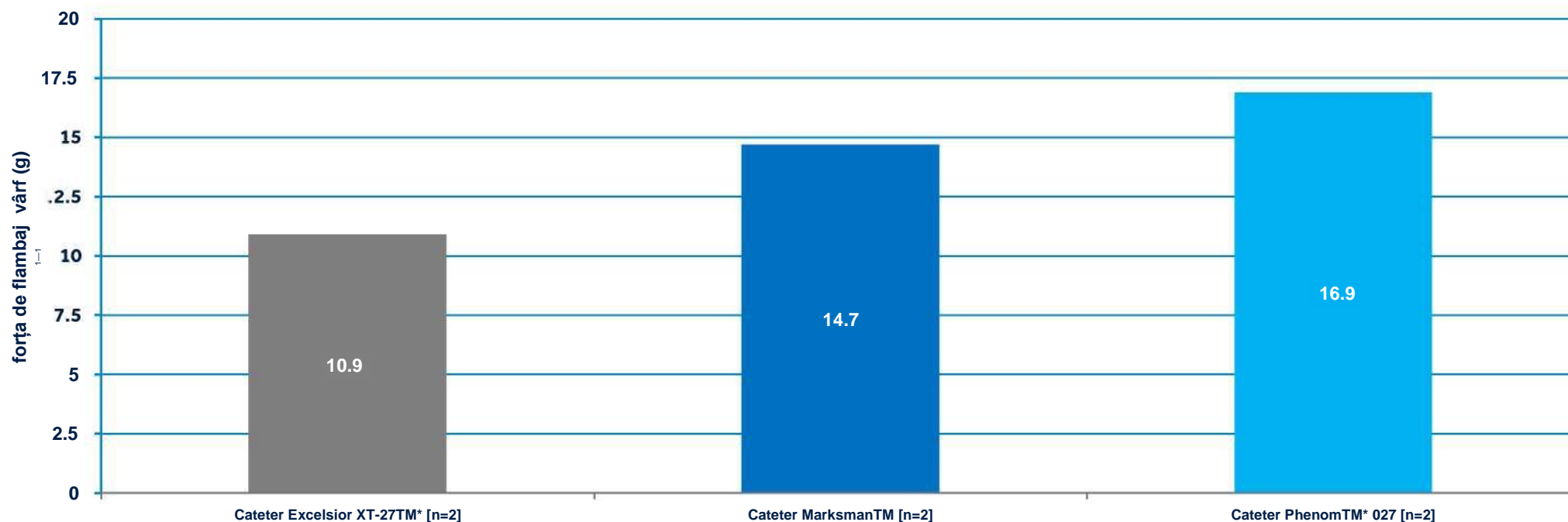

### Avantajele esențiale<sup>2</sup>

- Lumenul cateterului este proiectat strategic, pentru a preveni ovalizarea și pentru durabilitate, cu scopul plantării de dispozitive terapeutice avansate, cu fricțiune minimă.
- Vârful distal rotunjit este conceput pentru a spori trasabilitatea acestuia peste fir, și pentru a ajuta la recaptarea dispozitivului.
- Modelele optimizate ale axului distal al cateterului Phenom™\* sunt flexibile, dar stabile

# Medtronic

## Europa

Medtronic International Trading Sarl.

Route du Molliau 31

Case postale

CH-1131 Tolochenaz

Tel: +41 (0)21 802 70 00

Fax: +41 (0)21 802 79 00

2016

[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)

UC201704796 EE © Medtronic

Toate drepturile rezervate.

## REFERINȚE

TR-NV12653A1 2. Document Cathera ML-0001.A 3. DC00039504B

**COMPLICAȚII POTENȚIALE:** pentru lista completă de avertismente, precauții și contraindicații consultați instrucțiunile de utilizare.

Indicațiile, contraindicațiile, avertismentele și instrucțiunile de utilizare se găsesc pe eticheta produsului existentă pe fiecare dispozitiv.

Cateterele Phenom™ sunt destinate plasării dispozitivelor de intervenție și a celor pentru perfuzia de agenți de diagnostic sau terapeutici în vasculatura neurologică, periferică și coronară.

™\* Phenom este marcă comercială a Cathera, Inc. Mărcile terțe sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.