

PROSPECT PENTRU UTILIZATOR

Peroxid de hidrogen-MC
soluție dezinfectantă 6%

DENUMIREA PRODUSULUI

Peroxid de hidrogen-MC, soluție dezinfectantă 6%

COMPOZIȚIA

100 ml conține:

Substanța activă: peroxid de hidrogen 30% - 20,0 g

Excipienți: benzoat de sodiu, apă purificată.

PREZENTARE

Lichid transparent, incolor, fără miros.

Peroxid de hidrogen-MC 6% soluție dezinfectantă, intră în categoria biocide.

Peroxid de hidrogen-MC 6% posedă o reducere a microorganismelor de referință S. aureus și E. hirae și a microorganismului de referință C. albicans.

RECOMANDĂRI

Peroxid de hidrogen-MC 6% – pentru dezinfectarea suprafețelor din încăperi (podea, pereți, uși etc.), transportului (ambulanță, transport public, ect); pentru dezinfectarea obiectelor; pentru dezinfectia materialului de curățare; pentru dezinfectarea și sterilizarea dispozitivelor medicale în unitatea sanitară rezistente la coroziune;

ADMINISTRARE

Timpul de contact necesar al Peroxid de hidrogen-MC 6% cu substratul tratat trebuie să fie 60 minute. Substanța chimică prin care se poate realiza dezinfectia de nivel înalt este: - Peroxidul de hidrogen-MC 6%.

Avertizări de pericol (fraze H): H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.; H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.; H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Recomandări de siguranță (fraze P): P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.; P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor; P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul

EFECTE NEDORITE

Evitați pătrunderea soluției în ochi și pe mucoase.

Lumina și căldura reduc activitatea preparatului.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitatea la componentele produsului.



*Corespondență
originalului
[Signature]*

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

1. Se interzice de a scoate dopul flaconului cu dinții.
2. Este necesar de respectat procentajul soluției pentru fiecare lavaj în parte.
3. După prelucrarea suprafețelor cu Peroxid de hidrogen-MC 6%, obiectele supuse dezinfecției se lasă 60 min, apoi se spală cu apă curată sau se șterge cu o cârpă umedă.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Peroxid de hidrogen-MC soluție dezinfectantă 6%. Volumul nominal câte 40ml, 50 ml, 100ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml, 5000 ml, în ambalaj cu capac sau flacoane de sticlă sau masă plastică de culoare oranj(brună) cu gât elicoidal închis cu / sau fără dopuri din polietilenă și cu căpăcele din masă plastică (capac din polietilenă, capac din aluminiu). Câte un flacon împreună cu/sau fără prospectul pentru utilizator se ambalează în cutie individuală. Se admite ambalarea flacoanelor în/ sau fără cutie colectivă, fără ambalarea lor în cutie individuală.

PĂSTRARE

A se păstra la temperatura sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI

Octombrie 2023

DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI

„MC Pharmaceuticals” SRL, Republica Moldova

MD - 2037, mun. Chișinău, str. Industrială, nr. 59/3,

e-mail: office@mcpharma.md,

tel: 068051605.

Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj!

