


## Secțiunea 2

### COMENZI, AFIȘAJE ȘI CONECTORI

Figura 2.4 Piedestal mobil

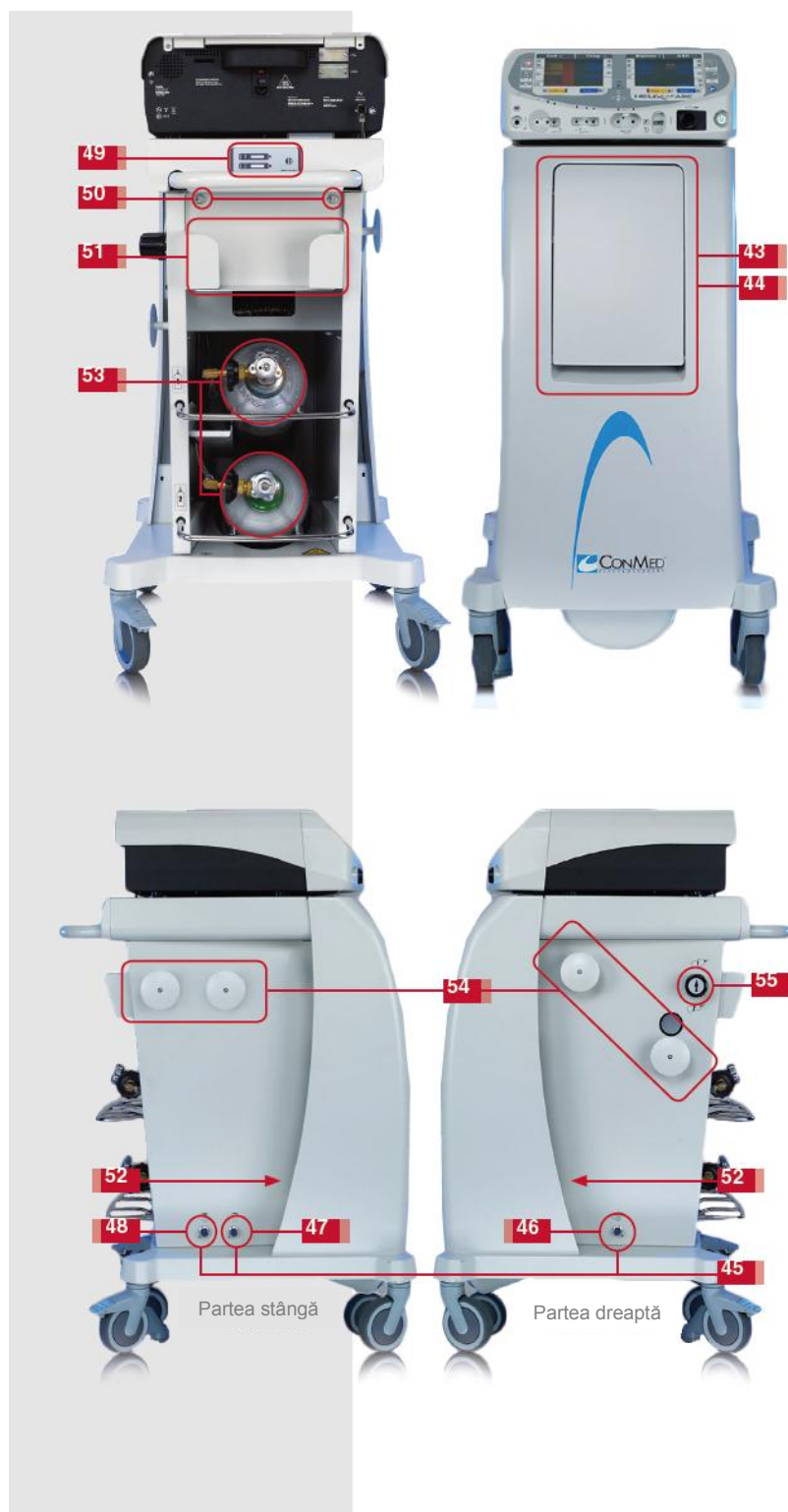

#### 2.4 Piedestal mobil (cărucior)

43. **Loc de depozitare cu sertar:** Capacitatea maximă de încărcare a sertarului: 5 lb
44. **Panou opțional:** Permite ca CONMED AER DEFENSE să fie instalat pe cărucior.
45. **Conexiuni întrerupător-pedală:** Fiecare tip de întrerupător-pedală este conectat în mod unic pentru a împiedica conectarea încrucișată.
46. **Conector întrerupător-pedală monopolar:** Un conector filetat cu patru pini este conceput pentru a accepta un întrerupător monopolar cu două pedale disponibil de la CONMED (consultați secțiunea 6.13 pentru întrerupătorul-pedală monopolar compatibil). Utilizați numai întrerupătoarele-pedală CONMED.
47. **Conector întrerupător-pedală bipolar:** Un conector filetat cu trei pini conceput pentru a accepta un întrerupător bipolar cu o singură pedală disponibil de la CONMED (Consultați secțiunea 6.14 pentru întrerupătorul-pedală bipolar compatibil). Utilizați numai întrerupătoarele-pedală CONMED.
48. **Conector întrerupător-pedală argon:** Un conector filetat cu cinci pini conceput pentru a accepta întrerupătorul ABC cu o singură pedală disponibil de la CONMED (consultați secțiunea 6.14 pentru întrerupătorul ABC compatibil). Utilizați numai întrerupătoarele-pedală CONMED.
49. **Cititor/manometru pentru rezervoarele de gaz de argon cu vizualizare rapidă:** Apăsăți butonul pentru a vedea nivelurile de gaz de argon atunci când aparatul nu este pornit.
50. **Panoul din spate detașabil:** Permite accesul ușor la piulița de mână de reținere și la partea din spate a unității opționale AER DEFENSE pentru evacuarea fumului. Poate fi folosit și ca spațiu de stocare.
51. **Depozitarea tampoanelor:** Lada convenabilă permite stocarea electrozilor dispersivi.
52. **Depozitarea întrerupătoarelor-pedală:** Când nu se utilizează, întrerupătoarele-pedală pot fi stocate în locașurile convenabile situate pe ambele părți ale căruciorului.
53. **Tocuri pentru rezervorul de argon:** Pot găzdui până la două butelii de argon (dimensiune D).
54. **Cârlig cablu:** Cârligele pentru depozitarea mai multor cabluri strâng cablurile atunci când nu sunt utilizate.
55. **Buton selector pentru rezervorul de argon:** Permite utilizatorului să selecteze un rezervor special pentru utilizarea inițială.

**NOTĂ:** Dacă rezervorul selectat este gol, sistemul va trece automat la celălalt rezervor.