

neodisher® MediClean forte

Detergent pentru curatarea instrumentarului termostabil si termolabil.
 lichid concentrat

Domenii de aplicare:

- curatarea mecanica a instrumentarului termostabil si termolabil, inclusiv instrumentelor MIC si microinstrumente, endoscoape flexibile, instrumentarului de anestezie, containere si alte ustensile medicale.
- curatarea manuala a instrumentarului termostabil si termolabil in bai de imersie si bai ultrasonice.
- recomandat de asemenea pentru curatarea mecanica si manuala a instrumentarului da Vinci EndoWrist.
- curatarea manuala sau mecanica a echipamentului individual de protectie(PPE).

Caracteristici:

- indeparteaza in mod fiabil reziduurile de sange uscat si degradat
- cantitatile de materie organica sunt eficient reduse si totodata este impiedicata redepunerea proteinelor.
- neodisher MediClean forte intruneste cerintele Institutului German Robert-Koch(RKI) pentru reducerea riscului de transmitere a variantei noi a bolii Creutzfeldt-Jacob (vCJD) in procesul de curatare a dispozitivelor medicale.
- indeparteaza prionii proteinelor patogene din diferite tulpini de testare a prionului inclusiv tulpina de testare vCJD in trepte > 2 log (1%,55°C,10 min)
- sprijina eliminarea biofilmelor
- Potrivit pentru instrumente si instrumentar din otel inoxidabil, otelul pentru instrumente, sisteme optice ,materiale plastic uzuale si material pentru instrumentar anestezic.
- Aluminiul eloxat trebuie testat in prealabil pentru compatibilitate.

Proprietati speciale:

- compatibilitate excelenta cu materialele
- performanta de curatare superioara datorita formulei unice pe baza de agenti de amplificare a alcalinitatii, surfactanti si enzime
- cand este utilizat pentru pre-curatarea manuala, solutia de detergent nu trebuie clatita inainte de introducerea la curatarea mecanica cu neodisher MediClean forte
- nu este necesara faza de neutralizare pentru curatarea automata; asadar pentru ciclurile cu program scurt
- nu are eticheta de pericol, nu este un produs periculos

Aplicare si dozare:

neodisher MediClean forte este utilizat in dezinfectorul masinii de spalat instrumentar si de asemenea in bai de imersie si bai ultrasonice. Cantitatea utilizata depinde de domeniul de aplicare si de gradul de contaminare a instrumentarului care trebuie curatat. Cand curatam instrumentarul da Vinci EndoWrist neodisher MediClean forte poate fi folosit in toti pasii de pre-curatare manuala, pre-tratament ultrasonic si procesul de curatare mecanica.

Echipamentul individual de protectie curatat in bai de imersie trebuie complet umezit pe toata durata timpului de imersie. Apoi clatit cu apa curenta sau apa potabila.

Urmatorii parametri se cer respectati cand utilizati neodisher Mediclean forte :

Curatarea manuala si automata a instrumentarului

Spalare automata a instrumentarului termolabil si termostabil	2 – 10 ml/l (0,2 – 1,0 %)* ex. 40-60°C, 10 min
Dozare standard	5 ml/l (0,5 %)*, ex. 55°C, 10 min
Spalare automata a endoscoapelor flexibile si accesoriilor	5 ml/l (0,5 %) la 35- 55°C, 5 min

Spalare automata a instrumentarului da Vinci EndoWrist	8 ml/l (0,8 %) 40-55°C, 10-30 min**
Spalare manuala a instrumentelor termolabile si termostabile in bai imersie si bai ultrasonice	5-20 ml/l (0,5-2,0 %)* max. 40°C, 10-30 min
Spalare manuala a endoscoapelor flexibile si accesoriilor in bai de imersie si bai ultrasonice	5-30 ml/l (0,5- 3,0%)* max. 40°C, 5-10 min
Spalarea manuala a instrumentarului da Vinci EndoWrist in bai de imersie si ultrasonice	10 ml/l (1,0 %), max. 40°C

Curatarea manuala sau mecanica a echipamentului individual de protectie

Curatarea manuala a aparatelor de respirat/masti de respirat si a accesoriilor lor in bai de imersie	10-30 ml/l (1,0-3,0 %)* apa rece pana la max. 40°C, 15-30 min
curatarea automata a echipamentului individual de protectie (conform informatiilor producatorului) aparatelor de respirat /masti de respirat si a accesoriilor lor in dezinfectatorul masinii de spalat si/sau extractoare de masini de spalat (specificatii program conform informatiilor producatorului)	10 ml/l (1,0 %), 55°C, 2 min

* cantitatea dozata depinde printre altele si de gradul de contaminare

** in functie de recomandarile producatorului masinii de spalat

Utilizati dispozitive de dozare corespunzatoare.

Atat in faza de spalare cat si de clatire finala se recomanda utilizarea apei dedurizate.

Cand se utilizeaza apa dedurizata la clatirea finala se evita aparitia petelor si in acelasi timp este protejat si aluminiul eloxat.

Faza de neutralizare care este obligatorie cand se utilizeaza detergenti alcalini standard, nu este necesara. Cand se curata instrumente oftalmologice se recomanda o clatire intermediara cu apa inainte de clatirea finala. In cazul curatarii manuale solutia de lucru trebuie reimprospatata zilnic sau in cazul unei incarcari vizibile.

Note privind aplicarea:

- Numai pentru utilizare profesionala.
- Nu amestecati cu alte produse.
- Clatiti sistemul de dozare, inclusiv furtunul de aspirare, cu apa inainte de a schimba produsul.
- Procesul de curatare trebuie sa indeplineasca cerintele Directivei pentru Dispozitive Medicale si trebuie certificate prin procese de validare adecvate.
- Solutiile de lucru de neodisher Mediclean forte trebuie indepartate in totalitate cu apa (de preferat dedurizata).
- Procesarea dispozitivelor medicale :respectati recomandarile producatorului de instrumentar pentru utilizare in conformitate cu DIN EN ISO 17664.
- Procesarea echipamentului individual de protectie :va rugam observati recomandarile producatorului echipamentului individual de protectie.
- De asemenea trebuie respectate instructiunile producatorului masinii de spalat instrumentar.

Rapoarte de testare : Pentru curatarea instrumentarului da Vinci EndoWrist pot fi date la cerere.

neodisher Mediclean forte a fost utilizat si omologat pozitiv prin diverse teste si certificari in contextul certificarii echipamentului de protectie referitor la compatibilitatea materialelor.

Date tehnice:

- Greutate specifica (20 °C): aprox.1,1 g/cm³
- Valoare pH (determinat in apa deionizata, 20 °C) 2-10ml/l 10,4-10,8
In apa de retea si apa dedurizata ca si in apa de preclatire valoarea pH-ului poate sa difere
- Viscositate (concentrat, 20 °C): <10 mPas
- Factor de titrare (conform metodei speciale de titrare, neodisher mediclean forte) 0,77

Componente :

Ingrediente conform Directivei CE nr.648/2004 pentru detergenti:

< 5 % surfactanti neionici si anionici

de asemenea:enzime

Marcare CE:

 neodisher MediClean forte respecta cerintele legislatiei europene pentru dispozitive medicale.

Daca apare un incident grav cu acest produs raportati producatorului sau autoritatii nationale competente.

Depozitare:

Depozitati la loc racoros, ferit de inghet .Depozitati la temperaturi intre 0°-25°C,ferit de lumina soarelui.Termen de valabilitate 2 ani daca se respecta conditiile de depozitare.Pentru data de expirare vezi stampila de pe ambalaj din dreptul simbolului .

Schimbarea culorii produsului poate sa apara cand depozitarea se face in ambalajul original.Acest lucru nu influenteaza proprietatile produsului relevante din punct de vedere al aplicarii.

Avertismente de pericol si informatii privind masurile de siguranta:

neodisher Mediclean forte nu este clasificat ca produs periculos conform Regulamentului CLP (EC) nr.1272/2008 privind clasificarea,ambalarea si etichetarea substantelor si amestecurilor.

Evacuati numai cand recipientul este gol si inchis.Pentru evacuarea reziduurilor de produs cititi Fisa cu Date de Securitate a produsului disponibila pe site-ul www.drweigert.de cap. »Service » si www.tehnoplusindustry.ro .

MB 4050 GB/03-4

05/2022

Revizuit 06/2022

2-Evaluarea abilitatii produsului neodisher MediClean forte de inactivare/eliminare a bolii transmisibile encefalita spongiforma (TSE,prioni),de pe suprafetele dispozitivelor medicale si chirurgicale ,dupa inocularea directa a suprafetelor contaminate experimental-Serviciu de studiu a infectiilor atipice si a prionilor