



Set tubulatură de ieșire/aspirație artroscopie pentru pompa ConMed Linvatec 24k[®]

ROMÂNĂ

Set tubulatură de ieșire/aspirație artroscopie pentru pompa ConMed Linvatec 24k[®]

Referință	Descriere
24k100	Set tubulatură de ieșire/aspirație artroscopie 24k [®]

DESCRIERE

Acest set de tubulatură steril, de unică folosință nu conține latex și este conceput a fi utilizat cu sistemul de irigare ConMed Linvatec 24k. Este alcătuit dintr-o casetă care prinde o porțiune a tubulaturii, care se angajează în capul pompei de ieșire/aspirație. Linia de ieșire se conectează la portul de ieșire al tecii endoscopului sau la altă canulă. Linia de aspirație se conectează la un dispozitiv de aspirare, precum o piesă de mână „shaver”. Acest set de tubulatură trebuie utilizat la pompa 24k împreună cu un set de tubulatură de intrare.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Acest set de tubulatură pentru artroscopie este indicat a fi utilizat împreună cu pompa ConMed Linvatec 24k, pentru ieșire acționată de pompă și /sau aspirare de lichid la/de la o articulație în timpul procedurilor artroscopice.

CONTRAINDICAȚII

1. Acest set de tubulatură artroscopică nu este indicat pentru procedurile histeroscopice.
2. Acest set de tubulatură artroscopică nu este indicat pentru pomparea de aer sau de orice alt gaz.

AVERTISMENTE

1. Setul de tubulatură 24k100 este de unică folosință. Nu curățați, dezinfectați, resterilizați sau reutilizați. După utilizare eliminați-l în mod adecvat.
2. Posibilitatea de a curăța și resteriliza efectiv acest dispozitiv de unică folosință nu a fost dovedită și reutilizarea ulterioară poate afecta negativ performanța, siguranța și/sau sterilitatea dispozitivului.
3. Acest dispozitiv conține plastifiantul ftalat, DEHP, care poate trece în pacient pe durata administrării soluției de irigare. Studiile pe animale au arătat că expunerea la DEHP de nivel înalt poate afecta fertilitatea masculină și dezvoltarea reproductivă; aceste constatări nu au fost confirmate în studiile clinice. În determinarea utilizării acestui dispozitiv la copii sau la femei gravide sau care alăptează, beneficiile clinice trebuie să depășească orice risc potențial pentru copil.
4. Evitați schimbările bruște ale poziției articulației, care se ar putea rezulta în vârfuri de presiune intra-articulară și/sau extravazare.
5. Nu plisați, gătuiți, perforați sau treceți peste setul de tubulatură cu cărucioare sau alte echipamente. Pot rezulta citiri eronate, putând cauza lezarea pacientului sau extravazarea.

