


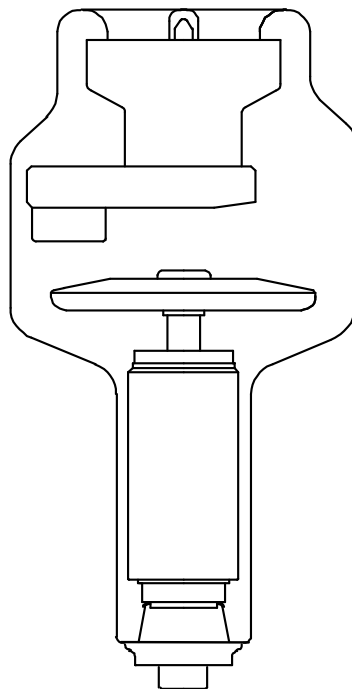

Questa documentazione deve essere fornita all'utilizzatore del complesso tubo-guaina
The contents of this documentation must be transmitted to the user of the tube-assembly
Le contenu de cette documentation doit être transmis à l'utilisateur de la gaine équipée

Documentazione N° Documentation N° N° de Documentation	Revisione Edition Version	Data di edizione Date of release Date de l'édition	Testo originale Original text Texte original
101S6C	A	13.06.2005	italiano / italian / italien

Sommario - Table of contents - Table des matières

Sommario - Table of contents - Table des matières.....	2
Caratteristiche - Specifications - Spécifications.....	3
Dimensioni - Dimension - Dimensions.....	4
Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo Anode heating and cooling curves Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode.....	4
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1.2 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1.2 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1.2 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	8
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1.2 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	8
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	9
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1.2 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	10
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	11
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1.2 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	12
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	13
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1.2 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	14
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	15
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1.2 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	16
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  0.6 - 3 ~ - (± 0.2 A).....	17
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  1.2 - 3 ~ - (± 0.2 A).....	17

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE in
accordo alle norme EN 60613 (IEC 613) e EN 60336 (IEC 336)

Declaration of conformity

This tube fulfils the essential requirements of the directive 93/42/EEC
according to standard EN 60613 (IEC 613) and EN 60336 (IEC 336).

Confirmation de conformité

Ce tube remplit les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE en
accord avec les normes EN 60613 (IEC 613) et EN 60336 (IEC 336).

Caratteristiche - Specifications - Spécifications

Macchie focali Focal spot Foyer	0.6 1.2	(IEC 336, EN 60336)
Velocità di rotazione dell'anodo Anode speed Vitesse de l'anode	3000 min ⁻¹ 10000 min ⁻¹	
Potenza anodica nominale Nominal anode input power Puissance anodique nominale	26 kW 63 kW 40 kW 100 kW	(IEC 613, EN 60613)
Diametro anodico Anode diameter Diamètre de l'anode	102 mm	
Materiale anodico Anode material Matériau de l'anode	RTM	
Angolo anodico Anode angle Pente de l'anode	12.5 °	
Campo di radiazione Radiation field Champ de rayonnement	a 70 cm 30 cm a 100 cm 43 cm	
Filtrazione inerente Inherent filtration Filtration inhérente	0.7 mm Al eq	(IEC 522)
Capacità termica anodica Maximum anode heat content Chaleur maximale accumulée dans l'anode	300 kJ 400 kHU	
Dissipazione termica continua massima Maximum continuous heat dissipation Dissipation thermique continue maximale	1000 W	
Alta tensione nominale Nominal X-ray tube voltage Haute tension nominale	150 kV	
Massima corrente di filamento Max. filament current Courant dans le filament max.	5.4 A	

I dati forniti nella presente documentazione si intendono riferiti a:

The data indicated in this documentation refer to:

Les données indiquées dans cette documentation sont calculées pour:

Potenza anodica di equilibrio termico

Equivalent anode input power

Puissance anodique d'équilibre thermique

100 W =

% della capacità termica anodica

% of maximum anode heat content

% de chaleur max. accumulée dans l'anode

33%