

SOLUȚIE DE NEUTRALIZARE PENTRU MAȘINI AUTOMATE DE SPĂLAT INSTRUMENTAR

DETRO MATIC NS – instrucțiune de utilizare

- **Soluție de neutralizare**
- **Concentrat**

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

Detro Matic NS este utilizat pentru îndepărtarea reziduurilor alcaline rămase în urma curățării cu soluții alcaline a instrumentarului în mașinile de spălat și dezinfectat.

- Îndepărtează eficient reziduurile alcaline
- Asigură o curățare eficientă
- Compatibil cu toate tipurile de mașini de spălat instrumentar
- Compatibil cu toate gradele de duritate a apei
- Oferă protecție împotriva coroziunii
- Concentrație de utilizare redusă
- Eficiență ridicată

COMPOZIȚIE

Acid citric, agenți complexanți, inhibitori de coroziune

DOZARE

Se utilizează în concentrație de **0,05% – 0,1%**
(5–10 ml de produs la 10 litri de apă)

ATENȚIONĂRI

- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire.
- Nu utilizați pentru curățarea mâinilor, feței sau a alimentelor.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Produs iritant.
- Evitați contactul cu pielea și mucoasele.
- În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra departe de lumina directă a soarelui.
- Recipientele trebuie închise etanș și depozitate într-un spațiu bine ventilat, la temperaturi între **0–30 °C**.

AMBALAJ

5 litri

DETRO HEALTHCARE KİMYA SANAYİ A.Ş.

☎ 212 659 77 62 📞 212 659 77 63

✉ info@detrox.com.tr – www.detrox.com.tr