

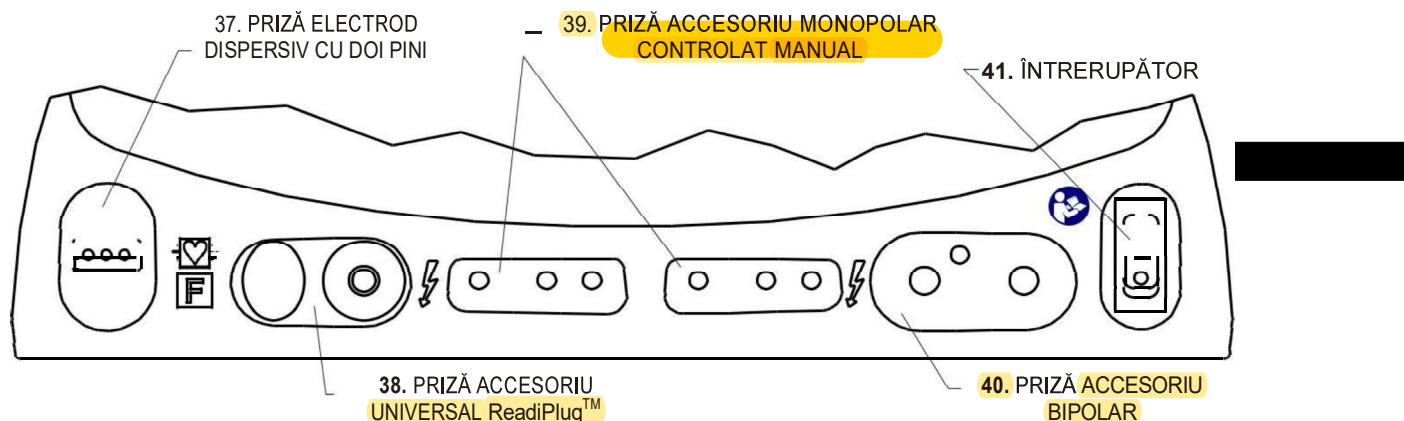


Figura 2.2 Panoul de ieșire

tragerea ușoară a fișei pentru a vă asigura că mecanismul ReadPlug™ a reținut corect vârful. Pentru a scoate vârful, **trebuie să apăsați butonul** în timp ce scoateți fișa.

- Această priză poate fi activată numai cu întrerupătorul-pedală monopolar.

AVERTIZARE

NU CONECTAȚI NICIODATĂ MAI MULT DE UN ACCESORIU LA ACEASTĂ PRIZĂ.

39. PRIZĂ PENTRU ACCESORIU MONOPOLAR CONTROLAT MANUAL: Două prize independente sunt prevăzute pentru conectarea accesoriilor monopolare controlate manual. Doar prin accesoriile conectate la ele puteți activa aceste prize.

40. PRIZĂ PENTRU ACCESORIU BIPOLAR: Ieșirea bipolară este activată de accesorii bipolare controlate cu pedală sau cu accesorii bipolare controlate manual. Accesoriiile CONMED cu fișe fixe de conectare sunt recomandate pentru această priză. Pentru legăturile vechi cu două conductoare de fișe tip banană, conectați aceste conductoare active bipolare ale forcepsului la conexiunile externe.

41. ÎNTRERUPĂTOR: Întrerupător principal pentru pornirea și oprirea ESU.

2.4.3 Panoul din spate

Panoul din spate conține conectorii pentru întrerupătorul-pedală, conectorul cablului de alimentare, siguranțele, comenzile de volum și un mâner de transport. Consultați Figura 2.3.

42. MÂNERUL DE TRANSPORT

43. DIFUZOR: Sunetul de la difuzor emană din această locație.

44. PLĂCUȚA DE IDENTIFICARE: Specifică numărul modelului, numărul de serie, tensiunile de linie nominală, frecvența, curba și informațiile privind siguranța.

45. VENTILATOR: Aerul forțat de la ventilatorul controlat de temperatură este expulzat în această locație.

46. CONECTOR PENTRU ÎNTRERUPĂTORUL-PEDALĂ BIPOLAR: Un conector filetat cu 3 pini conceput să accepte orice întrerupător-pedală bipolar cu o pedală de la CONMED Electrosurgery. Numerele piesei întrerupător-pedală bipolar ConMed sunt: 60-5103-001, 60-5103-002 și 60-1650-001.

47. CONECTOR ÎNTRERUPĂTOR-PEDALĂ MONOPOLAR: Acest conector filetat cu 4 pini este conceput pentru a accepta fișe atașate la orice întrerupător-pedală monopolar cu două pedale disponibil de la CONMED Electrosurgery. Utilizați numai întrerupătoare-pedală CONMED Electrosurgery. Este posibil să nu fie compatibile alte tipuri de întrerupătoare-pedală de la producător. Numărul piesei întrerupător-pedală monopolar ConMed: 60-6700-001.

48. CONECTOR RELEU DE ACTIVARE: O priză pentru acționarea evacuatoarelor de fum și a dispozitivelor similare atunci când se livrează putere electrochirurgicală. Clasa maxim de contact pentru această priză este de 1 amp la 24 volți CC. Verificați dacă dispozitivele conectate la această putere funcționează corect într-un mod care este sincronizat cu livrarea de energie ESU înainte de utilizare.

49. PRIZE PENTRU SIGURANȚĂ: Pentru instalarea a două siguranțe de rețea cu clase, după cum se menționează în secțiunea 2.2.1.

50. CONEXIUNE DE ÎMPĂMÂNTARE ECHIPOTENȚIALĂ: Conexiunea de împământare a șasiului, potrivită pentru atașarea cablului auxiliar

