

CleanMed Det ML4

Detergent puternic alcalin pentru mașina de spălat/
dezinfectat instrumentar medical

Descriere

CleanMed Det ML4 este un detergent lichid alcalin concentrat special formulat pentru a asigura îndepărtarea excelentă a murdăriei în cadrul activităților de curățare a instrumentarului medical. Compoziția unică face produsul foarte eficient în toate tipurile de apă.

Proprietăți de bază

CleanMed Det ML4 este un detergent lichid puternic alcalin, adecvat pentru folosirea într-o gamă largă de aparate de dezinfectie/spălare și mașini de spălat. Produsul este special formulat pentru spălarea instrumentarului medical, echipamentelor pentru anestezie, recipientilor de aspirare în mașini de spălat și dezinfectat. De asemenea, este excelent pentru curățarea chiuvetelor, tăvițelor renale în mașini de clătire și dezinfectare.

De asemenea, produsul este adecvat pentru mașinile de spălat

Produsul conține un amestec de alcalii și agenți complecși ce oferă rezultate excelente de curățare chiar și în apă dură. Acesta prevede, de asemenea, protecția împotriva coroziunii, pentru a proteja piese metalice sensibile din aparat.

Avantaje

Pătrunde prin murdărie și îndepărtează sânge uscat
Formula foarte concentrată asigură o utilizare economică
Conține substanțe anticorozive
Previne formarea depunerilor de calcar în mașină

Instrucțiuni de utilizare

CleanMed Det ML4 se aplică în mod normal folosind un echipament de dozare automat la o concentrație de 1-3 ml/litru.

Intruduceți tubul de aspirare în recipientul detergentului iar apoi se va face dozarea corectă.





Nivelurile reale de dozare sunt determinate în funcție de condițiile locale.

Date tehnice

Aspect: lichid limpede, galben
pH (soluție 1%): 11,4 - 12,5
Densitatea relativă: 1.15

Aceste cifre sunt valori tipice și nu trebuie considerate drept specificații de calitate.

ML4

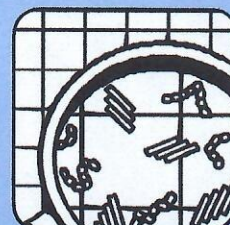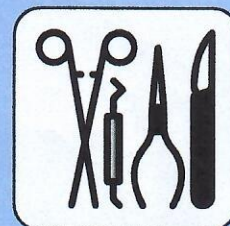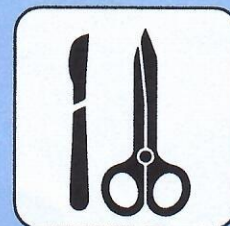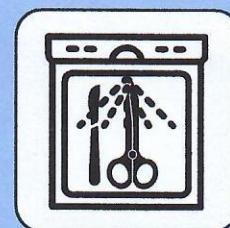

CleanMed Det ML4

Detergent puternic alcalin pentru mașina de spălat/
dezinfectat instrumental medical

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat.

A se păstra în ambalajul original.

A se evita temperaturile extreme.

Compatibilitatea produsului

În condițiile recomandate de utilizare, CleanMed Det ML4 este adecvat pentru majoritatea materialelor care se găsesc în spitale în mod obișnuit.

Ambalare

2 x 5 L

ML4

KOLINS HGN SRL

Chișinău, bd. Moscova 21

Tel: (+373) 693 40 504,

Tel. (+373) 610 50 708

e-mail: kolins.director@mail.ru

www.kolins.md