

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

10. Folosind o perie cu peri moi, aplicați soluție de detergent pe toate suprafețele interioare și externe, asigurându-vă că toate părțile mobile sunt curățate atât în poziție deschisă, cât și în poziție închisă. Repetați procesul de curățare până când instrumentul este vizibil curat.

Notă: Curățați canulele și găurile folosind o perie adecvată pentru a vă asigura că diametrul și adâncimea completă sunt atinse.

11. Clătiți sub jet de apă de la robinet (temperatura minimă 38°C/ 100,4°F) timp de minim 30 de secunde folosind minimum 1 litru de apă de clătire, asigurându-vă că apa curentă trece prin toate crăpăturile și canulele.

12. Asigurați-vă că instrumentul este vizibil fără reziduuri de detergent sau de curățare.

CLĂTIRE FINALĂ

13. Clătiți sub jet de apă deionizată (temperatura minimă 25°C/ 77°F) folosind un volum minim de 1 litru de apă de clătire timp de minim 30 de secunde pentru a îndepărta reziduurile de detergent sau resturile de pe dispozitiv

INSPECTIE

14. Verificați curățenia. Asigurați-vă că instrumentul nu are resturi vizibile și/sau pământ. Nerespectarea instrucțiunilor de curățare poate compromite sterilitatea dispozitivului.

USCAREA

15. Uscați dispozitivul folosind un prosop curat, fără scame, până când este vizibil fără picături de apă și/sau condens.

LUBRIFIEREA

16. Trebuie utilizat un lubrifian comercial pe bază de apă pentru a minimiza uzura pieselor mobile.

STERILIZARE CU ABUR

Pentru sterilizarea instrumentelor într-o tavă, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu tava de sterilizare specifică.

Notă: Validarea sterilizării a fost efectuată în conformitate cu cerințele AAMI TIR12.

Metoda	Ciclu	Temperatura Minimă	Timpul de expunere
Abur (împachetat/despachetat)	Pre-Vacuum	270°F (132°C)	3 minutes
Abur (împachetat/despachetat)	Gravitatea	270°F (132°C)	10 minutes

INFORMATII

Pentru mai multe informații sau o demonstrație a produsului, contactați reprezentantul regional de vânzări CONMED sau sunați la 1-800-237-0169 în S.U.A.3