

În timpul unei proceduri deschise în care va fi utilizat un furtun de evacuare a fumului, vă rugăm să selectați butonul „Tub deschis”. Atunci când utilizați fie o atașare la creionul dumneavoastră electrochirurgical, fie un creion de evacuare a fumului integrat, precum PlumePen™ de la Buffalo Filter, vă rugăm să selectați butonul modului „Electrochirurgical/Diatermie”. În fine, în cazul atașării la o canulă chirurgicală în timpul procedurilor laparoscopice, vă rugăm să selectați butonul „Laparoscopic”.

În orice moment, atunci când doriți să reveniți la meniul anterior de pe ecranul tactil VisiClear™, utilizați butonul de revenire pentru a reveni la ecranul anterior. A se vedea Figura 2.



Figura 2.

ASPIRAȚIA PORNITĂ ȘI ÎN AȘTEPTARE

Odată ce a fost selectat modul pe interfața ecranului tactil (a se vedea Figura 1), modul pe care l-ați selectat va apărea în partea stângă a ecranului tactil. Puteți activa sau dezactiva debitul de aspirație prin apăsarea butonului care apare ca niște palete de ventilator pe ecranul tactil al unității. Imaginea ventilatorului va începe să se rotească, pentru a indica faptul că motorul unității funcționează și debitul de aspirație a început. A se vedea Figura 3.



Figura 3.

CONTROLUL ASPIRAȚIEI

Cantitatea de aspirație poate fi ajustată prin apăsarea butoanelor de control al aspirației situate în dreapta imaginii ventilatorului. De fiecare dată când se apasă butonul de control al aspirației în sus sau în jos, viteza motorului este crescută sau scăzută cu 10%. Viteza de aspirație nu va fi repetată în buclă. Controlul aspirației trebuie setat la cea mai mică setare practică pentru îndepărtarea completă a fumului chirurgical de la locul intervenției chirurgicale. A se vedea Figura 4.